

Tabela dozowania ANIOSEPT ACTIV



	WYROBY MEDYCZNE ZANIECZYSZCZONE ORGANICZNIE		WYROBY MEDYCZNE NIEZANIECZYSZCZONE ORGANICZNIE		
	MYCIE I DEZYNFEKCJA		DEZYNFEKCJA WYSOKIEGO POZIOMU		
SPEKTRUM	bakteriobójczy prątkobójczy grzybobójczy wirusobójczy (HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) sporobójczy (Clostridium difficile)	bakteriobójczy prątkobójczy grzybobójczy wirusobójczy sporobójczy (Clostridium difficile)	bakteriobójczy prątkobójczy grzybobójczy wirusobójczy sporobójczy (Bacillus subtilis, Clostridium difficile)		
STĘŻENIE	0,5%	1%	2%	1%	0,5%
CZAS	15 minut	30 minut	15 minut	60 minut	90 minut
LICZBA ŁYŻEK MIAROWYCH NA 5 L WODY	1 łyżka na 5 L wody	2 łyżki na 5 L wody	4 łyżki na 5 L wody	2 łyżki na 5 L wody	1 łyżka na 5 L wody

