



ASORTYMENT WÓZKÓW

Lifeguard®



Twój partner w opiece na pacjentem

Asortyment wózków Lifeguard o regulowanej wysokości oferuje elastyczne rozwiązania zaprojektowane z myślą o poprawie wszelkich aspektów związanych z opieką nad pacjentem. Solidne i łatwe w użytkowaniu wózki, dzięki małej wadze i doskonałej

zwrotności znacznie zmniejszają ryzyko związane z transportem i opieką nad pacjentami. Szeroki wybór funkcji, opcji oraz dodatkowych akcesoriów pozwala na dostosowanie rozwiązań do różnych potrzeb klinicznych i możliwości finansowych klienta.

Rodzina Lifeguard

Wózki do przewożenia chorych, stosowane podczas wykonywania badań diagnostycznych, obrazowania rentgenowskiego, zabiegów i rekonwalescencji.

LG 55

- Kompatybilny na całej długości z aparatem RTG
- Kompatybilny na całej długości z ramieniem C
- Możliwość wykonywania zdjęć bocznych
- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg



LG 50

- Opcjonalnie, możliwość wykonywania zdjęć RTG na całej długości leża
- Opcjonalnie, możliwość współpracy z aparatem z ramieniem C na całej długości leża
- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg

LG 20

- Opcjonalnie, możliwość wykonywania zdjęć RTG na całej długości leża
- Możliwość dostosowania szeregu opcji do potrzeb i budżetu klienta
- Bezpieczne obciążenie robocze 180 kg



Przemieszczanie i obsługa

Ergonomiczne uchwyty do pchania i ciągnięcia na dwóch wysokościach

Szeroki zakres regulowania wysokości

Dwustronna nożna regulacja wysokości (i ustawianie pozycji Trendelenburga i odwróconej pozycji Trendelenburga w modelach LG 50 i LG 55)

System piątego koła Easitrack™



Obrazowanie

Wózki do przewożenia pacjentów Lifeguard mogą być przystosowane do wykonywania obrazowania na całej długości leża przy użyciu konwencjonalnej kasety rentgenowskiej oraz systemów z ramieniem C. (Uwaga: nie są przeznaczone do rezonansu magnetycznego)



Lifeguard 55: wysuwana kasetka na zdjęcia rentgenowskie



Lifeguard 55: kompatybilny z ramieniem C na całej długości leża



Kontrola zakażeń

Otwarta konstrukcja i gładkie powierzchnie wózków Lifeguard pozwalają na łatwe czyszczenie i odkażanie wszystkich powierzchni.



Elastyczność oferty i szeroki wybór

Lifeguard oferuje użytkownikom szeroki wybór różnych funkcji ułatwiających postępowanie z pacjentami w środowisku szpitalnym. Uniwersalny wózek LG 20 posiada jeszcze więcej możliwości dostosowania opcji do indywidualnych potrzeb i budżetu klienta. Opcje do wyboru obejmują podnoszoną platformę na kasetę do RTG oraz system piętego koła Easitrack.



LG 20 w kolorze złamanej bieli




Lifeguard 50 i 20: podnoszona platforma na kasetę RTG na całej długości leża





Dostępne opcje materacy

Firma Arjo posiada w swoim asortymencie szeroki wybór materacy pasujących do wózków Lifeguard (patrz specyfikacja produktu), w tym: materac zapewniający redystrybucję nacisku Bi-Flex®, opracowany w celu zapobiegania odleżynom.

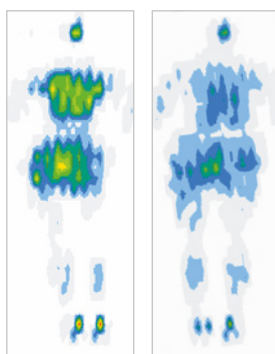

Standardowy materac Materac Bi-Flex

Niskie  Wysokie
Ciśnienie między powierzchniami



Materac Bi-Flex pokazany na wózku LG 55

Aksesoria



STOLIK MOCOWANY NA ZATRZASKI



PANEL OPARCIA STÓP



OSŁONY BARIEREK ZABEZPIEZAJĄCYCH



PÓŁKA NA MONITOR/UCHWYT
NA NOTATKI

W standardzie z modelami LG 55 i LG 50



PODŁOKIETNIK



WIESZAK NA KROPLÓWKI

Specyfikacja produktu

Przed zamówieniem skontaktuj się z biurem handlowym

| FUNKCJE | LG 55 | LG 50 | LG 20 |
|--|-------------------------|------------|----------------------|
| Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców (0-87°) wspomagana sprężyną gazową | ▪ | ▪ | ▪ |
| Dwustronna nożna regulacja wysokości leża / pozycji Trendelenburga / odwróconej pozycji Trendelenburga | ▪ | ▪ | |
| Dwustronna nożna regulacja wysokości | | | ▪ |
| Nożny przycisk bezpieczeństwa w pozycji Trendelenburga przy wezglądzie | ▪ | ▪ | |
| Dźwignia ustawiania pozycji Trendelenburga przy wezglądzie | | | ▪ |
| Ergonomiczne uchwyty do pchania i ciągnięcia na dwóch wysokościach | ▪ | ▪ | ▪ |
| Platforma materaca przezierna dla promieni rtg na całej długości | ▪ | ▪ | ▪ |
| Przesuwana taca na kasyety na zdjęcia rentgenowskie na całej długości leża | ▪ | | |
| Podnoszona platforma kasyety na zdjęcia rentgenowskie na całej długości leża | | (•) | (•) |
| System sterujący Easitrack z piątym kołem | ▪ | ▪ | (•) |
| Antystatyczne koła o średnicy 200 mm (8") | ▪ | ▪ | ▪ |
| Centralny system hamulca/ sterowania — aktywacja w 4 narożnikach | ▪ | ▪ | |
| Centralny system hamulca/ sterowania — aktywacja w 2 narożnikach (przy wezglądzie) | | | ▪ |
| Zintegrowany składany statyw do kroplówki (wezglądzie) | ▪ | ▪ | ▪ |
| Chowany stojak do kroplówki (na podstawie jezdnej wózka) | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zintegrowane opuszczane barierki boczne ze stali nierdzewnej | ▪ | ▪ | ▪ |
| Pojemnik na butle gazów medycznych (rozmiary D, E lub F) | ▪ | ▪ | ▪ |
| Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta | ▪ | ▪ | ▪ |
| Uchwyty do aparatu tlenowego / aparatu do odsysania | ▪ | ▪ | ▪ |
| Odłączana, składana półka na monitor/ uchwyt na kartę informacyjną | ▪ | ▪ | (•) |
| Kolor profili — złamana biel | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kolor profili — szary/ciemnoszary | (•) | (•) | (•) |
| Bezpieczne obciążenie robocze | 250 kg | 250 kg | 180 kg |
| Zakres nachylenia płaszczyzny poziomej (Trend/anty-Trend) | +/-12° | +/-12° | +/-12° |
| Zakres wysokości leża | 560-930 mm | 560-930 mm | 600-920 mm |
| Szerokość powierzchni dla pacjenta | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Szerokość całkowita | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
| Długość całkowita | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| | | | • Standard (•) Opcja |
| Opcje materacy | Numer katalogowy | | |
| Materac o grubości 65 mm z powłoką rozciągliwą w dwie strony | LGMAT/10 | | |
| Dwuczęściowy materac transferowy | LGMAT/13 | | |
| Materac zapewniający redystrybucję ciśnienia Bi-Flex* | TRM2 | | |

* Jeden z produktów firmy Arjo przeznaczonych do terapii i zapobiegania powstawaniu odleżyn
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Luty 2018 W urządzeniach i produktach dostarczanych przez Arjo można używać wyłącznie części zaprojektowanych przez Arjo, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Stosujemy zasadę ciągłego doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych produktu bez uprzedzenia.
® i ™ są znakami towarowymi należącymi do grupy firm Arjo.

W Arjo dokładamy wszelkich starań, aby podnosić jakość codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem. Nasza oferta produktów i rozwiązań umożliwiających zgodną z zasadami ergonomii opiekę nad pacjentami, dbanie o higienę osobistą, dezynfekcję, diagnostykę oraz skuteczne zapobieganie odleżynom i żyłnej chorobie zakrzepowo-zatorowej pomaga profesjonalistom na całym świecie podnosić standardy opieki gwarantujące ich pacjentom i podopiecznym bezpieczeństwo i godność. Wszystko co robimy, robimy z myślą o ludziach.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Dział Sprzedaży · ul. Salsy 2 · 02-823 Warszawa · Polska · Biuro ds. Sprzedaży +48 691 36 56 30

www.arjo.pl