


## NeoHug®

Uchwyt do wyposażenia medycznego

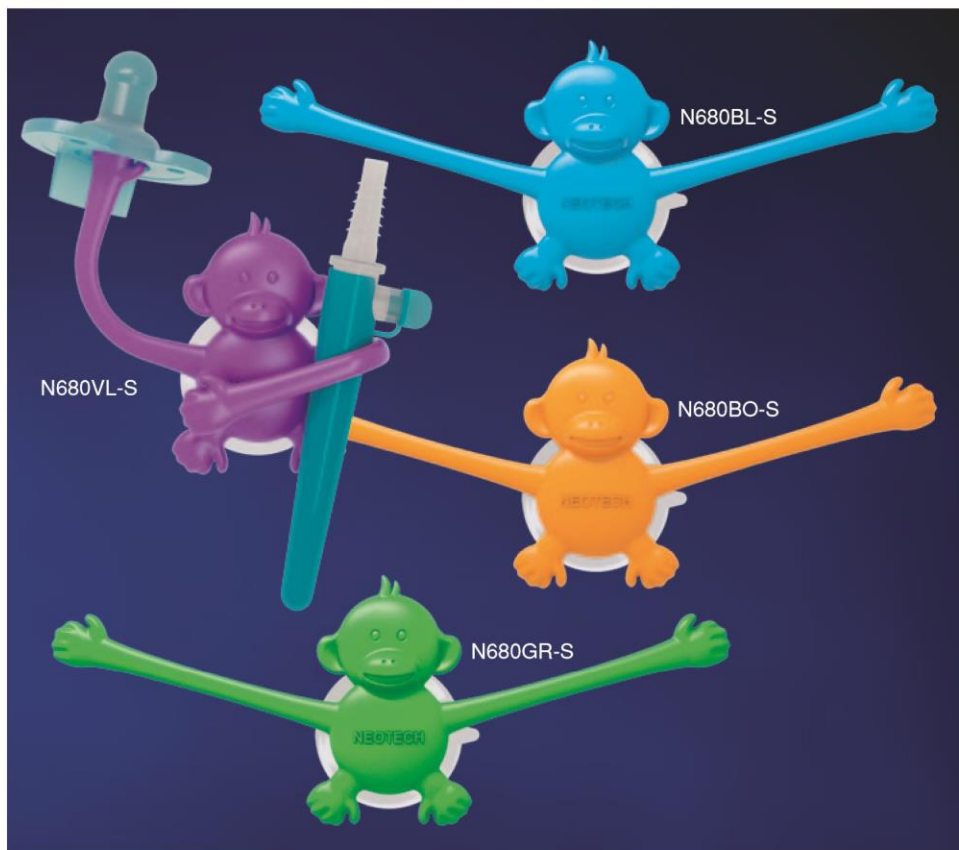

### Właściwości i zalety

- Zabawny projekt małpki dostępny w pięciu jasnyc kolorach
- Giętkie ramiona do trzymania różnych lekkich przedmiotów
- Idealny do trzymania smoczka, końcówki do odsysania itp.
- Dwie opcje mocowania
  - Klips typu C:
    - Mocowany do większości stojaków
    - Możliwość repozycjonowania
    - Prążkowa konstrukcja minimalizująca zsuwanie się uchwytu
  - Przysawka:
    - Przyczepia się do większości gładkich powierzchni
    - Duża przysawka zapewniająca mocne trzymanie i łatwe usuwanie
    - Trzyma się pomimo zmian ciepła i wilgoci
    - Możliwość repozycjonowania
- Nie zawiera lateksu i DEHP

Cat No.	Color	Qty/Unit
N680BL	Blue	25/box
N680BO	Bright Orange	25/box
N680BP	Bright Pink	25/box
N680GR	Green	25/box
N680VL	Violet	25/box
N680A	Assorted (5 of each color)	25/box

C-clip=C, Suction Cup=S  
(e.g. N680BL-C, N680GR-S)



Clinician Invented

Patent Pending

# NeoHug®

## Uchwyt do wyposażenia medycznego

### ZASTOSOWANIE

Uchwyt NeoHug jest przeznaczony do przymocowania i podtrzymywania nieaktywnie działających wyrobów medycznych

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

#### Krok 1

Wyjąć uchwyt NeoHug z opakowania i zutylizować biodegradowalny worek.

#### Krok 2a (Klips C)

Umieścić uchwyt NeoHug na stojaku, naciskając środek klipsa C (brzuszek), aż zatrzaśnie się na miejscu.

#### Krok 2b (Przyssawka)

Przytwierdzić uchwyt NeoHug, mocno dociskając środek (brzuszek) przyssawki do gładkiej, płaskiej powierzchni.

**Uwaga:** w przypadku montażu w warunkach wysokiej wilgotności (np. w inkubatorach) przed montażem wytrzeć powierzchnię, aby usunąć nadmiar wilgoci

#### Krok 3

Zgiąć i dostosować ramiona zgodnie z potrzebą, aby unieruchomić mocowane przedmioty.

### USUWANIE

#### Krok 1

Wymieniać uchwyt NeoHug co 14 dni lub po upływie terminu wskazanego w procedurze szpitalnej.

#### Krok 2a (Klips C)

Mocno chwycić klips C, a następnie zsunąć go i pociągnąć. Nie ciągnąć za małąkę

#### Krok 2b (przyssawka)

Podnieść języczek przyssawki, aby ją oderwać od powierzchni.

Uwaga: Wymienić bezzwłocznie, kiedy uchwyt jest widocznie zabrudzony lub uszkodzony.

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Rodzaj materiału

NeoHug (małpka): TPE, ABS, stal nierdzewna

Klips C: ABS

Przyssawka: Winył

Nie zawiera lateksu naturalnego

Nie zawiera plastyfikator DEHP

#### Wymiary

Rozpiętość ramion: 19.5 cm

Klips C: odległość mocowania od małąki 28.5 mm x 25.5 mm wysokość

Średnica przyssawki: 45 mm

#### Limit obciążenia

Do 113 gr łącznie na oba ramiona

#### Pakowanie

Pakowanie indywidualne: TAK

Rodzaj opakowania: biodegradowalny polipropylen

### PRZESTROGI

Przyssawka powinna być utrzymywana w czystości. Nie należy dopuszczać do jej zanieczyszczenia płynami.

Wymienić bezzwłocznie, kiedy uchwyt jest widocznie zabrudzony lub uszkodzony.

Wymienić, jeśli klips C lub przyssawka nie trzymają się skutecznie.

Wyrób przeznaczony do stosowania u jednego pacjenta.

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Parkway • Valencia, CA 91355

©2020 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

M641 Rev B



KROBAN Sp. z o.o.  
ul. Piotrkowska 182/451,  
90 – 368 Łódź Polska  
NIP: 7252296972 REGON:385452206  
KRS: 0000827038

#### Biura handlowe

Tel: 512 046 260

ul. Piotrkowska 270 p.1410

90-361 Łódź

Tel: 667 987 771

ul. Łabiszyńska 2 Olimpin

86-061 Brzoza

Kapitał zakładowy: 100.000 PLN

[www.kroban.pl](http://www.kroban.pl)

[info@kroban.pl](mailto:info@kroban.pl)

Fax: +42 288 48 30