

NOSZE EWAKUACYJNE TACTICAL SKED Z KLAMRAMI COBRA

Producent: SKEDCO
Model: SK 245C

OPIS PRODUKTU:

SK-245C Tactical Sked z klamrami Cobra to wszechstronne nosze ewakuacyjne używane przez operatorów wojskowych podczas działań bojowych, które powstały na podstawie doświadczeń z misji wojskowych w Afganistanie.

Nosze mierzą zaledwie 57 cm x 200 cm. Można je łatwo przenosić w plecaku lub na nim. Dzięki mniejszej szerokości zwinięte, przytrzymane na plecaku bazowym ratownika nosze nie przeszkadzają przy przechodzeniu przez drzwi w budynkach. Po zwinięciu Tactical Sked ma 17,5 cm średnicy i 57 cm długości.

Po spięciu pasami nosze usztywniają się. Można je przenosić lub ciągnąć po ziemi bez angażowania rąk, wykorzystując do tego taśmy do przeciągania i plecak jako uprząż. Po ściągnięciu paskami tworzą anatomiczną szynę wokół nóg. Za pomocą zawiesi do transportu pionowego znajdujących się w zestawie, nosze umożliwiają ewakuację ранego śmigłowcem bez konieczności jego lądowania.

Tactical SKED wykonane są z tego samego tworzywa, z którego wykonane są wszystkie nosze Skedco. Są niezwykle wytrzymałe w najbardziej ekstremalnych warunkach. Występują w kolorze Coyote Brown. W standardzie posiadają klamry Cobra.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Koncepcja ewakuacji, pozwalająca na naciągnięcie ранego na nosze, bez konieczności podnoszenia się ratownika oraz odciążenie go z terenu zagrożenia
- Możliwość zabezpieczenia poszkodowanego i ewakuacji z zagrożenia przez jednego ratownika
- Zastosowanie w typowych warunkach pola walki, przy ewakuacji za pomocą możliwych/dostępnych sposobów ewakuacji w tym poprzez ciągnięcie na duże odległości, przenoszenie, ewakuacje przy użyciu śmigłowca
- Umożliwiają prowadzenia ognia przez ratownika w trakcie przeciągania noszy
- Umożliwiają prowadzenie ognia przez ранego na noszach
- Tworzywo polietylenowe o średniej gęstości, o szerokim zakresie temperatur pracy, zapewniające poślizg ułatwiający przeciąganie noszy po różnych powierzchniach
- Materiał noszy odporny na działania i wnikanie chemikaliów, krwi, substancji ropopochodnych
- Elastyczna konstrukcja usztywnia nosze a po dopasowaniu do poszkodowanego, zapewnia bezpieczeństwo transportu
- Kształt górnej części chroni głowę pacjenta przed urazami podczas przeciągania w terenie
- Kompletny zestaw gotowy do pracy z wbudowanymi pasami zabezpieczającymi pacjenta wyposażonymi w oryginalne klamry Cobra
- Taśma do ciągnięcia mocowana u wezłowania wyposażona w uchwyty do ciągnięcia



DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	WAGA Z AKCESORIAMI	INNE
200 cm	57 cm	ok. 2,5 mm	4 kg	temperatura topnienia: 230 - 260 °C temperatura pracy: do - 84°C pasy do transportu poziomego – wytrzymałość taśmy na rozciąganie: 45 kN

MATERIAŁ

NOSZE	PASY NOŚNE	PRZELOTKI	KLAMRY SPINAJĄCE
Średniej gęstości, elastyczne, gładkie, nieabsorbujące tworzywo polietylenowe	Nylonowa taśma	Mosiądz	Cobra Buckles Austria Alpin 14kN

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

	MODEL	
SKŁAD	SK-245C	Sked taktyczny z klamrami Cobra
ZESTAWU	SK-247	Plecak Cordura w kolorze Coyote Brown
	SK-203-GR	Zawiesia do podnoszenia poziomego
	SK-206-B	Czarny karabinek
CZĘŚCI ZAMIENNE	SK-204	Taśma do ciągnięcia
	SK-245C	Nosze Tactical SKED
	SK-247	Plecak z Cordury w kolorze Coyote Brown
	SK-203-GR	Zawiesia do podnoszenia poziomego
	SK-206-B	Czarny karabinek
	SK-204	Taśma do ciągnięcia
AKCESORIA	SK 750	MOUT Lina ratunkowa

MODEL		NSN
SK-245C	Sked taktyczny z klamrami Cobra	6530-01-678-6791
SK-750	MOUT Lina ratunkowa	4240-01-531-3976

Okres gwarancji: 24 miesiące

KORZYŚCI:

- Standard wyposażenia wielu jednostek specjalnych w armiach NATO jako podstawowy system ewakuacji medycznej – zapewnia kompatybilność ewakuacji, zabezpieczenie logistyczne
- Przystosowane do podstawowej ewakuacji z pola walki za pomocą przeciągania, przenoszenia, transportu w WEM czy ewakuacji przy użyciu śmigłowca
- Zaprojektowane pod potrzeby pola walki – umożliwiają ewakuującemu kontynuowanie odpowiedzi ogniowej w trakcie ewakuacji, a ewakuowanemu ostrzał w trakcie transportu
- Elastyczne tworzywo sztuczne – pozwala na profilowanie noszy w zależności od etapu działania:
 - jest płaskie, umożliwiając przetoczenie, nasunięcie poszkodowanego bez jego podnoszenia
 - po zapięciu pasów usztywnia się, umożliwiając bezpieczne dla pacjenta pokonywanie przeszkód, w tym nierówności terenu, krawężników, schodów
 - otacza poszkodowanego chroniąc jego boki i głowę przed urazami podczas przeciągania
- Zmniejszone gabaryty ułatwiają przenoszenie noszy przytroczonych do plecaka bazowego ratownika medycznego – umożliwiają zachowanie mobilności zwłaszcza w pomieszczeniach i przy przechodzeniu przez drzwi
- Niska waga zestawu (4 kg) – ułatwia transport wielofunkcyjnych noszy do miejsca zdarzenia oraz zmniejsza zmęczenie ratowników
- Zrolowane w plecaku zajmują mało miejsca – mogą być transportowane w każdym środku transportu wojskowego
- Kompletny zestaw gotowy do pracy – pozwala na natychmiastowe działanie i ewakuację poszkodowanych
- Materiał noszy nie wchłania chemikaliów, substancji organicznych i ropopochodnych – dzięki czemu jest łatwy w czyszczeniu i dekontaminacji



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

