


AQUAMEDEN

Wanna do masażu podwodnego

wysokiej klasy armatura

GROHE
ENJOY WATER

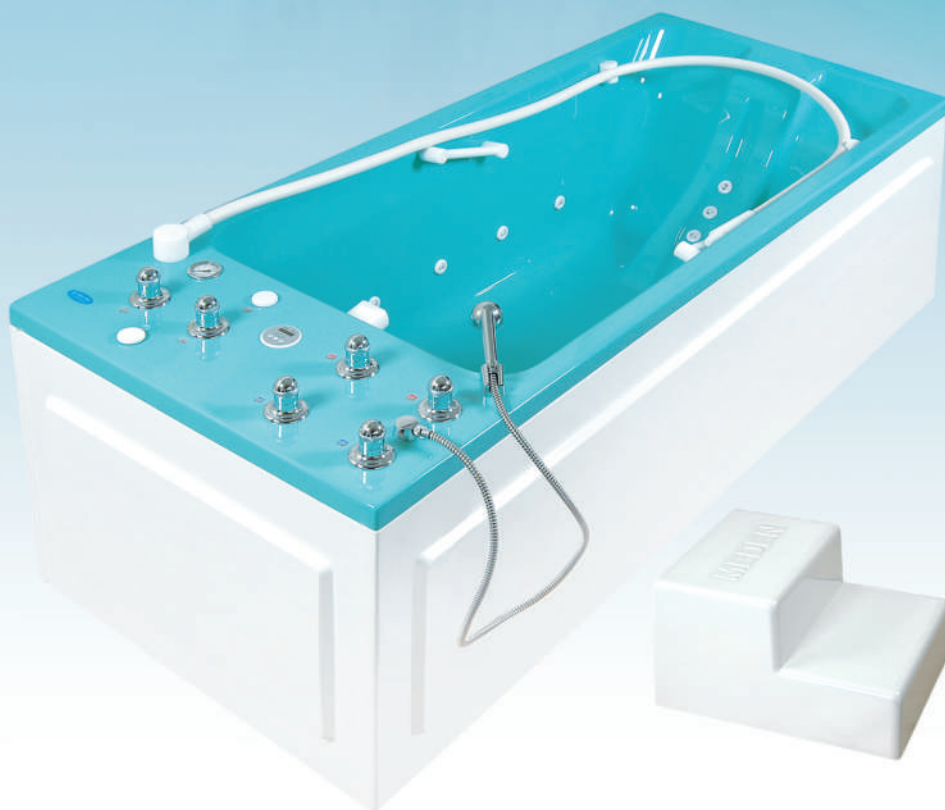

wyprofilowana niecka
wanny

masaż podwodny,
hydromasaż

optymalna przestrzeń
do operowania węzłem
zabiegowym

elektroniczne sterowanie

do wykorzystania w:

- zakładach przyrodoleczniczych
- oddziałach hydroterapii



REHABILITACJA
2005



AQUAMEDEN

Wanna umożliwia wykonywanie dwóch różnych zabiegów z zakresu hydroterapii:

- masażu podwodnego za pomocą bicia wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody
- hydromasażu za pomocą dysz wodnych

Wanna składa się z następujących części:

- korpus z pulpitem wykonany z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego laminatem poliestrowym, osadzony na 4 nóżkach o regulowanej wysokości z gumowymi nasadkami ochronnymi
- czterostronna obudowa

- 1 Zawór zimnej wody - napełnianie wanny
- 2 Zawór ciepłej wody - napełnianie wanny
- 3 Panel sterowania
- 4 Zawór dysz bocznych
- 5 Zawór bicia
- 6 Manometr - wskaźnik ciśnienia bicia wody
- 7 Pokrętko regulacji powietrza dysz bocznych
- 8 Korek wlewu płynu dezynfekującego
- 9 Zawór zimnej wody - prysznic
- 10 Zawór ciepłej wody - prysznic
- 11 Rączka prysznicowa do spłukiwania wanny
- 12 Wylewka
- 13 Przelew
- 14 Przyłącze węża bicia
- 15 Korek zrzutu wody
- 16 Reeling
- 17 Dysze boczne
- 18 Uchwyt węża bicia
- 19 Niecka wanny
- 20 Osłona krótka
- 21 Dysza bicia
- 22 Osłona długa
- 23 Wspornik nóg



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- bicz wodny do masażu podwodnego (standard)
- wymienne końcówki bicia wodnego (opcja)
- wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicia wodnego
- 8 dysz bocznych do hydromasażu i 3 dysze na plecy (opcja)
- 2 sposoby regulacji natężenia hydromasażu: za pomocą pokrętki napowietrzającego lub zaworu dysz bocznych
- wbudowana pompa wodna z tworzywa sztucznego o wydajności do 50 l/min. (3 m³/h)
- zabezpieczenie przed pracą pompy "na sucho"
- zasilanie wodą ciepłą i zimną z sieci wodociągowej
- instalacja wodna (z wyjątkiem złączy i zaworów) wykonana z rurki miedzianej oraz PCV
- dezynfekcja systemu wodnego wanny
- poręczce pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu
- dodatkowe 2 uchwyty dla pacjenta
- niecka ukształtowana w sposób ułatwiający zajęcie przez pacjenta pozycji w wannie

Opcje dodatkowe:

- **JETS 11:** 11 dysz do hydromasażu automatycznego (2 x 4 boczne + 3 na plecy)
- **CHROMO 2R:** chromoterapia: 2 reflektory
- **CHROMO 4R:** chromoterapia: 4 reflektory
- **CHROMO 12:** chromoterapia: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24:** chromoterapia: 24 pojedyncze źródła światła
- **CHROMO 36:** chromoterapia: 36 pojedynczych źródeł światła
- **AUDIO:** sterowanie zewnętrzne - możliwość podłączenia wieży, mp3, itp. Złącze MiniJack, łącze Bluetooth
- **AROMA:** zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku

DANE TECHNICZNE

Pojemność zabiegowa [l]:	min. 250
Pojemność do przelewu [l]:	550
Czas napełnienia / spustu [min]:	ok. 6,0 / 4,5
Pobór mocy [kW]:	max. 2,4
Ciśnienie bicia [bar]:	0 - 4,5
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:	2350 x 1000 x 960
Masa [kg]:	190
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B