

CompAIR Elite OMRON NE-C30-E

Kompaktowy i prosty w użyciu

- **niewielkie gabaryty**
- **łatwy w użyciu**
- **można go używać zawsze i wszędzie**
- **optymalna nebulizacja leku**
- **zasilanie akumulatorowe lub sieciowe**
- **3 lata gwarancji**

SZYBKIE I PRZYJEMNE INHALACJE

Inhalator CompAIR Elite OMRON NEC-30-E może być stosowany przy wszelkiego rodzaju inhalacjach, terapiach najpopularniejszymi lekami aerozolowymi oraz przy nebulizacji soli fizjologicznej.

Skuteczność inhalacji zależy również od tempa pracy i wydajności urządzenia przetwarzającego lek w opary, którymi oddycha pacjent. Dzięki Inhalatorowi CompAIR OMRONNEC-30-E nebulizacja będzie efektywna i zajmie znacznie mniej czasu niż w przypadku korzystania z podobnych modeli dostępnych na polskim rynku. Jednorazowo można podawać aż 7 ml leku, co oznacza, że pacjent może przyjąć w krótkim czasie całą przepisaną przez lekarza dawkę specyfiku.

Inhalator CompAIR OMRONNEC-30-E posiada akumulator oraz wygodną rączkę do przenoszenia, cały zestaw jest lekki i doskonale sprawuje się w podróży, na wakacjach i wszędzie tam gdzie jest potrzebny. Dodatkowym atutem jest 207 cm przewodu powietrznego, który pozwala na przyjęcie wygodnej pozycji w trakcie inhalacji, jak również stanowi ułatwienie w przeprowadzaniu terapii u dzieci.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Górne drogi oddechowe: przewlekły nieżyt nosa i gardła, przewlekłe, nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani, alergiczny nieżyt nosa, nawracające i przewlekłe stany zapalne zatok przynosowych, nieżyt krtani oraz stany wyczerpania głosowego...

Płuca i oskrzela: przewlekłe i nawracające zapalenia oskrzeli, astma oskrzelowa, stany po zapaleniach płuc...

Leki: Budesonid, Pulmicort, Flixotide, Berodual, Miflonide, sól fizjologiczna...

Pacjent: dziecko, dorosły, senior, osoba w podeszłym wieku

SERWIS I EKSPLOATACJA

Filtry wystarczają na około 60 dni lub do zmiany zabarwienia. Inhalator przeznaczony jest do pracy przerywanej w trybie 20 minut pracy na 40 minut odpoczynku. W zestawie znajdują się: maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik, nosownik, przewód powietrzny (207 cm), kompresor (włącznik/wyłącznik, wylot powietrza, pokrywa filtru, uchwyt na nebulizator, gniazdko zasilacz, złącze akumulatora), nebulizator(nasadka, pokrywka, głowica parownika, zbiornik na lek, dysza wylotu powietrza), filtry zapasowe (5 szt.), zasilacz, torba, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

UWAGA! Nebulizator składa się z przezroczystego pojemnika na lek i niebieskiego stożka przewodzącego (rozpylacza). Części nebulizatora NIE są sprzedawane osobno.

Dane techniczne:

- MMAD (tryb standardowy): 3 mikro m
- pojemność nebulizatora: 7 ml
- głośność pracy: ok. 53 db
- objętość wyjściowa aerozolu: 0,35 ml/min. (2ml, 1%NaF)
- objętość wyjściowa aerozolu w jednostce czasu: 0,05 ml/min (2ml, 1%NaF)
- zestaw zawiera: maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik, nosownik, przewód powietrzny (207 cm), kompresor (włącznik/wyłącznik, wylot powietrza, pokrywa filtru, uchwyt na nebulizator, gniazdko zasilacz, złącze akumulatora), nebulizator(nasadka, pokrywka, głowica parownika, zbiornik na lek, dysza wylotu powietrza), filtry zapasowe (5 szt.), zasilacz, torba, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, akumulator (opcjonalnie)
- temperatura/wilgotność robocza: 10-40 st. C/30%-85%
- temperatura/wilgotność przechowywania: -20-60 st. C/10%-95%
- waga kompresora: 440g
- wymiary: 124 x 52 x 103 mm
- 3 lata gwarancji