

INSTRU CARE – płyn, spray

Preparat na bazie oleju parafinowego do konserwacji i pielęgnacji narzędzi

Rodzaj produktu: wyrób medyczny klasa I CE 0481

- Najwyższej czystości olej do pielęgnacji i ochrony narzędzi
- Polecany w szczególności do instrumentów do zabiegów mikroinwazyjnych a także do narzędzi ortopedycznych, dentystycznych i laparoskopów
- Nawilża zawiasy, turbiny i inne elementy ruchome
- Nie wpływa negatywnie na proces sterylizacji

Instru Care jest najwyższej czystości olejem do pielęgnacji, utrzymania i ochrony takich narzędzi i instrumentarium medycznego jak: instrumenty do mikroinwazyjnych zabiegów, narzędzia chirurgiczne, ortopedyczne i dentystyczne oraz laparoskopy.

Instru Care służy do utrzymania funkcjonalności i sprawności oraz ochrony narzędzi.

Instru Care powoduje nawilżenie zawiasów, turbin i innych elementów ruchomych. Jest zupełnie nieszkodliwy i nie wpływa negatywnie na proces sterylizacji do 200°C. Chroni metale przed utlenianiem.

Zachować ostrożność w kontakcie z częściami z tworzyw sztucznych wrażliwych na olej.

Uwaga:

Pojemnik aerozolu jest pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i temperaturą ponad 50°C. Także po zużyciu: nie otwierać opakowania i nie spalać oraz nie wrzucać do ognia. Nie natryskiwać na ogień lub żarzące się urządzenia. Trzymać z dala od miejsc zapłonu. Nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. W obszarach, bez wystarczającej wentylacji może powodować wybuchową mieszaninę.



Najważniejsze cechy

Do stosowania po odpowiednim oczyszczeniu narzędzi i przed sterylizacją

Składniki:

Białe oleje medyczne o czystości zgodnej z wymaganiami DAB 1996, Farmakopeą Europejską II (PH-EUR. 2 Ed.), BP 1993, XXII USP, NF XVII, FDA Nr. 172-878 99,9% parafinum DAB/USP/BP

Dane fizykochemiczne

Konsystencja: ciecz lekko lepka
Zapach: bezwonny
Barwa: bezbarwna, klarowna
Gęstość (20°C): 0,841 – 0,852 g/ml
pH wartość: 10,9 – 12,5

Wielkości opakowań

nr kat. 90090 butelka 100 ml
(12 szt. w kart.)
nr kat. 90091 pojemnik 400 ml
(12 szt. w kart.)
nr kat. 90092 kanister 5 l
(2 szt. w kart.)

Okres trwałości

3 lata

Producent

Laboratorium Dr. DEPPE
D-47906 Kempen / Niemcy
www.dr-deppe.de

DYSTRYBUTOR

DEZYMED® Kastrau Sp. j.
ul. Armii Krajowej 7/4,
11-300 Biskupiec
tel. 89 7154532 fax 89 7152362
e-mail: biuro@dezymed.pl
internet: www.dezymed.pl