

## IsoArk

### Przenośna Komora Izolacyjna



### Zastosowania

Przenośna Komora Izolacyjna IsoArk została zaprojektowana, aby natychmiastowo wydzielić strefę zakaźną i skutecznie odizolować ją od atmosfery zewnętrznej. IsoArk to kompletny system umożliwiający adaptację dowolnego pomieszczenia w strefę izolowaną, zapewniając pełną separację zakażonych osób lub skażonych przedmiotów. System spełnia bądź przekracza dzisiejsze standardy izolacji patogenów przenoszonych drogą kropelkową, m. in. wytyczne Center for Disease Control z 2003 r. Innymi obszarami zastosowania komory IsoArk mogą być: screening poczty, izolacja miejsca pracy, tymczasowe laboratorium.

### Opis ogólny

Śluza powietrzna, dołączana do komory głównej, podtrzymuje podciśnienie wewnątrz komory także w trakcie wchodzenia i wychodzenia, a tym samym zachowuje podstawowe funkcje bezpieczeństwa i izolacji. System może być doposażony opcjonalnie w elementy umożliwiające wykonywanie czynności przy pacjentach przez personel znajdujący się na zewnątrz komory. Także same urządzenia diagnostyczne i monitorujące mogą znajdować się na zewnątrz komory, a kable i czujniki zostaną wpuszczone do wnętrza komory przez specjalne rękawy izolacyjne.

### Właściwości systemu:

- zaprojektowany we współpracy z Kaplan Medical Center
- wielokrotnie stosowany w warunkach rzeczywistego zagrożenia biologicznego
- szybkie wyjście z komory przez służę z silnym powietrznym strumieniem odkażającym
- prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi
- czujnik skażenia z autoaktywacją wentylacji
- wysoka skuteczność filtracyjna
- niski poziom hałasu filtrowentylacji
- wskaźnik stanu zużycia filtrów
- prosta wymiana filtrów bez użycia narzędzi



## Komora główna

Wykonana z lekkiego aluminiowego szkieletu z systemem szybkozłączy, który podtrzymuje przezroczystą powłokę izolacyjną, wykonaną ze specjalnego laminatu.

## Śluza powietrzna

Samonośna konstrukcja zawierająca polimerowe drzwi, które umożliwiają szybkie wejście / wyjście i wygodne wnoszenie sprzętu. System podwójnych drzwi utrzymuje podciśnienie po wejściu do śluzy. Kompaktowa konstrukcja znacząco redukuje czas potrzebny na całkowitą wymianę powietrza w śluzie. Takie rozwiązanie oszczędza czas personelu i w sposób ciągły zapewnia utrzymanie podciśnienia.



Opcjonalne kontenery transportowe zapewniają bezpieczeństwo składowania oraz ułatwiają transport z wykorzystaniem standardowych kontenerów logistycznych. 12-metrowy kontener pomieści 24 kompletne systemy IsoArk.

## System filtracyjny

**FA 2000 HSZ** to praktyczny i niezwykle efektywny system filtracji powietrza, zapewniający wymaganą zdolność izolacyjną w ciągu kilku minut. System posiada trzy tryby pracy, w tym strumień odkażający (air flushing) oraz cichy tryb pracy ciągłej. FA 2000 HSZ jest wyposażony w różnicowy wskaźnik ciśnienia, pokazujący stan filtrów HEPA. Zarówno filtry HEPA, jak i promiennik UV, mogą być wymienione szybko, bez użycia narzędzi.



Leczenie pacjenta wewnątrz komory

Zabezpieczenie odpadów medycznych

Dostęp do pacjenta za pomocą rękawców

Opcjonalne osłony na głowicę RTG



Beth-El Industries

## Wyposażenie opcjonalne


### Czujnik podciśnienia

Pokazuje poziom podciśnienia w komorze głównej. Spadek podciśnienia poniżej określonego progu bezpieczeństwa aktywuje alarm świetlny i dźwiękowy.

Po podłączeniu czujnika do komputera możliwe jest stałe monitorowanie zmian podciśnienia w komorze. Czujnik, umieszczony na zewnątrz słuzy powietrznej, połączony jest kanałem powietrznym z komorą główną.

### Szyny wielofunkcyjne

Stelaże z szynami umożliwiają mocowanie sprzętu i aparatury medycznej wewnątrz komory głównej. Kable zasilające i przewody mogą być doprowadzone do urządzeń poprzez rękawy izolacyjne z zewnątrz komory głównej.

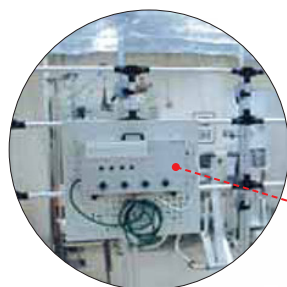

### Obowiązujące normy

- Kontrola jakości zgodnie z ISO 9001:2000
- Gwarancja jakości zgodnie z AQAP 2110
- Skuteczność filtrów HEPA zgodnie z EN 1822; IEST-PR-CC-001.3
- System filtracji certyfikowany zgodnie ze standardami medycznymi
- System filtracyjny FA 2000 HSZ certyfikowany zgodnie z IEC 60601-1, UL 60601-1, UL 507.


## Kontenery transportowe

Wszystkie elementy systemu IsoArk posiadają dedykowane aluminiowe skrzynie transportowe, które gwarantują bezpieczny transport i długotrwałe składowanie.





Beth-El Industries

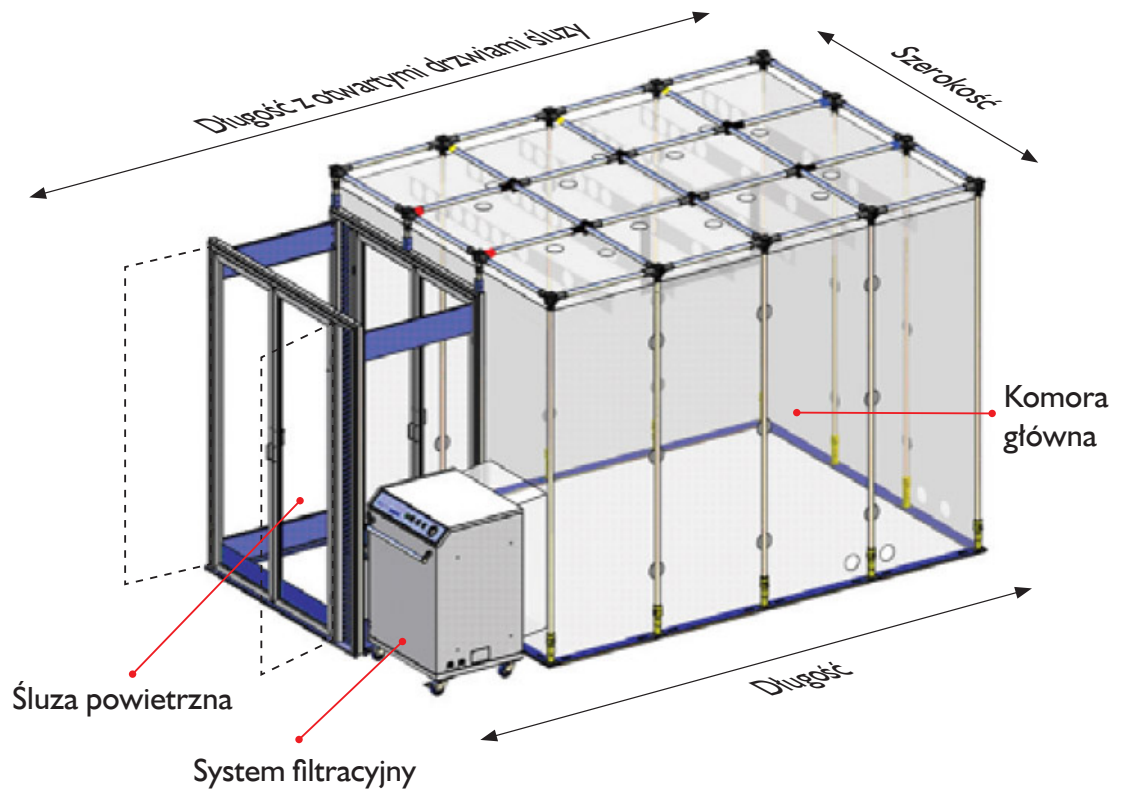

## Dane techniczne:

Komora główna					
Rozmiar komory	Szerokość m / cale	Długość m / cale	Wysokość m / cale	Waga kg / funty	Długość z otwartymi drzwiami śluzy m / cale
90 x 60*	2,35 (92,5)	1,60 (63,0)	2,35 (92,5)	33,5 (73)	3,20 (126)
60 x 90*	1,60 (63,0)	2,35 (92,5)	2,35 (92,5)	33,5 (73)	4,65 (183)
90 x 90	2,35 (92,5)	2,35 (92,5)	2,35 (92,5)	50 (111)	3,95 (155)
90 x 120	2,35 (92,5)	3,10 (122)	2,35 (92,5)	67 (148)	4,70 (185)
120 x 120	3,10 (122)	3,10 (122)	2,35 (92,5)	89 (196)	4,70 (185)
120 x 150*	3,10 (122)	3,85 (151,5)	2,35 (92,5)	111 (245)	5,45 (215)
* Inne wymiary dostępne na specjalne zamówienie					
Śluza powietrzna					
	Szerokość m / cale	Długość m / cale	Wysokość m / cale	Waga kg / funty	
	1,60 (63)	0,90 (35,5)	2,10 (83)	54 (119)	
System filtracyjny					
Typ urządzenia		FA 2000 HSZ	FA 2000 HSZA	FA 2000 HSZB	
Napięcie nominalne		230 VAC	115 VAC	100 VAC Power	
Zużycie energii		550 Watt	680 Watt	680 Watt	
Częstotliwość nominalna		50 Hz	60 Hz	50 / 60 Hz	
Przepływ powietrza (3-stopniowy)		1000 / 1400 / 2200 m <sup>3</sup> /h (591 / 823 / 1180 cfm)			
Poziom hałasu		52 / 56 / 65 dB			
Skuteczność filtracyjna dla wielkości cząstek 0,3 μ:					
Standard: H13	99,995%				
Opcjonalnie: U15	99,99995%				
Opcjonalnie: filtr dwustopniowy	Połączony filtr HEPA z filtrem węglowym				
	Szerokość m / cale	Długość m / cale	Wysokość m / cale	Waga kg / funty	
	0,703 (27,7)	0,744 (29,3)	1,076 (42,4)	86 (190)	
Kontenery transportowe (opcja)	Szerokość m / cale	Długość m / cale	Wysokość m / cale	Waga (pusty) kg / funty	
Duży kontener transportowy z wózkiem	0,735 (29)	2,31 (91)	1,135 (44,5)	145 (319)	
Mały kontener transportowy na system filtracyjny FA 2000 HSZ	0,735 (29)	0,77 (30,5)	1,15 (45,5)	65 (143)	

**Beth-El Zikhron Yaaqov Industries Ltd.**

1 Avshalom Road  
Zikhron Yaaqov, Israel  
Tel: + 972-4-629 0000  
www.beind.com



**ParaMedica**  
POLSKA

**Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.**

02-815 Warszawa, ul. Żołyń 11  
tel. 22 313 09 39, faks 22 313 09 59  
e-mail: handlowy@paramedica.pl  
www.paramedica.pl

ISOARC: 0614WER.01

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołyń 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.