

CareBag VOM

Torba na wymioty z super chłonną wkładką



Torba na wymioty CareBag® z super chłonną wkładką została stworzona specjalnie po to, aby zastąpić tradycyjne naczynia stosowane do tego celu i może być używana przez dzieci oraz dorosłych. Każda torba szybko wiąże wymioty, pochłaniając przy tym przykry zapach. Jej zamknięcie i zawiązanie po użyciu eliminuje konieczność sprzątnięcia, co często związane jest z użyciem naczyń jedno lub wielorazowych. Torby pakowane są w wygodne pudełka - dyspensery.

- Gotowa do użycia
- Zmniejsza ryzyko zakażeń szpitalnych i związane z tym koszty
- Eliminuje mycie i odkażanie naczyń
- Eliminuje przykry zapachy
- Wymaga mniejszej przestrzeni do przechowywania
- Oszczędza czas personelu
- Praktyczniejsza od tradycyjnych naczyń
- Obniża koszty i eliminuje nieprzyjemne obowiązki personelu
- Minimalizuje narażenie na kontakt z płynami ustrojowymi
- Ogranicza ilość odpadów
- Nie mniej niż 500 ml płynów fizjologicznych

Idealna do użycia:

- na oddziałach przed i pooperacyjnych
- podczas transportu
- w przychodniach i klinikach
- na oddziałach onkologicznych i radiologicznych
- na oddziałach ratunkowych
- na oddziałach geriatrycznych i pediatrycznych



Skład

Włóknina z pulpy i polimerów akrylowych.

Instrukcja użycia:

1. Suchymi rękoma otworzyć pudełko i wyjąć torebkę z wkładką GelMax.
2. Podać torbę pacjentowi.
3. Po użyciu odczekać kilka sekund aż zawartość torebki zmieni się na galaretowatą substancję.
4. Torebkę zawiązać za pomocą sznureczków, wyrzucić jako odpad komunalny.

Środki ostrożności

Produkt jednorazowy. NIE używać ponownie.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać mając mokre ręce.

Identyfikacja i data ważności

Każdą paczkę identyfikuje numer referencyjny/numer partii i data ważności (5 lat).

Bezpieczeństwo

Produkt nie zaliczany do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Zgodność

- Produkt Klasy I, zwolniony z obowiązku wpisu do Wykazu produktów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami FDA
- Zgodny z Dyrektywą 93/42/CEE dotyczącą wyrobów medycznych – Klasa I
- Podczas spalania produkt nie wydziela żadnych chlorków ani innych produktów ubocznych mogących wytwarzać dioksyny
- Kod celny: 5603149090
- Certyfikacja firmy: ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003



Producent:	Dystrybutor w Polsce:
Cleanis	ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o.
73 rue du Cherche Midi	Ul. Poleczki 29
75006 Paryż, Francja	02-822 Warszawa
Tel. +33(0)1 42 84 38 21	Tel. 22 855-30-79
Fax. +33(0)1 42 84 34 62	Fax. 22 855-34-97
www.cleanis.com	www.elmiko.pl