

Miski odporne na działanie detergentów

Kod produktu: Maxi-Miska 6 litrów- 117AA040, 40 sztuk; Miska 4 litry- 118AA100, 100 sztuk

Instrukcja Obsługi

Vernacare
cleaner safer healthcare




KNK sp. z o.o.

ul. Rakoniewicka 23 A
60-111 Poznań

tel./fax +48 61 898 27 03
info@knkpld.com
www.knkpld.com



1 Weź miskę ze stojaka.

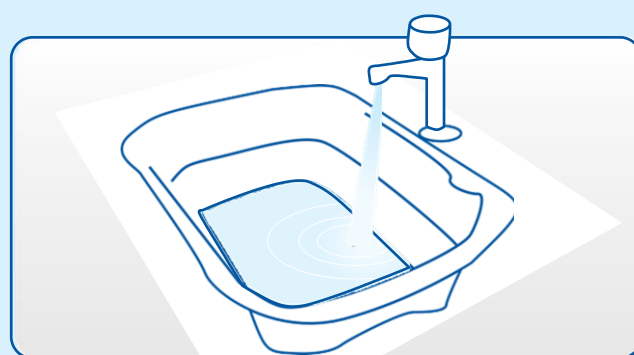

2 Napełnij ciepłą wodą (jeśli używasz oddzielnych kranów upewnij się, że zimna woda została dodana przed ciepłą wodą).
Maksymalna temperatura: 45°C.



3 Dodaj detergent, mydło, szampon lub odżywkę i dobrze wymieszaj.



4 Użyj wytłoczonych uchwytów przy przenoszeniu. Dostępne są również pokrywki zapobiegające rozlaniu.



5 Zutylizuj w maceratorze. Umieść pionowo na ostrzach, by zmacerować.

Miska 4 litry

Ilość: 100 sztuk

Kod produktu: 118AA100

Maxi-Miska

6 litrów

Ilość: 40 sztuk

Kod produktu: 117AA040

Idealne do:

Mycie na łóżku, mycie rąk, opatrunki, golenie, mycie niemowląt, opróżnianie worków moczowych, czyszczenie powierzchni i opieka ogólna.

Odporne na detergenty, w tym na mydło, szampon i odżywkę.