

BALNEUS- WKŁAD KĄPIELOWY

umożliwia dokładne mycie, kąpiel i pielęgnację ran obłożnie chorego bezpośrednio na łóżku pielęgniacyjno- medycznym wyposażonym w zagłówki, podnóżki i poręcze boczne. Prosty w użyciu wkład do zastosowania głównie w opiece domowej. Cechy produktu: łatwy do czyszczenia, dezynfekcji i przechowania. Jest lekki, przenośny, trwały i wodoszczelny. Materiał jest odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne.



Wytrzymuje pranie mechaniczne, gotowanie oraz suszenie w temp. 110° C.

Wymiary: dostosowane do leża łóżka 90 x 200 cm, umożliwia kąpiel w objętości do 50 litrów wody.

Opis wyrobu Balneus wykonany jest ze specjalnego materiału, którego właściwości zapewniają jego pewną stabilizację w łóżku oraz wykluczają niekontrolowaną dyslokację chorego w trakcie kąpieli. Wkład kąpielowy umożliwia dokładne mycie, kąpiel i pielęgnację ran obłożnie chorego bezpośrednio na łóżku pielęgniacyjno-medycznym (włącznie z chirurgicznym opracowaniem ran).

W wersji przedłużonej umożliwia kilkudziesięcio-minutowe przebywanie chorego w wodzie.

Materiał może mieć bezpośredni kontakt z ciałem. Ma zastosowania głównie w opiece domowej i ambulatoryjnej. Jest doskonałym narzędziem

w pracy objazdowej pracowników socjalnych i pielęgniarek rejonowych. Cechy produktu:

- łatwy do czyszczenia, dezynfekcji i przechowania,
- lekki, przenośny, trwały i wodoszczelny,
- odporny na działanie większości dostępnych środków dezynfekcyjnych.



Wymiary: dostosowane do leża łóżka 90 x 200 cm, umożliwia kąpiel w objętości do 50 litrów wody.

Membrana materiału wykonana jest z poliuretanu – tworzywa całkowicie bezpiecznego i obojętnego dla organizmu, bardzo odpornego na uszkodzenia, wyjątkowo wytrzymałego na rozciąganie i rozerwanie.

Materiał pozostaje bez zarzutu zarówno pod względem estetycznym jak i higienicznym. Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Jest odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 100°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne.

Średni czas intensywnego użytkowania wynosi 5-8 lat.

Wymagania dotyczące mocowania wkład może być stosowany wyłącznie w łóżku pielęgniacyjnym lub medycznym, posiadającym barierki boczne oraz szczyty (panel głowy i nóg).

Wkład może być stosowany w łóżku:

- z materacem piankowym,
- z materacem ciśnieniowym ułożonym na materacu gąbkowym.

Należy zapewnić maksymalną wartość ciśnienia i statyczny tryb pracy, lub spuścić całkowicie powietrze. Należy zapewnić odległość materaca od barierki bocznej nie mniejszą niż 20 cm.

Wkład kąpielowy można układać jego dowolną stroną.



tel. 800 10 10 01

BALNEUS- WKŁAD KĄPIELOWY

CZYSZCZENIE: dla wykonania oczyszczenia ran odleżynowych stosuj środki ochrony osobistej (rękawiczki ochronne, fartuch ochronny, maskę ochronną na nos i usta) wykorzystane powleczenia umieść w higienicznym miejscu (np. worek foliowy). Po wykonaniu oczyszczenia czynności zdezynfekuj ręce.

dezynfekcja wstępna: Często dezynfekcja i pranie tkaniny nie zmienia jej parametrów użytkowych.

Materiał jest odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne.

Powierzchnowe (optyczne) zabrudzenia natury biologicznej lub chemicznej (jedzenie, lekarstwo, wydzieliny) czyścimy przecierając materiał wilgotną ściereczką zawierającą środek czyszczący bądź dezynfekujący (np. na bazie alkoholu, czy w połączeniu z aldehydami, lub czwartorzędowymi związkami amoniowymi).

Do dezynfekcji powierzchni zalecamy preparaty równorzędne z: Fugaten Spray, Anios DDSH, Hospisept-Tuch, WIP'Anios, Aerodesin 2000, Spray WS, Anioxy Surfanios. Należy odczekać wymagany czas ekspozycji i w razie potrzeby przetrzeć ściereczką nasączoną wodą. Zalecamy przeprowadzenie prania w temp. 60°C z użyciem środka piorącego np. zwykłego proszku do prania.

dezynfekcja właściwa:

domowa: zalecamy przeprowadzenie prania w temp. 95°C z użyciem środka piorącego np. powszechnego proszku do prania. Wkład jest odporny na bezbarwne preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholi lub związków nadtlennowych.

szpitalna: w przypadkach silnego zabrudzenia materiału organiczną zalecamy pranie w temperaturze 60°C w cyklu dezynfekcji chemio-termicznej z użyciem profesjonalnego środka piorąco-dezynfekującego (np. Eltra, Silex, Ozonit, Monosan), albo przeprowadzenie wstępnej kąpieli dezynfekcyjnej (termicznej lub chemio-termicznej) lub zastosowanie metody VDV - metody próżni wstępnej (temperatura do 105°C).

Oslony można prać i gotować w urządzeniach do prania ciągłego wraz z innymi brudnymi tkaninami zebranymi w szpitalu stosując programy do 95°C (**zawsze w workach pralniczych**), dezynfekować, suszyć mechanicznie w bębnie i prasować do 110° C.

Uwaga! Przed przystąpieniem do prania mechanicznego wkładu należy go zabezpieczyć przed urazami, które mogą powstać w trakcie ocierania materiału o elementy wewnętrzne pralki.

Najprościej jest **prać wkład w workach lub pokrowcach pralniczych**. Nie należy stosować środków dezynfekcyjnych na bazie jodu i chloru. **Nie dezynfekować preparatami na bazie aldehydu !**

Materiał można prasować w temp. 110°C tylko przez ściereczkę bawełnianą. Nie maglować.

Należy unikać kontaktu z błękitem metylowym- może on trwale zabarwić osłonę.

Produkowane przez nas wkłady kąpielowe to jedyna taka oferta na polskim rynku

- ich produkcja podlega ochronie prawnej UP RP.

zawartość opakowania, dostawy

a/ wkład kąpielowy BALNEUS w opakowaniu tekturowym/foliowym,

b/ 12 zacisków (klamer) do mocowania z konstrukcją łóżka, dostarczonych wg wyboru zamawiającego w wymiarach 16 lub 19, 25, 32, 40 mm (ich średnicy wewnętrznej).

c/ instrukcja obsługi wkładu kąpielowego wraz z kartą gwarancyjną.



tel. 800 10 10 01