

# seca 635

Waga platformowa  
i bariatryczna 



- Duża platforma o wysokiej nośności.
- Elastyczny zdalny wyświetlacz przewodowy.
- Zintegrowana funkcja BMI.

**seca 635:**

## Komfortowe rozwiązanie, spełniające szczególnie wysokie wymagania.

**N**adwaga i następujące choroby są najszybciej rozwijającym się problemem zdrowotnym na świecie. W ramach diagnozy i terapii, niezbędna jest regularna kontrola ciężaru ciała, gdyż nawet najmniejsza redukcja wagi może zmniejszyć ryzyko zachorowań. Aby spełnić szczególne wymogi podczas ważenia otyłych pacjentów, seca zaprojektowała tę specjalną wagę platformową i bariatryczną. Waga seca 635 spełnia najwyższe oczekiwania lekarzy, personelu pielęgniarskiego oraz pacjentów. Oczywiście można na niej bez problemu ważyć pacjentów o normalnej wadze. Dzięki specjalnej funkcji amortyzacji, ciężar ciała niespokojnych pacjentów zostanie również bezbłędnie wyświetlony.




## Wysoka nośność i duża platforma.

Zasilana bateryjnie waga elektroniczna seca 635 została zaprojektowana z myślą o otyłych pacjentach. Dzięki zakresowi ważenia do 300 kg i platformie o wymiarach 56 x 56 cm, stanowi ona solidną podstawę dla pacjentów z nadwagą. Niewielka wysokość 5,5 cm i antypoślizgowa wykładzina platformy, umożliwiają komfortowe wejście na wagę bez znacznego ryzyka. Możliwe jest również łatwe ustawienie krzesła na wadze. Dzięki funkcji pre-TARA waga krzesła lub balkoniku jest odejmowana od wagi całkowitej i nie zakłóca precyzyjnego obliczenia wagi.

## Zdalny wyświetlacz przewodowy umożliwia łatwe rozpoznanie najmniejszych zmian.

Element wyświetlacza seca 635 połączony jest z wagą za pomocą kabla o długości 2,30 m, który umożliwia umieszczenie wyświetlacza w dowolnym miejscu – na wysokości oczu na ścianie, wygodnie na stole lub na opcjonalnym statywie seca 472. Wyniki na wyświetlaczu LCD są łatwe do odczytu. Podziałka 100-gramowa umożliwia rozpoznanie najmniejszych zmian wagi, a dzięki funkcji HOLD również po zejściu z wagi.

*Platforma wagi jest łatwa do wejścia a jej powierzchnia antypoślizgowa.*

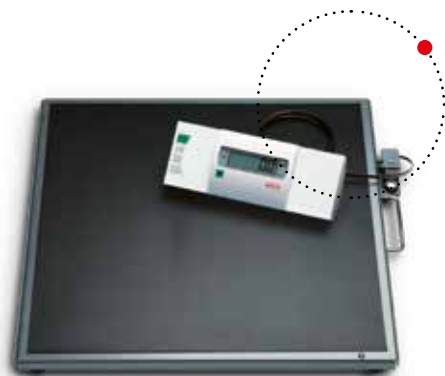

*BMI jest obliczany po podaniu wzrostu pacjenta.*

## Kolejne zachwycające funkcje.

Funkcja wskaźnika masy ciała (BMI), którą posiada seca 635, umożliwia łatwą ocenę stanu odżywienia oraz podjęcia stosownych środków zaradczych. Dzięki zintegrowanemu automatycznemu wyłączaniu, waga zapobiega zbędnemu zużyciu energii.

**seca 635**

## Dane techniczne

- Nośność: 300 kg
- Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
- Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.): 640 x 55 x 600 mm
- Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 560 x 55 x 560 mm
- Ciężar własny: 14,4 kg
- Zasilanie: Bateryjne, zasilacz opcjonalnie
- Długość kabla: 2,30 m
- Funkcje: TARA, pre-TARA, HOLD, BMI, przełączanie zakresu ważenia, regulowana amortyzacja, automatyczne wyłączanie
- Opcjonalnie: Statyw na zdalny wyświetlacz przewodowy seca 472, interfejs RS232 seca 460, zasilacz seca 447
- Klasa dokładności:  $\text{III}$