

ULTRASTOP – PREPARAT PRZECIWKO PAROWANIU OPTYK



Preparat zawiera substancję powierzchniowo czynną w roztworze alkoholu – środek łatwopalny!

Rodzina produktów ULTRASTOP obejmuje preparaty zarówno sterylne jako i niesterylne. Niesterylne oferujemy w postaci buteleczek z zakraplaczem (25ml) i buteleczek z atomizerem typu spray (15ml).

Sterylnie w postaci ampułek z gumowym korkiem do wielokrotnego pobierania sterylna igłą (30ml), lub w postaci pakietu 30 pojedynczych sterylnych ampułek „Monodose” (po 5ml).



Preparaty Niesterylne - do lusterek laryngologicznych, stomatologicznych, laryngopharyngoskopów, mikroskopów zabiegowych, endoskopii itp.



ZAKRAPLACZ - Butelka 25ml z zakraplaczem

Opakowanie handlowe: 3szt.

Nr Kat: YO-ULTRASTOP-25 -ZAK / 3 butelki

SPRAY, butelka 15ml.

Nr Kat: YO-ULTRASTOP-15 - SPRAY
1op/ 3 butelki





Preparaty sterylne „pro med” – do optyk laparoskopowych, torakoskopowych, sinusoskopowych, do endoskopii, itp.



**fiolka 30ml. - opakowanie ekonomiczne,
Opakowanie handlowe: 2 fiolki**

Sterylny roztwór, 30ml, fiolka z gumowym korkiem umożliwiającą bezpieczne, wielorazowe pobranie płynu sterylną igłą.

Nr Kat: YO-ULTRASTOP-FIOL-30-STERYL / 2 fiolki –



Pojedyncza, sterylna ampułka 5ml.

- opakowanie handlowe 30 ampułek
Zawartość jednorazowej, sterylnej ampułki wykrapla się na sterylny gazik do przetarcia optyki lub bezpośrednio na optykę.

Nr Kat.: YO-ULTRASTOP- AMP-5- STERYL/ 1op./30ampułek

* Preparat na bazie alkoholu. Na czystą, suchą soczewkę nanieść cienką warstwę preparatu i poczekać kilka sekund aż alkohol odparuje, pozostawiając cienką warstwę substancji przeciwmgielnej na powierzchni soczewki.

Termin dostawy: 3 – 14 dni.

Uwaga, przy zamówieniach poniżej 1.000zł doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 28zł.