

# Tabela dozowania **CHLOR-CLEAN**



	POWIERZCHNIE NIEZANIECZYSZCZONE ORGANICZNIE	POWIERZCHNIE ZANIECZYSZCZONE ORGANICZNIE			
SPEKTRUM	bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory ( <i>B.subtilis</i> , <i>C.difficile</i> , <i>C.difficile</i> 027, <i>C.perfringens</i> )	bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory ( <i>C.difficile</i> )	bakterie, drożdże, wirusy ( <i>Adeno</i> , <i>Noro</i> )	<i>C.difficile</i>	<i>C.difficile</i> , <i>C. sporogenes</i>
STĘŻENIE	1 000 ppm aktywnego chloru	10 000 ppm aktywnego chloru	1 000 ppm aktywnego chloru	2 000 ppm aktywnego chloru	1 000 ppm aktywnego chloru
CZAS	15 min.	15 min.	5 min.	15 min.	60 min.
1 tab.	1 l wody	100 ml wody	1 l wody	500 ml wody	1 l wody
2 tab.	2 l wody	200 ml wody	2 l wody	1 l wody	2 l wody
5 tab.	5 l wody	500 ml wody	5 l wody	2,5 l wody	5 l wody
10 tab.	10 l wody	1 l wody	10 l wody	5 l wody	10 l wody

