


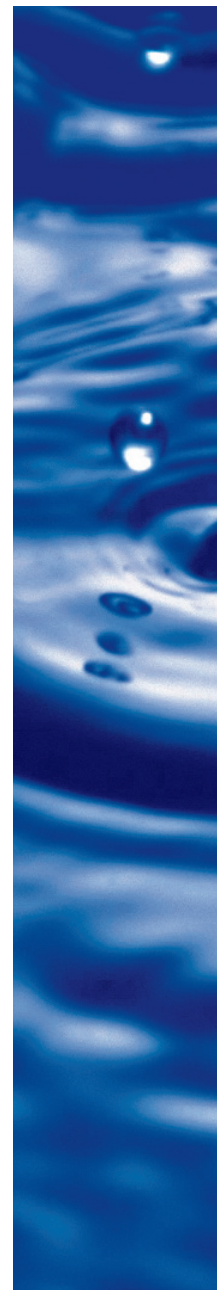

FUGATEN SPRAY

Preparat na bazie etanolu do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu.



- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- przyjemny delikatny zapach
- błyskawicznie schnie
- nie pozostawia żadnych śladów
- ponad 20 lat na rynku

Preparat gotowy do użycia



Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0482



FUGATEN SPRAY

Preparat na bazie etanolu do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu.

PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie etanolu, który jest najbezpieczniejszym alkoholem dla użytkownika
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
- wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym czasie kontaktu
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie jak i przy użyciu ściereczki
- preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
- sprawdzony preparat z 20 letnią historią na polskim rynku

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 70 g etanol (skażony)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus)
- 10 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus, Poliowirus)
- 15 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus, Poliowirus, Papowavirus)

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
- Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.
- Nanosić na dezynfekowane powierzchnie i przedmioty bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej z odległości 30 cm lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab).



1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą chusteczki.
2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 1 minutę.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

OPAKOWANIA

- Fugaten Spray: butelka - 1 litr ze spryskiwaczem
- Fugaten Spray: kanister - 5 litrów
- Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Lysoform GmbH, Niemcy

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • tel./fax: 85 747 93 00/01 • www.medilab.pl

