



# LY<sup>®</sup>-LASTIC

Profesjonalne powleczenie stanowiące barierę mikrobiologiczną oraz chroniące materace i poduszki przed wilgocią i różnego rodzaju zabrudzeniami.



- stanowi barierę mikrobiologiczną
- przepuszcza powietrze i zmniejsza ryzyko odleżyn
- wytrzymałe – możliwość prania i suszenia w urządzeniach automatycznych
- szczególnie zalecane alergikom



Wyrób medyczny kl. I, CE

# LY<sup>®</sup>-LASTIC

Profesjonalne powleczenie stanowiące barierę mikrobiologiczną oraz chroniące materace i poduszki przed wilgocią i różnego rodzaju zabrudzeniami.

## PODSTAWOWE CECHY

- stanowi doskonałą barierę dla mikroorganizmów chorobotwórczych – nie przepuszcza wirusów, bakterii, jak również płynów i pary wodnej
- tkanina pokryta specjalną warstwą czystego poliuretanu – trwale elastyczny i przepuszczający powietrze materiał, dzięki czemu jest szczególnie zalecana alergikom (nie przepuszcza kurzu i pyłków)
- osłona skutecznie chroni poduszki i materace przed zabrudzeniami i zniszczeniem – jest odporna na mocz, kał, krew i innego rodzaju plamy
- zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn – w odróżnieniu od innych stosowanych materiałów obniża ciepło retencyjne
- właściwości materiału pozostają niezmienione także przy częstym praniu (do 95°C) i suszeniu (do 120°C) w urządzeniach automatycznych – wykazuje odporność na rozciąganie i rozerwanie, oraz wysoką temperaturę nawet po 300 cyklach pralniczych
- łatwe do założenia i proste w utrzymaniu – materiał w pełni zmywalny, dzięki czemu można go bezpiecznie dezynfekować

## DANE TECHNICZNE

**Skład:** materiał wykonany z poliestru z powłoką poliuretanową

**Waga/gramatura:** ok. 200 g/m<sup>2</sup>

**Badania potwierdzające:** nieprzepuszczalność płynów, drobnoustrojów, pary wodnej, kurzu, pyłków, oraz potwierdzenie tolerancji skórnej (brak działania uczulającego).

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Ostonę Ly-Lastic należy naciągnąć na materac lub poduszkę. W przypadku osłon całkowitych należy zapiąć zamek błyskawiczny lub rzepy. W celu zapewnienia optymalnego czasu przydatności do użytkowania należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:

- w przypadku zanieczyszczenia powleczenia krwią, ropą, kałem, moczem lub innymi wydzielinami należy jak najszybciej przeprowadzić dezynfekcję materiału [zgodnie z obowiązującymi procedurami]
- do dezynfekcji osłony zalecane są preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu, np. Fugaten Spray, Aerodesin 2000, Aniospray Quick, Anioxy-Spray WS, Mediwipes Pus, jak również preparaty dezynfekcyjne do tzw. delikatnych powierzchni, np. Lysoformin Plus-Schuam, Surfa' Safe Premium, Wip'Anios Excel, Mediwipes DM.

**UWAGA:** Nie stosować preparatów dezynfekcyjnych na bazie chloru i jodu.

## PRZYGOTOWANIE DO CZYSZCZENIA I PRANIA

- Przy zdejmowaniu powleczenia z materaca, czy poduszki zawsze należy stosować wszelkie środki ochrony osobistej (rękawice, fartuch ochronny, maskę na usta i nos). Zdjęte powleczenia należy umieścić w odpowiednim miejscu (najlepiej w worku na brudne tkaniny – według obowiązujących w danej placówce procedur), a po wykonaniu tych czynności zdezynfekować ręce.
- Powleczenie Ly-lastic może być prane wraz z innymi brudnymi tkaninami w pralce automatycznej (max. temperatura 95°C.), jak również może być suszone w automatycznych urządzeniach do suszenia (max. temperatura 120°C). Powyższe metody higieny w żaden sposób nie uszkadzają bariery mikrobiologicznej materiału, ani właściwości zapewniających komfort pacjentowi.

**UWAGA:** Przed włożeniem powleczenia Ly-lastic do maszyny piorącej należy zapiąć zamek błyskawiczny, ponieważ istnieje możliwość napełnienia powleczenia wodą i utworzenia „worka z wodą”, który może uszkodzić bęben pralki. Spowodowane jest to wodoodpornością materiału.

Powleczenie	Dane techniczne	Widok materaca/ poduszki od spodu
<b>80110 Powleczenie standardowe</b> Standardowa ochrona materacy: zakrywa wierzch i boki; na narożnik naszyto 4 naciągi gumowe	Wymiary/cm: 195x12 Wielkość materaca: 200x90x12 Masa ok. 500 g	
<b>80111 Powleczenia standardowe „plus”</b> Ochrona materacy z dwustronnymi kieszeniami; z dwoma naciąganyymi gumami i rzepami	Wymiary/cm: 195x12 Wielkość materaca: 200x90x12 Masa ok. 630 g	
<b>80112 Powleczenie całkowite</b> Ochrona materac całkowicie; posiada zamek błyskawiczny o dł. 240 cm	Wymiary/cm: 195x12 Wielkość materaca: 200x90x12 Masa ok. 945 g	
<b>80114 Powleczenie całkowite na poduszki</b> Ochrona całkowicie poduszkę	Wielkość poduszki/cm: 80x80	
<b>Materiał na rolce</b>	Długość 100 m; Szerokość 150 cm	

## PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: LYSOFORM GmbH, Niemcy

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • tel.: 85 747 93 00 • fax: 85 747 93 01 • [www.medilab.pl](http://www.medilab.pl)

