



# ANIOSYME SYNERGY MT

PREPARAT DO MYCIA NARZĘDZI, ENDOSKOPÓW  
I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH.

## PROCEDURA MANUALNA I W MYJCE ULTRADŹWIĘKOWEJ

### INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I STOSOWANIA ROZTWORU ROBOCZEGO



1


Przygotowanie 0,5% roztworu roboczego Aniosyme Synergy MT:

- Napełnić wanienkę lub myjkę ultradźwiękową zimną lub ciepłą wodą (maksymalna temperatura 60°C).
- Na każdy litr wody wlać 5 ml koncentratu.
  - butelka 1 litrowa - użyć dozownik przelewowy z podziałką
  - kanister 5 litrowy - użyć pompkę (jedno naciśnięcie pompki to 25 ml koncentratu na 5 litrów wody)
- Zmieszać roztwór.



2

Wyroby medyczne całkowicie zanurzyć w roztworze roboczym (wyczyścić wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie endoskopu, przez kanały kilkakrotnie przetłoczyć roztwór myjący). Wanienkę dezynfekcyjną przykryć. Odczekać minimum 1 minutę (w zależności od stopnia zabrudzenia).

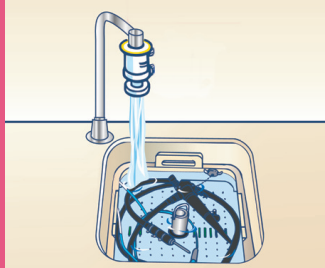

3

Po upływie wymaganego czasu umyte wyroby medyczne wyjąć. W razie konieczności doczyścić. Dokładnie wypłukać wodą odpowiedniej jakości.



4

Osuszyć jednorazowym ręcznikiem i przekazać do dalszych procedur higienicznych zgodnych z zastosowaniem wyrobu medycznego.