

## Chusteczki w specjalnie zaprojektowanym systemie dozującym do stosowania na sucho i mokro



Medilab System Dry&Wet Wipes to wysokiej jakości bardzo miękkie i delikatne chusteczki przeznaczone do użycia zarówno na sucho, jak i na mokro. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i chłonnością. Dzięki temu są wyjątkowo przydatne do wycierania i mycia różnego rodzaju powierzchni i wyposażenia: stołów, blatów, zlewów, glazury itd. Perforacja pozwala na szybkie i łatwe oderwanie pojedynczej chusteczki.

### PROFESJONALNY SYSTEM DO UTRZYMANIA HIGIENY POWIERZCHNI

- ▶ do wszystkich zmywalnych powierzchni
- ▶ możliwość nasączenia środkami do dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB
- ▶ miękkie i wytrzymałe



#### OBSZAR ZASTOSOWANIA

SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES stanowi doskonałe rozwiązanie do codziennego czyszczenia, polerowania i osuszania powierzchni. Po nasączeniu chusteczek odpowiednim preparatem dezynfekcyjnym z oferty Medilab, służą również do mycia i dezynfekcji powierzchni. Jest to idealny System do wielokrotnego wykonywania procedur higienicznych w ciągu dnia.

#### CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

W skład SYSTEMU jednorazowych chusteczek firmy MEDILAB wchodzi: zwój chusteczek, uniwersalny pojemnik, pokrywa wyposażona w dozownik, oraz etykieta bezpieczeństwa.

#### WŁAŚCIWOŚCI CHUSTECZEK

- wykonane z wysokiej jakości włókniny: niskopylowe, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie
- o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>
- dostępne w dwóch zwojach o różnych wymiarach:
  - 150 szt. chusteczek, 16 x 39 cm
  - 256 szt. chusteczek, 18 x 39 cm
- konfekcjonowane w specjalnych polipropylenowych pojemnikach wielokrotnego użytku, wyposażonych w system dozujący, o pojemności dostosowanej do wielkości zwoju - 4 l i 5 l



#### DLACZEGO SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES?

System stanowi innowacyjne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji powierzchni. Został specjalnie zaprojektowany do higienicznego i łatwego dozowania chusteczek. Chusteczki aplikowane są z pojemnika dozującego poprzez przeciągnięcie ich przez system dozujący, który po każdym użyciu jest szczelnie zamykany. System chusteczek jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które zapewnia ochronę nasączonych chusteczek przed skażeniem i wysychaniem. Chusteczki Medilab System dry&wet Wipes nasączone produktami z oferty Medilab, posiadają gwarancję stabilności właściwości dezynfekcyjnych przez okres 28 dni, przy prawidłowo zamykanej pokrywie pojemnika.

Pojemnik wraz z systemem dozującym jest pojemnikiem wielokrotnego użytku i może być również myty w urządzeniach myjących w temp. do 70°C.

Ważnym elementem jest etykieta bezpieczeństwa, która pozwala uniknąć pomyłek i ułatwia pracę z Systemem. Opisana etykieta zawiera podstawowe informacje dotyczące preparatu, którym nasączone są chusteczki i umieszczana jest w widocznym miejscu bezpośrednio na pojemniku.

SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES to jednocześnie ekonomika i gwarancja wysokich standardów higieny. Wysokiej jakości włóknina i uniwersalny dozownik zmniejszają nie tylko ilość zużytych na co dzień chusteczek, ale także preparatów dezynfekcyjnych.


#### INSTRUKCJA UŻYCIA

W przypadku stosowania chusteczek jako suche czyszczo:

1. Włóż rękawice i zdejmij pokrywę.
2. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka zwoju.
3. Wstaw zwój z chusteczkami do pojemnika.
4. Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez dozownik i zamknij pokrywę.

W przypadku stosowania chusteczek nawilżonych zachowaj 3 pierwsze ww. etapy, a następnie:

5. Przygotuj, zgodnie z zaleceniami producenta środka, odpowiednią ilość preparatu dezynfekcyjnego, w zależności od użytego środka. Powoli napełnij pojemnik środkiem dezynfekcyjnym, wlewając go od środka zwoju do zewnątrz.
6. Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez dozownik i zamknij pokrywę. Pozostaw pojemnik na min. 30 minut, aby wszystkie chusteczki zostały równo nawilżone.
7. Opisz i naklej etykiety bezpieczeństwa w odpowiednim miejscu na pojemniku. Nasączony zwój (produktami z oferty MEDILAB) może być używany przez okres 28 dni.

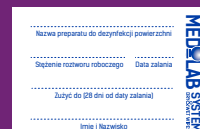

Etykieta bezpieczeństwa



W celu uzyskania skutecznej dezynfekcji powierzchni, chusteczki należy nasączać profesjonalnymi środkami do mycia i dezynfekcji powierzchni. SYSTEM MEDILAB DRY&WET WIPES jest kompatybilny z produktami do dezynfekcji powierzchni z oferty MEDILAB - szczególnie polecamy preparaty gotowe do użycia tj. Lysoformin Plus-Schaum, Fugaten Spray, Aerodesin 2000, Aniospray Quick.

#### Sugerowana ilość środka do zalania to minimum:

- 1,4 l preparatu → pojemnik o poj. 4 l
- 1,8 l preparatu → pojemnik o poj. 5 l

**UWAGA!** Przed nasączeniem chusteczek danym preparatem, należy zapoznać się z informacjami zawartymi na jego etykiecie, oraz zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących zastosowania ww. środków zawartych w instrukcji użycia.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

| MEDILAB SYSTEM DRY&WET WIPES             | Nazwa opakowania | Liczba opakowań jedn. w opakowaniu zbiorczym        |
|--|------------------|---|
| SYSTEM HIGIENY „MAXI”<br>(256 szt. & 5l) | SET SH MAXI 4+4  | Zwoje MAXI - 4 szt.<br>+<br>Pojemniki MAXI - 4 szt. |
|  | SH MAXI ZWÓJ x 4 | Zwoje MAXI - 4 szt.                                 |
| SYSTEM HIGIENY „OPTI”<br>(150 szt. & 4l) | SET SH OPTI 3+3  | Zwoje OPTI - 3 szt.<br>+<br>Pojemniki OPTI - 3 szt. |
|  | SH OPTI ZWÓJ x 6 | Zwoje OPTI - 6 szt.                                 |

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką i etykietą produktu.

#### PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

Medilab Sp. z o.o.  
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok  
tel. (85) 747 93 53, fax: (85) 747 93 28  
e-mail: handlowy@medilab.pl, www.medilab.pl