


Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-kroczaczy-krzeselkowy-ksp-yack-n961-130kg-udzwigu-p-81.html>



## Schodolaz kroczący krzeselkowy KSP YACK N961 (130kg udźwigu)

Cena brutto	<b>15 890,00 zł</b>
Cena netto	<b>14 712,96 zł</b>
Cena poprzednia	<b>17 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KSPYACKN961</b>
Kod producenta	<b>KSPYACKN961</b>
Zastosowanie schody	<b>proste, kręte, zabiegowe</b>
Minimalna wielkość spocznika	<b>gł.70 x szer.70cm</b>
Max wysokość schoda	<b>21cm</b>
Zasięg	<b>25-30 pięter</b>
Udźwig	<b>130kg</b>
Waga urządzenia	<b>suma 42kg</b>
Prezentacja	
Finansowanie	

### Opis produktu

**Schodolaz kroczący krzeselkowy dla osób niepełnosprawnych KSP YACK N961 (130 kg udźwigu)**

**SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SCHODOŁAZ OSOBOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH)**

Pośród tak wielu dostępnych na rynku schodolazów, na uwagę zasługuje także schodolaz krzeselkowy KSP YACK N961, ponieważ wyróżnia się na tle innych. Jest to urządzenie, które nie wymaga montażu do wózka inwalidzkiego, jako że w istocie samo nim jest. Stanowi więc przenośny wózek inwalidzki do automatycznego przemieszczania się po schodach i jest tym samym doskonałą pomocą dla osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się.

---

Dla kogo schodolaz kroczący krzeselkowy?

Schodolaz z krzeselkiem KSP YACK może być z powodzeniem wykorzystywany w domach prywatnych, gdzie służy na przykład wyłącznie do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo po schodach. Jest idealny dla seniorów, którzy po płaskiej powierzchni poruszają się za pomocą balkonika lub o własnych siłach, jednak przebycie stopni staje się dla nich zbyt dużą trudnością. Często wykorzystywany jest także w miejscach publicznych, gdzie służy jako jednorazowa pomoc. Zastępuje więc windę, której zamontowanie byłoby wysokim kosztem i dodatkowo pochłaniałoby sporą ilość miejsca.

Jak działa schodolaz krzeselkowy KSP YACK N961?

Model ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Należy do nowoczesnych, dlatego został rozbudowany o nowe funkcjonalności. Posiada automatyczny system hamujący na krawędzi schodów, stąd jest w pełni bezpieczny. Charakteryzuje się też całkowitą bezawaryjnością, a zasada jego działania, mimo tak szeroko rozbudowanej elektroniki, nie jest skomplikowana. Regulowany uchwyt pozwala na swobodne manewrowanie schodolazem.

Komfort i wygoda

Osoby niepełnosprawne cenią sobie komfort i wygodę użytkowania schodolazu kroczącego krzeselkowego. Posiada regulowane i całkowicie składane podłokietniki oraz podnóżki, stąd łatwiej jest zająć odpowiednią pozycję na fotelu. Wydajna bateria pozwala na niezawodne działanie przez kilka dni, w zależności od częstotliwości użytkowania schodolazu. Schodolaz z krzeselkiem KSP YACK łatwo się rozkłada i nie zajmuje dużej przestrzeni, dlatego może być przechowywany w domowych schowkach lub miejscach do tego przeznaczonych.

**ZASTAWOWANIA SCHODOLAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH** ([sprawdź więcej](#))



Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Wybierz gwarancję:** standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł ) , 4 lata gwarancji (+ 4 000,00 zł )

Filmy jak działa schodołaz

**POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE**

### **Schodołazy krzeselkowe kroczące**



**TOLLO 120 ELECTRIC**

## Schodółazy gašsienicowe



VIMEC T09 ROBY

## Schodółazy gašsienicowe z rampami



**JOLLY 150 MINI RAMPY**