

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-kroczacy-z-podpieciem-do-wozka-ksp-yack-n962-130kg-udzwigu-p-82.html>



## Schodolaz kroczący z podpięciem do wózka KSP YACK N962 (130kg udźwigu)

Cena brutto	<b>15 490,00 zł</b>
Cena netto	<b>14 342,59 zł</b>
Cena poprzednia	<b>17 490,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KSPYACKN962</b>
Kod producenta	<b>KSPYACKN962</b>
Minimalna wielkość spocznika	<b>gł.80 x szer.80cm</b>
Max wysokość schoda	<b>21cm</b>
Zastosowanie schody	<b>proste, kręte, zabiegowe</b>
Zasięg	<b>25-30 pięter</b>
Udźwig	<b>130kg</b>
Waga urządzenia	<b>suma 38kg: (22kg podstawa; 16kg rękojeść)</b>
Prezentacja	
Finansowanie	

### Opis produktu

#### Schodolaz kroczący z podpięciem do wózka KSP YACK N962 (130 kg udźwigu)

**SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SCHODOŁAZ OSOBOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH)**

Schodolaz kroczący to urządzenie, które może być z powodzeniem wykorzystywane podczas transportu osób niepełnosprawnych po schodach krętych czy prostych. Istnieje jednak pewna alternatywa do tego rodzaju urządzenia, a mianowicie schodolaz KSP YACK N962. Jego zaletą jest przede wszystkim większa mobilność i sposób użytkowania. Schodolaz z podpięciem do wózka będzie miał bowiem zastosowanie tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędnie potrzebne.

---

### Czym jest schodółaz krocący z najazdami?

Schodółaz z podpięciem do wózka, jak sama nazwa wskazuje, to urządzenie, które umożliwia zewnętrzne zamocowanie wózka inwalidzkiego w razie, gdy niezbędne będzie jego przetransportowanie po schodach. Oznacza to, że nie trzeba dysponować typowym schodółazem krocącym i dodatkowo wózkiem inwalidzkim. Można wyposażyć się tylko w schodółaz KSP YACK N962 i jak do tej pory użytkować własny wózek inwalidzki.

### Jak działa schodółaz KSP YACK N962?

Sposób działania schodółazu z najazdami jest niemal identyczny ze standardowymi schodółazami krocącymi. Sam transport osoby niepełnosprawnej odbywa się podobnie, a więc podczas dojazdu do schodów, schodółaz dzięki wysuwanej stopie schodek po schodku przesuwa wózek w górę lub w dół. Różnica polega jednak na tym, że prywatny wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej na wstępie zostaje doczepiony do schodółazu w sposób pewny i bezpieczny, dzięki wbudowanym płozom.

### Zalety schodółazu KSP YACK N962

Schodółaz z podpięciem do wózka posiada zewnętrzną baterię, dzięki czemu urządzenie ładowane jest zarówno, gdy stoi samodzielnie, jak i podczas zamontowania do wózka inwalidzkiego. Jest przy tym niezawodny w swym działaniu. W pełni elektryczne sterowanie pozwala na bieżąco zmieniać parametry pracy, jak choćby prędkość, czy tryb z ciągłego na przerywany. Schodółaz można łatwo złożyć i rozłożyć, a co ważne, jest niezwykle łatwy w transporcie, ponieważ nie zajmuje wiele miejsca. Ponadto to urządzenie uniwersalne kompatybilne z większością dostępnych na rynku wózków inwalidzkich.

## ZASTOWOWANIE SCHODOŁAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH ([sprawdź więcej](#))

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz gwarancję:** standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł ), 4 lata gwarancji (+ 4 000,00 zł )

**Wózek inwalidzki:** brak , Jazz S50 Vermeiren (+ 790,00 zł )

## Filmy jak działa schodółaz

## POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE

### Schodółazy krzeselkowe krocące



**TOLLO 120 ELECTRIC**

**Schodofazy gąsienicowe**



**VIMEC T09 ROBY**

## **Schodolazy gąsienicowe z rampami**



**JOLLY 150 MINI RAMPY**