



Szybki test immunochromatograficzny na obecność przeciwciał koronawirusa SARS-CoV-2 AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM - test kasetowy


Immunochromatograficzny jakościowy test AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG i IgM Koronawirusa SARS-CoV-2 w pełnej krwi, surowicy i osoczu.

Test wykonuje się przez podanie pobranej próbki (pełnej krwi, surowicy lub osocza) na pole aplikacyjne kasety testowej za pomocą dołączonego do testu jednorazowego aplikatora. Wynik testu jest prezentowany w postaci kolorowych linii w polu obserwacyjnym kasety.

Testy są indywidualnie pakowane w szczelnie zamkniętych kopertach razem z jednorazową pipetą/aplikatorem.

Procedura testu:

1. Pobrać próbkę.
2. Umieścić próbkę w polu aplikacyjnym kasety testowej za pomocą dołączonego aplikatora.
3. Dodać 2 krople załączonego buforu.
4. Odczytać wynik po czasie 10-15 minut.

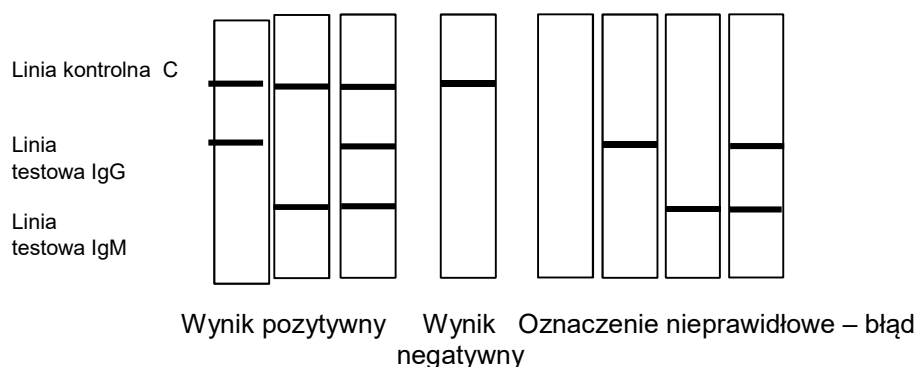

Dostępne opakowania handlowe:

Nr katalogowy	Nazwa handlowa	Wielkość opakowania
RT2941	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM	10 testów
RT2942	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM	25 testów
RT2945	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM	50 testów

W przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 niezbędne jest – dla dobra pacjentów, personelu medycznego i bezpieczeństwa publicznego – jak najszybsze zweryfikowanie pozytywnego wyniku testu.

Dopuszczenie do obrotu w UE: oznakowanie CE i Deklaracja Zgodności EC.

Przeznaczenie: tylko do diagnostyki in-vitro.

Dane techniczne testu:

Rodzaj próbki: Pełna krew, surowica, osocze

Wielkość próbki: 5 µL surowicy lub osocza

10 µL pełnej krwi

*Czas odczytu
wyniku:* 10 do 15 minut

Specyfikacja::

IgM Czułość *: 95.7 %

Swoistość *: 97.3 %

Zgodność ogólna *: 96.8 %

IgG Czułość *: 91.8 %

Swoistość *: 96.4 %

Zgodność ogólna *: 95.0 %

Skład zestawu:

- Kasetka testowa, indywidualnie pakowana w szczelnej kopercie, razem z jednorazowym aplikatorem

- Bufor

*Dane uzyskane na podstawie badań porównawczych do metody RT-PCR.

Dystrybucja w Polsce:

AMP Polska sp. z o.o.

Aleja Pokoju 78

31-564 Kraków

Tel.: 122940278, faks: 124229998, e-mail: office.krakow@amp-med.com

Wytwórca: AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 Graz, Austria * Phone +43 316 69 80 69 * Fax +43 316 69 80 69 12 * e-mail: office.graz@amp-med.com