

**KOLEKCJA
MATERIAŁÓW
MEDYCZNYCH**



LAZUROWY 5118



SŁONECZNY 1123



SMOLNY 9011



POMARAŃCZ 1017



TOMATO 3022



ZIELEŃ 6021



BŁĘKITNY 5154

Przepis konserwacji materiału

Środki dozwolone !!!			
Codienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki	na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu)
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	delikatnie przecierać nasączonym tamponem z gazy	
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji	dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka	-

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.








BIAŁY 9001



SELEDYN 6156

Informacja

	Szamponować przy użyciu gąbki
	Nie prać!!! (delikatne wyroby)
	Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
	Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
	Nie czyścić chemicznie!!!

Nie stosować !!!

Wosków	Użycie wymienionych środków może spowodować usztywnienie i pęknięcie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu
Sprayów	
Silnych detergentów	
Środków zawierających rozpuszczalniki	
Środków do czyszczenia skóry naturalnej	
Producent nie poleca stosowania środków do czyszczenia skór ekologicznych (sztucznej skóry)	

Istnieje możliwość zamówienia wybranego koloru spoza palety - wycena indywidualna

**MATERIAŁY
MEDYCZNE**
- AKTUALNIE
DOSTĘPNE
SPOZA KOLEKCJI



BEŻ 1044



FUKSJA 3036



WIOSENNY 6257



FIOŁKOWY 5161



BLADY POMARAŃCZ
1089



SKÓRA SŁONIA
7000








LOSOŚ 1004

Przepis konserwacji materiału

Środki dozwolone !!!			
Codienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki	na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu)
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	delikatnie przecierać nasączonym tamponem z gazy	
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji	dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka	-

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

Informacja	
	Szamponować przy użyciu gąbki
	Nie prać!!! (delikatne wyroby)
	Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
	Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
	Nie czyścić chemicznie!!!

Nie stosować !!!	
Wosków	Użycie wymienionych środków może spowodować usztywnienie i pękanie materiału, a także zmianę koloru i połysku powierzchni wyrobu
Sprayów	
Silnych detergentów	
Środków zawierających rozpuszczalniki	
Środków do czyszczenia skóry naturalnej	
Producent nie poleca stosowania środków do czyszczenia skór ekologicznych (sztucznej skóry)	

Istnieje możliwość
zamówienia wybranego
koloru spoza palety
- wycena indywidualna

Aktualnie dostępne
- kolekcja dodatkowa



SKADEN

TURKUS 6001

**CAPPUCCINO
8412**

WIŚNIOWY 3096

Istnieje możliwość zamówienia wybranego koloru spoza palety
- wycena indywidualna