

szafa endoskopowa

Szafa do przechowywania endoskopów EndoStore® została opracowana w odpowiedzi na oczekiwania najbardziej wymagających Użytkowników. Jej nowoczesna konstrukcja spełnia wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania giętkich aparatów endoskopowych. W zależności od wybranego wariantu, umożliwia przechowywanie wydezynfekowanych endoskopów w kontrolowanych warunkach mikrobiologicznych przez okres 3 dni (ENDOSTORE 3) lub 7 dni (ENDOSTORE 7) bez konieczności ponownego mycia i dezynfekcji.



Konstrukcja

Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304.


Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych.

Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym obiegiem powietrza i osuszaniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala.

Identyfikacja każdego z Użytkowników zabezpieczona indywidualnym kodem PIN lub RFID Użytkownika. Identyfikacja endoskopów np. za pomocą numerów seryjnych.


Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, przyjaznym Użytkownikowi interfejsem.

Filtry HEPA (po 2 w każdej komorze) o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów.

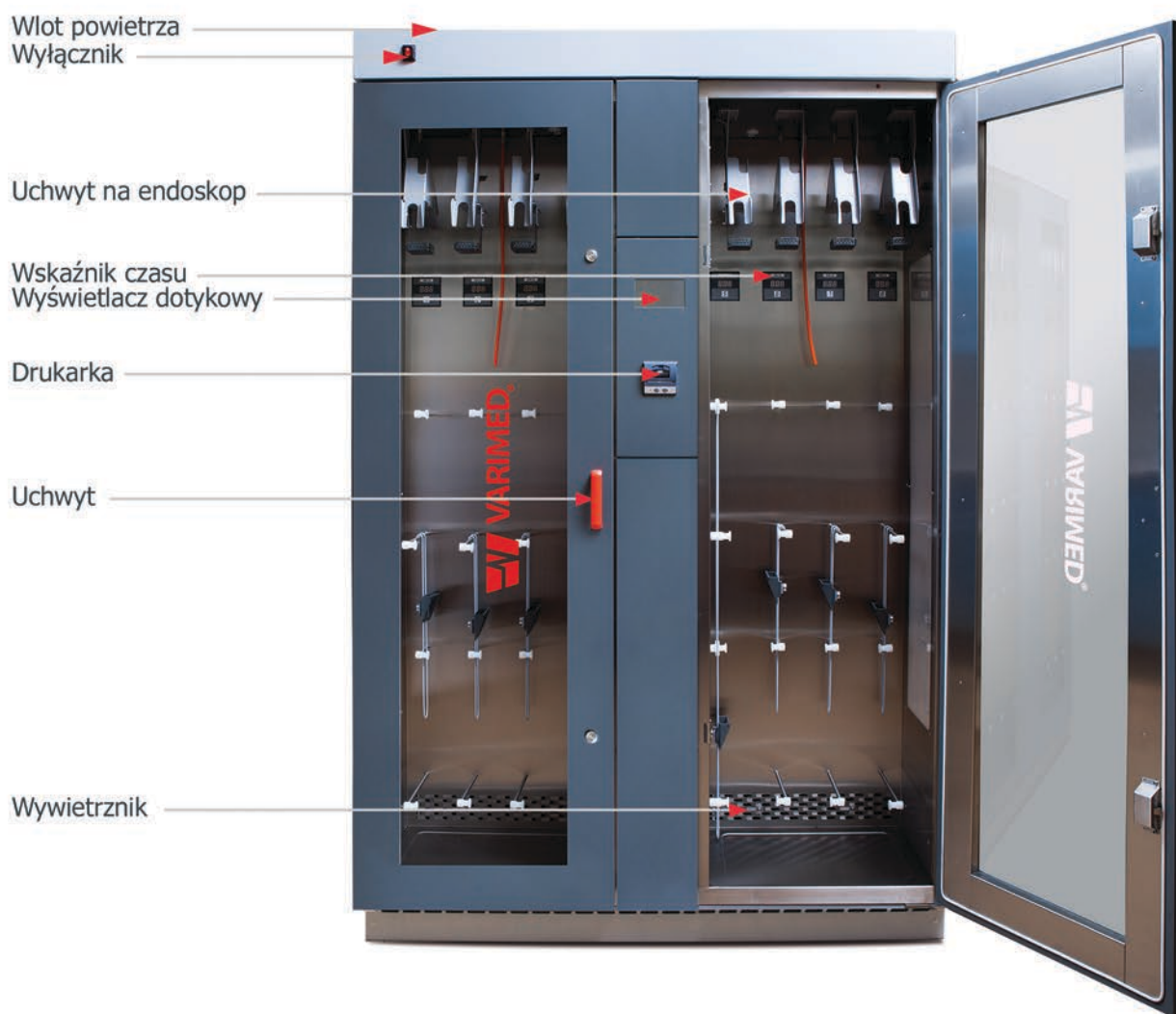


Parametry techniczne

Masa	214 kg
Szerokość (wym. zewnętrzne)	1400 mm
Głębokość (wym. zewnętrzne)	535 mm
Wysokość (wym. zewnętrzne)	2200 mm
Max. prąd	1,7 A
Max. moc	400 W
Zasilanie elektryczne	230 V / 50Hz
Wejście / przyłączenie sieci	przyłączy do gniazd zasilających typu E/F (unischuko)
Ilość endoskopów	8 endoskopów (2 komory po 4 endoskopy)
Wymiary wewnętrzne komory suszenia	530 x 405 x 1860 mm

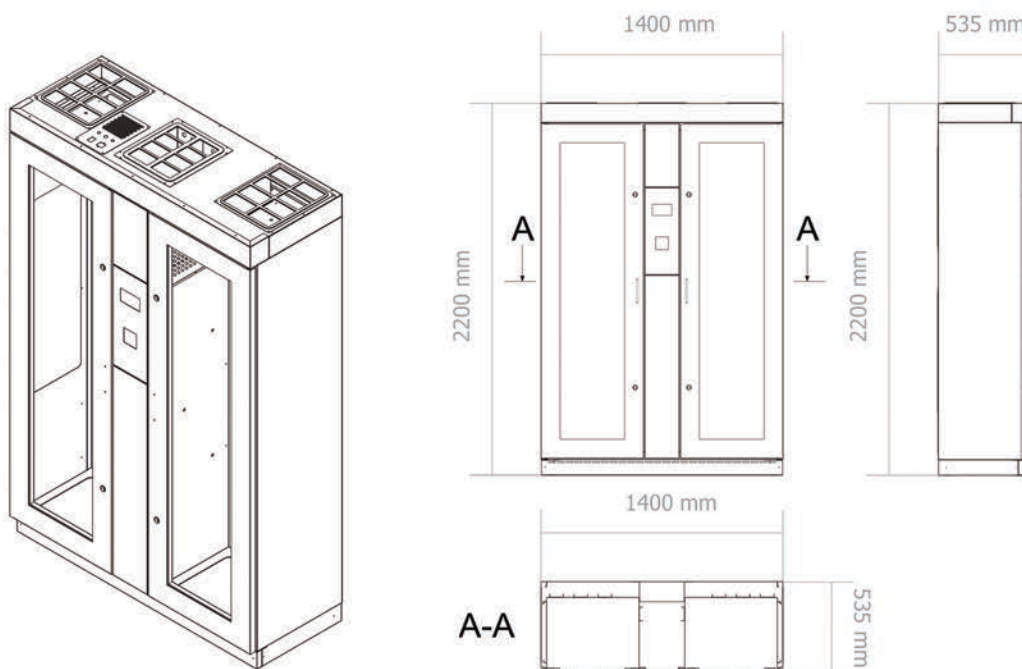


- Możliwość przechowywania endoskopów przez okres 3 lub 7 dni bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przed użyciem
- Polski produkt
- Deklaracja CE
- Produkt zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych
- Alarm uruchamiany przy otwartych drzwiach
- Multifunkcyjność - możliwość przechowywania endoskopów różnych producentów
- Energooszczędność - oświetlenie panelowe typu LED
- Automatyczny system wietrzenia komór roboczych
- System automatycznego włączania i wyłączania sprężarek powietrza

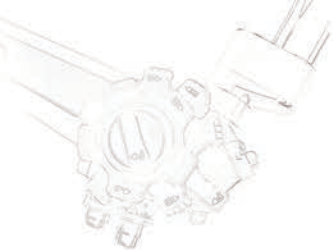

Rejestracja zdarzeń

- Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów oraz o monitorowanych parametrach środowiskowych np. czas włożenia i wyjęcia każdego endoskopu
- Identyfikacja i rejestracja Użytkownika w procesie przechowywania endoskopów poprzez system kodów PIN lub RFID Użytkownika
- Weryfikacja uprawnień Użytkownika do korzystania z zasobów przechowywanych w szafie
- Identyfikacja i rejestracja endoskopów oraz „haków” (zawiesi do endoskopów) w procesie przechowywania endoskopów
- Rejestracja zdarzeń alarmowych np. przekroczenie dopuszczalnego czasu przechowywania endoskopów

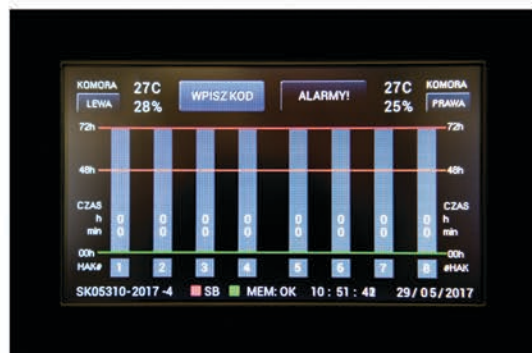

Rejestracja podstawowych parametrów

- Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności oraz temperatury powietrza, niezależnie w każdej komorze roboczej szafy
- Bieżący pomiar ciśnienia w drenach doprowadzających powietrze do kanałów endoskopu
- Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze
- Bieżący czas przechowywania każdego endoskopu
- Możliwość archiwizowania raportów w endoskopowym systemie rejestracji badań np. ENDOBOX



Varimed Sp. z o. o.:
 Wrocław 50-442
 ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
 tel. +48 71 361 14 18
 fax: +48 71 361 86 11
varimed.pl

Dział Sprzedaży:
 Leszno 64-100
 ul. K. Karasia 16
 tel. +48 65 529 36 89
 fax: +48 65 520 99 78
varimed@varimed.pl

Serwis:
 Leszno 64-100
 ul. Usługowa 20
 tel. +48 65 529 72 35
 fax: +48 65 529 36 97
serwis@varimed.pl