


BIOCREDIT COVID-19 IgG+IgM DUO

Test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV2 Test

- » Pierwsze komercyjne wdrożenie technologii Cząsteczki Czarnego Złota na świecie (wysoka czułość i swoistość)
- » Przyjazny dla użytkownika dwukolorowy system (Linia kontrolna: Czerwona, Linia testowa: Czarna)
- » Szybki czas testu (5~10 minut)
- » Proste wykrywanie przeciwciał IgG i IgM SARS-CoV2

Podstawowa technologia cząsteczki czarnego złota

Wystarczy 10 minut!

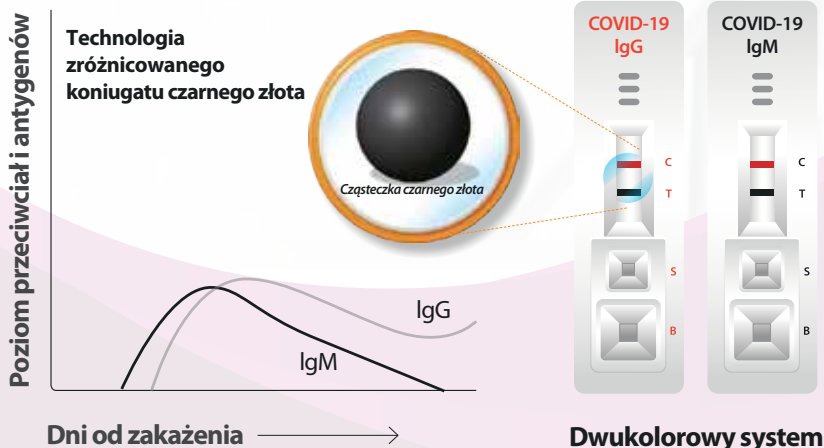

BIOCREDIT COVID-19 IgG+IgM Duo szybki test diagnostyczny

Przeznaczenie	Wykrywanie przeciwciał SARS-CoV2
Opakowanie	25 testów w zestawie
Przechowywanie	1~40°C
Typ próbek	Surowica, osocze, krew
Okres ważności	12 miesięcy od daty produkcji
Oczekiwanie na wynik	5-10 minut


Szybki test diagnostyczny **COVID-19**

PROCEDURA

Za pomocą kapilary lub mikropipety dodać 10µl (surowica lub osocze) lub 20µl (próbka krwi pełnej) próbki do okienka testowego przyrządu.


Dodać 3 krople rozcieńczalnika do okienka buforowego (B) przyrządu.

Odczytać wyniki w ciągu 5 do 10 minut.

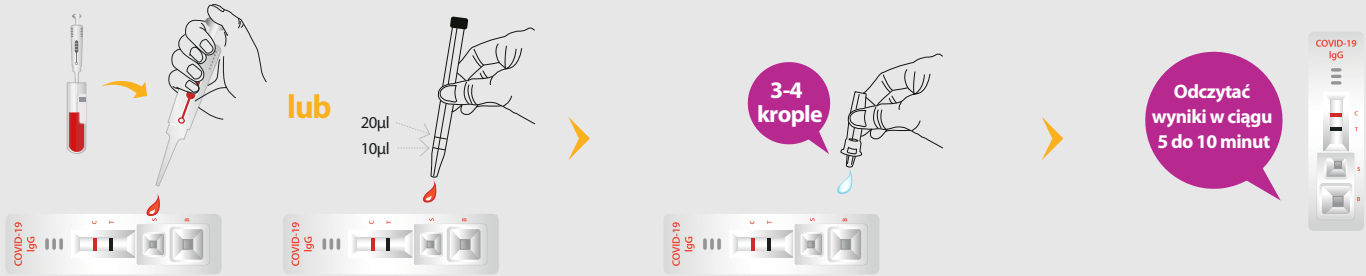


INTERPRETACJA WYNIKÓW

UJEMNY

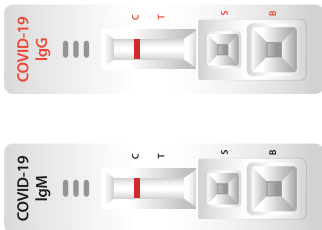

Jeden **czerwony** pasek "C" w okienku wyników.

DODATNI

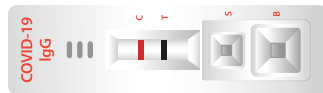


Dodatni IgG COVID-19: Jeden pasek na linii kontrolnej „C” a drugi pasek na linii testowej (T).



Dodatni IgM COVID-19: Jeden pasek na linii kontrolnej „C” a drugi pasek na linii testowej (T).

NIEWAŻNY

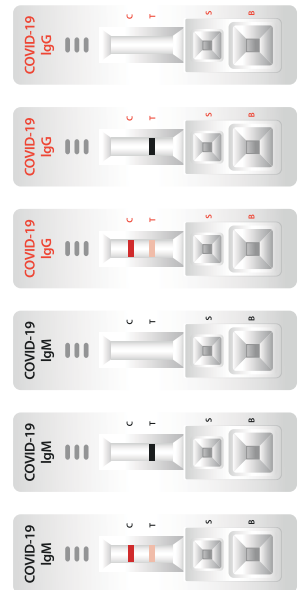

Brak paska „C” w okienku wyników lub na linii testowej (T) pojawia się ledwo widoczny **czerwony pasek**. Zaleca się ponowne przetestowanie próbki.

[Kontakt]

P.I. H. VARIA Sp. z o.o. ul. Biecka 10, 60-473 Poznań
Zakład Produkcji Medycznej: ul. Witkowa 3, 62-090 Rokietnica k/Poznania
tel: 61 814 52 03, @ marketing@varia-poznan.pl www.varia-poznan.pl

