


Instrukcja przygotowania i stosowania preparatu

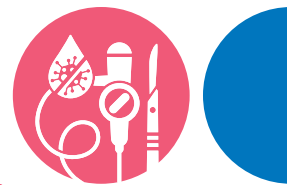


Enzymex L9



Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych.

Produkt do użytku profesjonalnego.
Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.

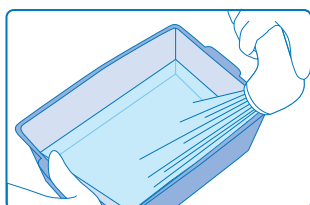


1

Napełnij wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową wodą.




2

Na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu (5 ml koncentratu na litr wody). Zamieszaj roztwór.

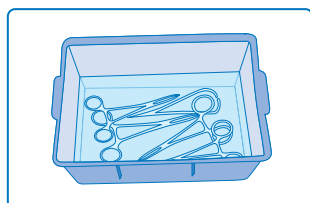


3

Dokładnie zanurz narzędzia. Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu.

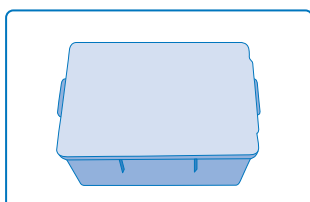


4

Wanienkę dezynfekcyjną przykryj. Odczekaj zalecany czas kontaktu: 10 minut. Doczyść, jeśli to konieczne.

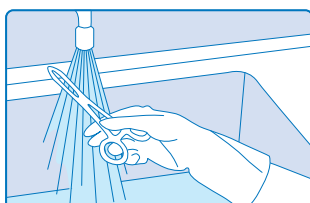

5

Wyjmij i wypłucz dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą.

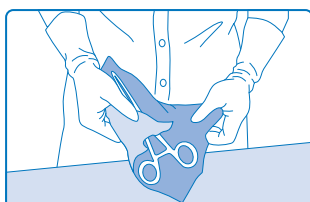

6

Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjętą procedurą.