



**DR. WEIGERT**

Higiena systemowa

## Tabela dozowania **neodisher® Septo Active**



### Stężenia roztworu roboczego

1,0%

2,0%

Wymagana ilość granulatu (skala kubka dozującego neodisher®)

Ilość  
roztworu

3l

37,5 ml

75 ml

5l

62,5 ml

125 ml

10l

125 ml

250 ml

30l

375 ml

750 ml

- Przygotuj odpowiednią ilość ciepłej wody.
- Dodaj granulaty, wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia.
- Roztwór roboczy jest gotowy do użycia po 15 min.

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A · 01-531 Warszawa

Telefon: +4822 616 02 23  
Faks: +4822 617 81 21

e-mail: [office\\_pl@drweigert.com](mailto:office_pl@drweigert.com)  
internet: [www.drweigert.pl](http://www.drweigert.pl)





**DR. WEIGERT**

Higiena systemowa

## Tabela dozowania **neodisher® Septo Active**



### Stężenia roztworu roboczego

1,0%

2,0%

### Wymagana ilość granulatu

- Przygotuj odpowiednią ilość ciepłej wody.
- Dodaj granulat, wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia.
- Roztwór roboczy jest gotowy do użycia po 15 min.

Ilość roztworu

5l

10l

20l

30l

100 g = 1 saszetka

200 g = 2 saszetki

300 g = 3 saszetki

100 g = 1 saszetka

200 g = 2 saszetki

400 g = 4 saszetki

600 g = 6 saszetek

