



PHAGOCIDE D

**SPOROBYJCZY PREPARAT DO DEZYNFEKCJI
TERMOLABILNYCH ENDOSKOPÓW
I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH**

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU

**Produkt do użytku profesjonalnego. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
Używany preparat zachowuje aktywność biobójczą do 45 dni.**

1

Wyroby medyczne należy dokładnie umyć, opłukać i osuszyć.
Zalecane produkty myjące lub myjąco-dezynfekujące:
PHAGO'ZYME LIQUID, Aniosyme Synergy MT, Aniosyme Synergy 5,
Aniosyme DD1, Aniosyme XL3, Aniosyme X3, Aniosept Activ.

2

Napełnić wanienkę dezynfekcyjną preparatem PHAGOCIDE D. Zanurzyć
uprzednio umyte wyroby medyczne. Wanienkę dezynfekcyjną przykryć
i zostawić na 10 minut w celu uzyskania działania bakteriobójczego,
prątkobójczego, grzybobójczego i wirusobójczego lub na 15 minut
w celu uzyskania działania sporobójczego.

3

Po upływie czasu ekspozycji dezynfekowane wyroby medyczne wyjąć.
Dokładnie wypłukać czystą mikrobiologicznie lub sterylną wodą.

4

Osuszyć i przekazać do szybkiego użycia lub postępować zgodnie
z innymi przyjętymi procedurami.

**Aktywność preparatu należy kontrolować za pomocą testów paskowych
QUANTOFIX GLUTARALDEHYD przeznaczonych do kontroli
stężenia aldehydu glutarowego.**

MEDILAB