


Instrukcja przygotowania i stosowania preparatu

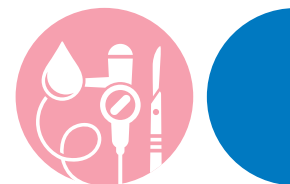


Phago'clean Endo



Preparat do manualnego mycia endoskopów, wyposażenia laboratoryjnego, narzędzi i innych wyrobów medycznych.

**Produkt do użytku profesjonalnego.
Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.**

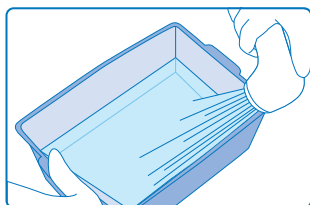


1

Napełnij wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową zimną lub ciepłą wodą.




2

W zależności od stopnia zanieczyszczenia mytych wyrobów medycznych na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu. Zakres zalecanych stężeń 0,2% do 0,5% (od 2 ml do 5 ml na litr wody). Zamieszaj roztwór.

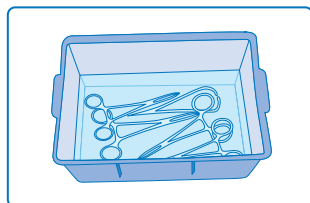


3

Dokładnie zanurz narzędzia. Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu.

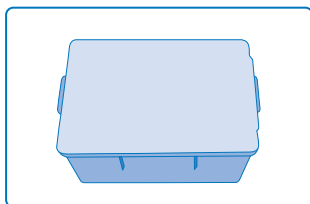


4

Wanienkę dezynfekcyjną przykryj. Odczekaj zalecany czas kontaktu: minimum 1 minutę. Doczyść, jeśli to konieczne.

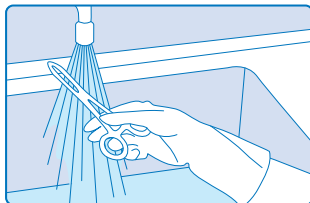

5

Wyjmij i wypłucz dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą.

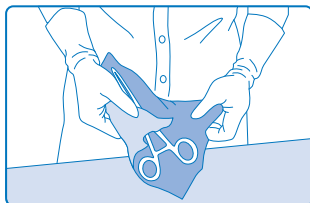

6

Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjętą procedurą.