



NOWOŚĆ

Phago'Clean Endo



Preparat do manualnego mycia endoskopów, wyposażenia laboratoryjnego, narzędzi i innych wyrobów medycznych.


- szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- bardzo wydajne stężenie robocze od 0,2%
- roztwór jest bakterio- i grzybobójczy
- doskonale się wypłukuje
- wysoka kompatybilność materiałowa

**Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. I**

NOWOŚĆ

Phago'Clean Endo

Preparat do manualnego mycia endoskopów, wyposażenia laboratoryjnego, narzędzi i innych wyrobów medycznych.

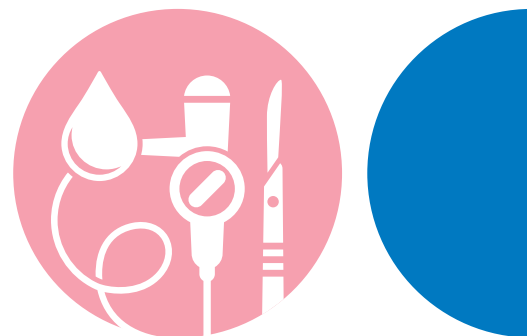

PODSTAWOWE CECHY

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- działa szybko – już po 1 min. wykazuje doskonałe efekty mycia
- bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,2% do 0,5%
- roztwór ma właściwości bakterio- i grzybobójcze
- szeroka tolerancja materiałowa potwierdzona badaniami
- narzędzia mogą być bezpiecznie pozostawione w roztworze nawet do 72h
- doskonale się wypłukuje i może być używany do mycia wąskich kanałów endoskopu
- niskopieniący środek myjący - możliwość zastosowania w proces manualnym i ultradźwiękowym
- zachowuje swoje właściwości niezależnie od temperatury użytej wody

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.

PROCEDURA MANUALNA I W MYJCE ULTRADŹWIEKOWEJ

1. Napełnij wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową zimną lub ciepłą wodą.
2. W zależności od stopnia zanieczyszczenia mytych wyrobów medycznych na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu. Zakres zalecanych stężeń 0,2% do 0,5% (od 2 ml do 5 ml na litr wody). Zamieszaj roztwór.
3. Dokładnie zanurz narzędzia. Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu.
4. Wanienkę dezynfekcyjną przykryj. Odczekaj zalecany czas kontaktu: minimum 1 minutę. Doczyść, jeśli to konieczne.
5. Wyjmij i wypłucz dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą.
6. Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym zgodnym z przyjętą procedurą.

SKŁAD CHEMICZNY

niejonowe związki powierzchniowo czynne

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA


Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakteriostatyczne, grzybobójcze

OPAKOWANIA

Phago'clean Endo: butelka z dozownikiem przelewowym – 1 L
Phago'clean Endo: kanister – 5 L

Wyposażenie dodatkowe:

- pompka do kanistra

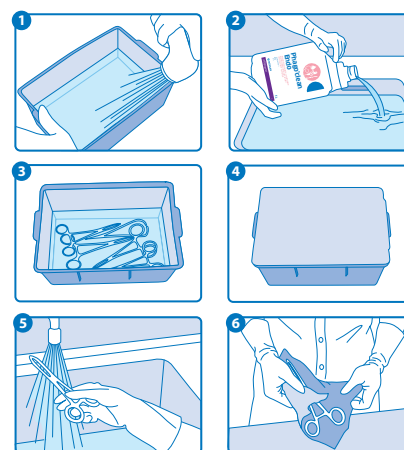

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2003-01

WYTWÓRCA:

Christeyns France • Laboratoire Phagogene
31 rue de la Mamadrie
44 120 Verton • Francja
christeyns.com • phagogene.fr