


Genru:

Zestaw testowy na antygen SARS-CoV-2 (Złoto koloidalne)

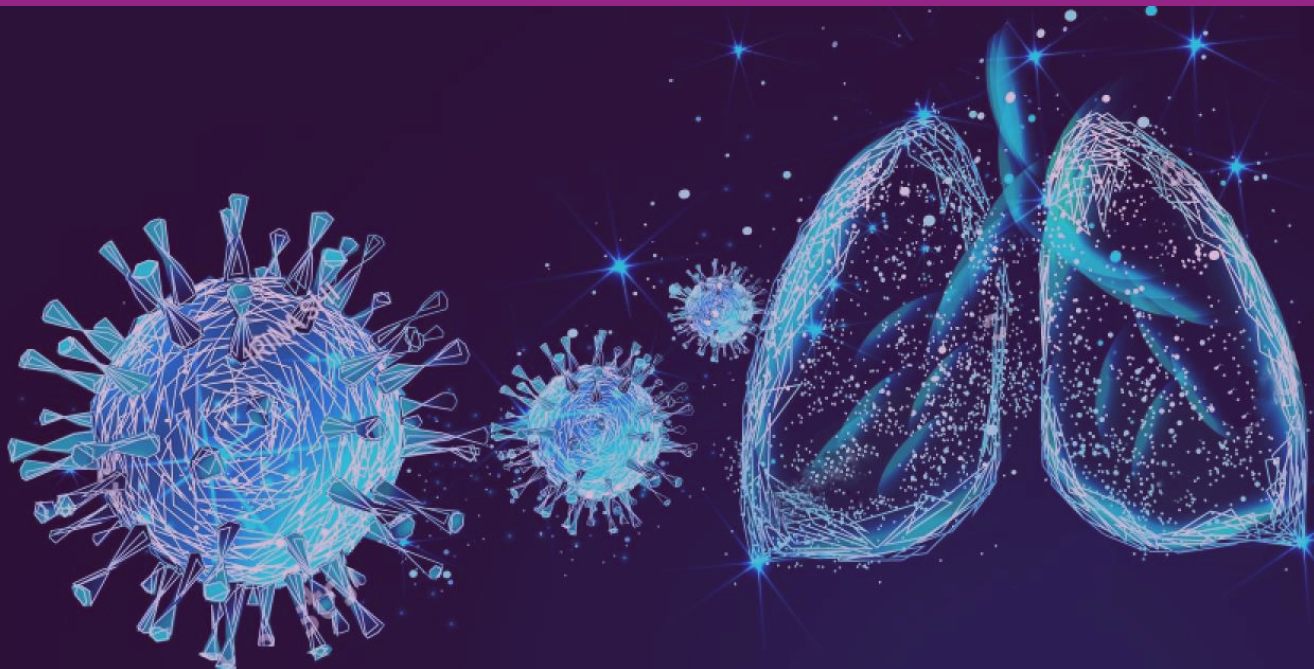

Zestaw testowy na przeciwciała SARS-CoV-2 (Złoto koloidalne) jest szybkim testem immunochromatograficznym z przepływem bocznym do jakościowego wykrywania określonych antygenów SARS-COV-2 w ludzkich drogach oddechowych, pomocnym przy identyfikacji ostrego lub wczesnego zakażenia COVID-19.



Zestaw testowy na antygen SARS-CoV-2 (Złoto koloidalne)

Specyfikacja

Próbka; Wymaz ustno-gardłowy, wymaz z nosogardzieli


Czas trwania testu: 15-20min

Temperatura przechowywania: 2-30°C


Cechy

- **PROSTY** – Może być przeprowadzony przez pracowników służby zdrowia wszędzie i o każdej porze bez użycia specjalistycznego sprzętu.
- **SZYBKI** – W czasie 15 min identyfikuje COVID-19
- **PEWNY** – Wysoka czułość i świetna specyfika w porównaniu z wynikami testów PCR

Procedura

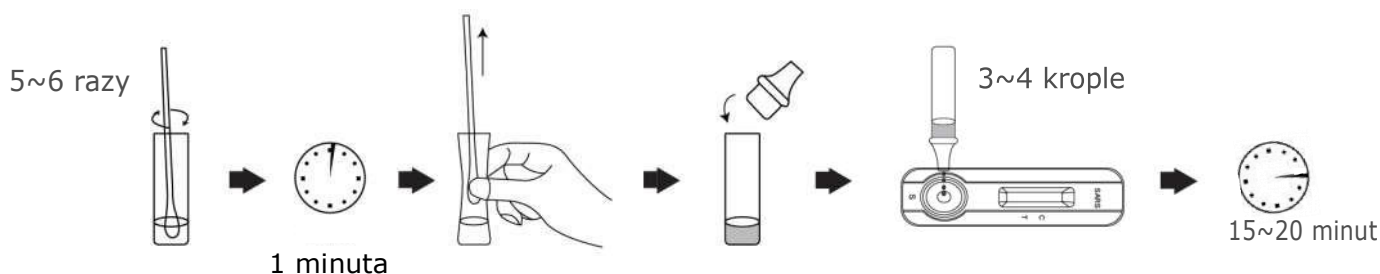

Wyniki testu

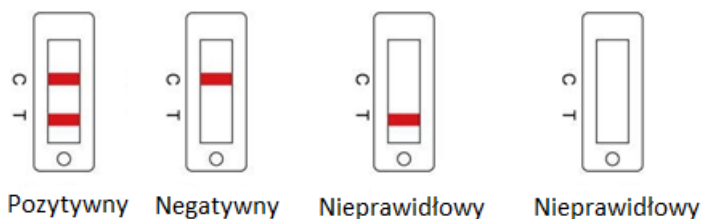

Co czyni go pewnym?

272 próbki kliniczne potwierdzone testem PCR zostały zestawione z wynikami testu Genrui. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

		PCR		Suma
		Poz	Neg	
Test na przeciwciała SARS-CoV-2 Genrui	Poz	59	2	65
	Neg	8	203	211
Suma		67	205	272

Uzgodniony procent pozytywny 88.06% (95%CI: 77.82%~94.70%)

Uzgodniony procent negatywny: 99.02% (95%CI: 96.52%~99.88%)

Uzgodniony procent ogółem: 96.32% (95%CI: 93.34%~98.22%)