

Materace szpitalne



Clinic | Care | Homecare | Assist



Materac

stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego, rehabilitacyjnego jak również ortopedycznego.

Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen (profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych).

SKŁAD MATERACA:

Pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości.

Pokrowiec (skład poliester i poliuretan) nieprzemakalny, zmywalny, paroprzepuszczalny, zamykany na zamek z dwóch stron, zakryty listwą zapobiegającą przedostaniu się płynów, nieprzepuszczalny dla bakterii, wirusów, krwi oraz płynów ustrojowych, trudnopalny (spełnia polską normę PN-EN 1021-1 - źródło zapłonu tłący papieros oraz PN-EN 1021-2 - źródło zapłonu równoważnik płomienia zapalki).



Temperatura prania pokrowca do 90°C, możliwość dezynfekcji parą wodną i sterylizacji parowej w temperaturze 121°C, odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych na bazie wody i alkoholu.

Materiał posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Materac zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PRZEPIS KONSERWACJI MATERIAŁU:

Pranie: wodne w temperaturze 60°C lub 95°C w proszkach ogólnie dostępnych typu: E, IXI, DOSIA lub w 60°C w proszku ELTRA (firmy Henkel).

Nie stosować środków piorących i dezynfekujących zawierających chlor.

Czyszczenie: mechaniczne, gąbką przez pocieranie powierzchni.
Kąpiel piorąca - woda z dodatkiem proszków wymienionych powyżej.

Suszenie: w stanie rozłożonym lub w pralce (z nadmuchem ciepłego powietrza).
Suszyć w suszarce w zwykle stosowanych przedziałach temperatur.
Nie wyciskać, nie prasować.

Dezynfekcja: powierzchni (powłoki poliuretanowej) przez spryskanie lub przetarcie.
(Spryskać powierzchnię materaca środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić na czas działania środka, po czym należy zmyć wodą i wysuszyć).

Zaleca się: INCIDUR SPRAY, SPIRYTUS 75% (alkohol etylowy), SEKUSEPT PULVER 2%, woda utleniona 3%, INCIDIN FOAM, INCIDIN ACTIVE, INCIDIN PLUS, VIRKON, MEDICARINE, MILTON, TRISTEL.

Sposób dezynfekcji prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta środków.

Materiały wykazują odporność na 50 cykli prania i dezynfekcji.

W przypadku stosowania dezynfekcji powierzchniowej może nastąpić lekkie zmarszczenie powłoki lub zmiana barwy.

Kombinacja różnych metod, np. dezynfekcja powierzchniowa, a potem pranie.

Dezynfekcja parą wodną: sterylizacja parowa w temperaturze 121°C w czasie 20 minut minimum 50 cykli.
Suszyć w suszarce w zwykle stosowanych przedziałach temperatur lub w stanie rozłożonym.

UWAGA!!!!

W trakcie dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej materac w pokrowcu nie może leżeć jeden na drugim, ponieważ może dojść do „sklejenia” się pokrowców.

Z kolei czynnik dezynfekujący powinien mieć kontakt z powierzchnią dezynfekowaną.

Należy więc tak ułożyć materace - ewentualnie układ „ażurowych półek” pomiędzy materacami, aby był pełny kontakt powierzchni dezynfekowanej z preparatem.

Wówczas nie będzie możliwości aby jeden pokrowiec przylegał do drugiego i nie będzie ryzyka sklejenia.

Stieglmeyer Sp. z o.o.

Grubno 63, 86-212 Stolno, Polska

Telefon: +48 56 6771 - 400

Faks: +48 56 6771 - 410

E-mail: info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.com

