

Ciśnieniomierz Viatom AirPB

Producent: Shenzhen Viatom Technology Co. Ltd. 3-4E, Tingwei Park, Honglangbei
2nd road BaoanShenZhen518100, GuangDong, Chiny.



Dziękujemy za zakup ciśnieniomierza AirBP. AirBP jest ciśnieniomierzem naramiennym (metoda pomiaru oscylometryczna) z ręczną inflacją powietrza i funkcją bluetooth pozwalającą na wyświetlanie wyników w aplikacji AirBP na urządzeniu mobilnym (iOS, Android). Urządzenie nie posiada wbudowanego wyświetlacza wyników*.

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją. Instrukcja zawiera parametry techniczne urządzenia, użytkowanie, konserwację i przechowywanie oraz uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie urządzenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem.

Cechy i Parametry techniczne:

- waga: 160g
- wymiary: 68x25mm (jednostka główna) + wężyk + mankiety
- pomiary ciśnienia metodą oscylometryczną; zakres: 0-300mmHg, dokładność: 3mmHg
- pomiary częstości akcji serca: zakres HR: 30-250bp; dokładność HR: 2bpm
- mankiety: 22-42cm
- pamięć: pomiarów ciśnienia
- zasilanie: wbudowana bateria litowa; ładowanie przez USB; ok 1000 pomiarów na jednym ładowaniu
- Łączność: Bluetooth 4.0 BLE
- Aplikacja: AirBP (Viatom); Android/iOS; możliwość zapisu i wysyłania wyników

Przygotowanie oraz użytkowanie

- Po rozpakowaniu urządzenie jest gotowe do użycia i wstępnie naładowane
- Aby wykonać pomiar należy zainstalować na urządzeniu mobilnym (iOS/Android) aplikację AirBP, upewnić się, że urządzenie ma włączony bluetooth a następnie postępować wg poniższej instrukcji.



Włącz urządzenie i otwórz aplikację AirBP



Założ mankiety na ramię




Kliknij start na aplikacji i pompuj gruszkę



Po zakończeniu pomiaru wypuść powietrze

- Po wciśnięciu „START” aplikacja wydaje instrukcję pompowania mankiety; informuje również kiedy zakończyć pompowanie i kiedy ewentualnie dopompować. Po zakończeniu pomiaru instruuje aby wypuścić pozostałe powietrze.
- Po wykonaniu pomiaru wynik wyświetlane jest na ekranie urządzenia mobilnego w aplikacji AirBP w formie liczbowej (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, częstość akcji serca) i graficznej (na wykresie)
- Włączenie urządzenia następuje poprzez naciśnięcie przycisku koło wyświetlacza.
- W aplikacji można zachowywać i przysyłać listę pomiarów
- Do ładowania urządzenia należy używać załączonej ładowarki USB

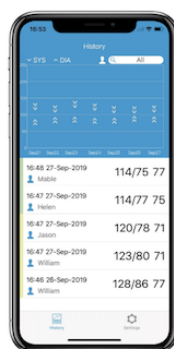

UWAGI:

- Wielokrotne powtarzane pompowania mankiety urządzenia może powodować uczucie dyskomfortu
- Mankiety nie należy zakładać na uszkodzoną/podrażnioną skórę
- Mankiety nie należy zakładać na obrzęknięte tkanki
- Mankiety nie należy zakładać jeśli nosi cechy uszkodzenia
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla noworodków/niemowląt
- W trakcie pomiaru ramię powinno znajdować się na poziomie serca
- W trakcie pomiaru należy siedzieć nieruchomo
- W trakcie pomiaru obowiązują standardowe zasady pomiaru ciśnienia
- nie można używać ciśnieniomierza w środowisku rezonansu magnetycznego

Serwis urządzenia:

- urządzenie należy czyścić suchą lub wilgotną szmatką; można delikatnie czyścić alkoholem etylowym 70% lub izopropylowym 70%
- mankiety nie wolno prać ani zanurzać w wodzie ani innych środkach
- NIE WOLNO zanurzać urządzenia w płynach
- NIE WOLNO sterylizować pod ciśnieniem

Niniejszy ciśnieniomierz jest zgodny z wymogami standardu EN60601-1-2 i wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej produktów medycznych oraz normy DIN EN ISO 80601-2-61

* Opcjonalnie urządzenie współpracuje z rejestratorem CheckMe Pro – wówczas wyniki wyświetlane mogą być na rejestratorze CheckMe Pro a nie na urządzeniu mobilnym