


NeoSmile™

Hydrokoloidowa osłonka czujnika temperatury

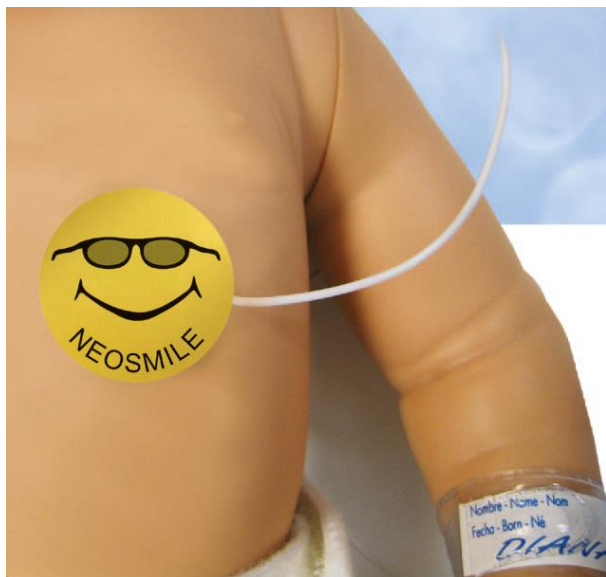

Właściwości i zalety

- Osłona czujnika temperatury, która przylega do ciała pacjenta dzięki hydrokoloidowemu plasterowi NeoBond
- Odporna na wilgoć oraz temperaturę
- Utrzymuje się długo na skórze



Nr katalogowy

N731

Rozmiar

25 mm

Ilość w opakowaniu

150/op.

NeoSmile - wskazówki stosowania

ZATOSOWANIE

Ostona NeoSmile służy do ochrony czujnika temperatury.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

Oczyść i osusz skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze ostona NeoSmile nie zostanie prawidłowo zamocowana. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

Krok 1 Przed usunięciem warstwy ochronnej ogrzewaj osłonę NeoSmile w dłoniach przez 60 sekund. Można ją również ogrzewać przy użyciu ogrzewacza promiennikowego lub chemicznego przez 10–15 sekund.

Krok 2 Usuń warstwę ochronną. Umieść osłonę NeoSmile na skórze i przytrzymaj przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.

Usuwanie

Krok 1 Wymieniaj osłonę NeoSmile na nową co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

Krok 2 Nasącz osłonę NeoSmile wodą lub solą fizjologiczną.

Krok 3 Powoli odklej osłonę NeoSmile od skóry, używając wacika nasączonego wodą lub solą fizjologiczną.

Informacje ogólne

Materiały:

NeoBond Hydrocolloid
FLEXmark® MM 200 złota folia
Nie zawiera plastyfikatora DEHP
Nie wykonano z lateksu, kauczuku naturalnego

Rozmiar: średnica 25 mm

Opakowanie: Standardowe

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze ostona NeoSmile nie zostanie prawidłowo zamocowana. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Nie używać ponownie.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.



KROBAN Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 182/451,
90-368 Łódź

NIP: 7252296972 REGON: 385452206

mobile:

fax:

e-mail:

+ 48 512 046 260

+ 48 42 636 56 09

info@kroban.pl

www.kroban.pl