


Neotech ChinStrap™

Pasek podbródkowy przy wsparciu wspomagania oddechu

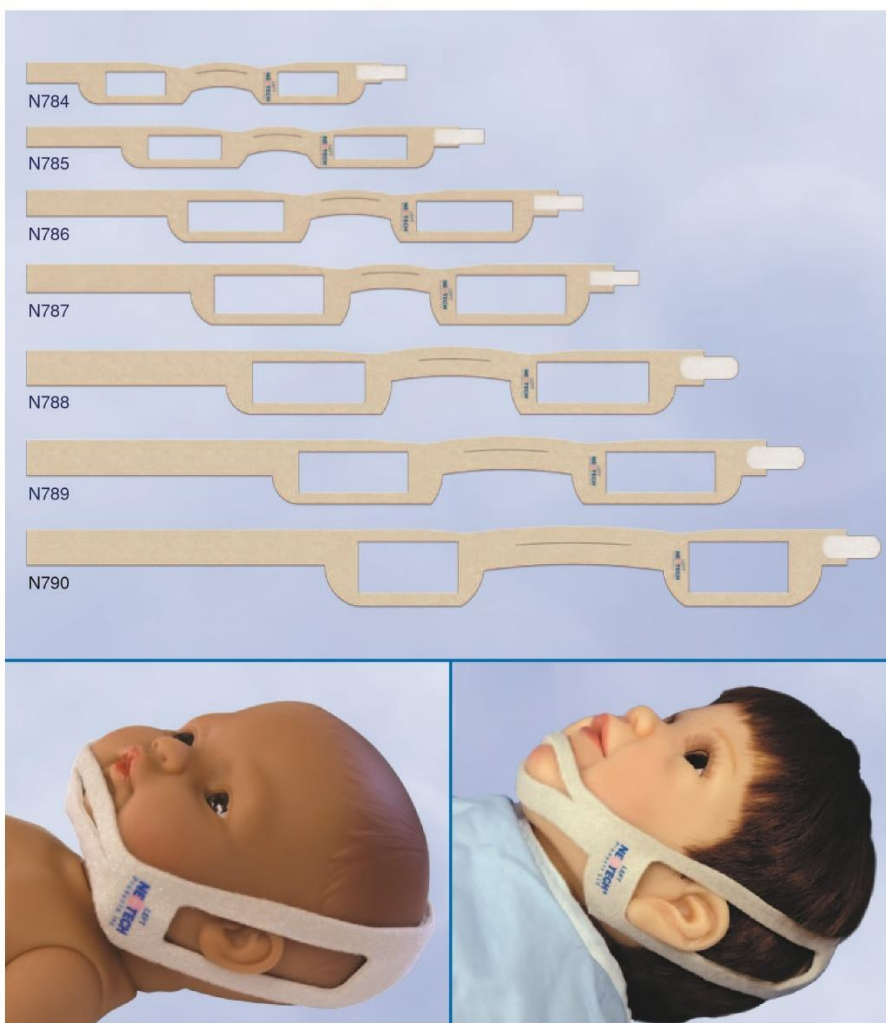

Właściwości i zalety

- Oddychający, miękki materiał NeoFoam® przyjazny dla skóry odprowadzający wilgoć
- Elastyczność opaski umożliwia minimalny ruch ust
- Opaska z możliwością regulacji łatwa w dopasowaniu
- Dzielony pasek pod podbródkiem zapewnia wygodę i stabilność
- Otwory na uszy zapobiegają zwiżaniu małżowiny usznej
- Zaprojektowany, aby zmniejszyć ryzyko odleżyn lub martwicy
- Unikalny materiał zapobiega ślizganiu się
- Nie zawiera naturalnego lateksu kauczukowego ani plastyfikatora DEHP
- Pakowane pojedynczo

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
N784	Nano	20/op.
N785	Micro	20/op.
N786	Small	20/op.
N787	Large	20/op.
N788	X-Large	20/op.
N789	Macro	20/op.
N790	Jumbo	20/op.



Neotech ChinStrap™

Akcesoria wspierające

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Pasek Neotech ChinStrap służy do utrzymywania ust pacjenta w stanie zamkniętym podczas terapii. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA UŻYTKOWANIA

Krok 1

Wybierz odpowiedni rozmiar paska, mierząc obwód od środka brody przez ucho do potylicy.



Krok 2

Ułóż pasek Neotech ChinStrap na brodzie, z wcięciem skierowanym w stronę szyi, gładką białą stroną skierowaną do skóry.



Krok 3

Ułóż szerszą, dolną część paska pod brodą, a górną część na przedniej stronie brody.

Krok 4

Przeciągnij pasek w kierunku potylicy, układając odpowiedni segment paska na uszach, i przymocuj rzepem. Strona oznaczona etykietą „LEFT” powinna znajdować się pod lewym uchem pacjenta.



Uwaga: Produkt można przyciąć w celu prawidłowego zamocowania. Należy się upewnić, że pasek nie jest zamocowany zbyt ściśle i nie uciska uszu. Rzep powinien całkowicie nakładać się na pasek.



Krok 5

Wymieniaj produkt na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

W przypadku zużycia lub zanieczyszczenia należy natychmiast wymienić produkt na nowy.

INFORMACJE OGÓLNE

Materiały produktu

NeoFoam, tkanina haczykowa

Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego: NIE

Wykonane z plastyfikatorem DEHP: NIE

Pełne informacje o materiałach można znaleźć w MSDS.

Rozmiary

N784 Nano: dla obwodu głowy 22-27 cm

N785 Micro: dla obwodu głowy 28-35 cm

N786 Small: dla obwodu głowy 33-42 cm

N787 Large: dla obwodu głowy 36-46 cm

N788 X-Large: dla obwodu głowy 38-53 cm

N789 Macro: dla obwodu głowy 39-58 cm

N790 Jumbo: dla obwodu głowy 40-66 cm

Opakowanie

Pakowane pojedynczo: TAK

Rodzaj opakowania: Worek polietylenowy

Pudełko z dozownikiem: Tak (N784-N787)

UWAGI & OSTRZEŻENIA

Pasek Neotech ChinStrap nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Unia Europejska: MDR EU 2017/745

Każdy poważny incydent związany z tym wyrobem należy zgłosić spółce Neotech Products i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.