

Little Sucker[®]

Końcówki do odsysania płynów i wydzielin z nosa oraz ust



Little Sucker[®]

Właściwości i zalety

- Specjalna końcówka minimalizująca ryzyko zranienia
- Możliwa obsługa wyposażenia odsysającego jedną ręką
- Port umożliwiający aktywację funkcji odsysania kciukiem
- Miękki, elastyczny materiał podobny do używanego do produkcji gruszek medycznych
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość w
N204C	Preemie z osłonką	50 szt. / op.
N205C	Standard z osłonką	50 szt. / op.



Little Sucker[®] Nasal Tip

Właściwości i zalety

- Specjalna końcówka minimalizująca ryzyko zranienia
- Możliwa obsługa wyposażenia odsysającego jedną ręką
- Port umożliwiający aktywację funkcji odsysania kciukiem
- Miękki, elastyczny materiał podobny do używanego do produkcji gruszek medycznych
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość w
N224	Preemie	50 szt. / op.
N225	Standard	50 szt. / op.

Litter Sucker®

Końcówki do odsysania wydzielin

ZASTOSOWANIE

Little Sucker/NeoSucker jest końcówką przeznaczoną do użytku z przewodem odsysającym płyny z jamy ustnej i nosa.

Little Sucker Nasal Tip jest końcówką przeznaczoną do użytku z przewodem odsysającym płyny z nosa.

Osłona zapewnia do ochronę końcówki Little Sucker do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Krok 1

W stosownych przypadkach zdejmij zatyczkę z portu i wysuń końcówkę ssącą z osłony.

Krok 2

Podłącz przewód ssawny do karbowanego złącza końcówki ssącej.

Krok 3

Wyreguluj siłę ssania zgodnie z procedurami szpitalnymi lub zaleceniami lekarza.

Krok 4

Zamknij port kciukiem, aby uaktywnić funkcję odsysania

Krok 5

Odsysaj płyny z jamy ustnej lub nosa, cyklicznie przerywając i wznawiając odsysanie.

Uwaga: Aby przerwać odsysanie, należy otworzyć port końcówki. Ponowne zamknięcie portu kciukiem umożliwia kontynuowanie odsysania.

Krok 6

Po użyciu odsysaj wodę sterylną przy użyciu końcówki ssącej.

Krok 7

W stosownych przypadkach umieść ponownie końcówkę ssącą w osłonie.

Krok 8

W stosownych przypadkach załóż zatyczkę osłony na port końcówki ssącej.

Krok 9

Wymieniaj końcówkę ssącą i osłonę na nową co 24 godziny lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.



Wyprodukowano w USA

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o materiałach

Little Sucker: TPE (termoplastyczny elastomer)

Okładka: PCV

Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego: Nie

Wykonane z plastyfikatora DEHP: Nie

Rozmiary

N224 Preemie

Długość: 106mm

Średnica otworu końcówki: 2 mm

Średnica osłony nosa: 11 mm

Średnica otworu portu kciuka: 5 mm

N225 Standard

Długość: 120mm

Średnica otworu końcówki: 3 mm

Średnica osłony nosa: 15 mm

Średnica otworu portu kciuka: 5 mm

N204C

Długość: 106mm

Średnica otworu końcówki: 2 mm

Średnica otworu portu kciuka: 5 mm

Długość osłonki: 90 mm

N205C

Długość: 120mm

Średnica otworu końcówki: 3 mm

Średnica otworu portu kciuka: 5 mm

Długość osłonki: 90 mm

Opakowanie

Pakowane pojedynczo: Tak

Rodzaj opakowania: worek polietylenowy.

Pudełko z funkcją dozownika: Tak

Odwiedź stronę neotechproducts.com, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Worki polietylenowe są biodegradowalne. Pudełka są drukowane przy użyciu przyjaznego dla środowiska atramentu sojowego na materiałach nadających się do recyklingu.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w jamie ustnej i nosowej.

Umieszczenie końcówki zbyt głęboko w jamie ustnej lub nozdrzach może spowodować zranienie.

Należy chronić końcówkę ssącą i osłonę przed zanieczyszczeniem.

Osłona Little Sucker jest zaprojektowana specjalnie do użytku z końcówką Little Sucker do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa. Może nie być odpowiednia do innych końcówek do odsysania płynów. Osłona nie jest przeznaczona do użytku z dwuczęściową końcówką Little Sucker ani końcówką Little Sucker Nasal Tip. Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Unia Europejska: MDR EU 2017/745

Każdy poważny incydent związany z tym wyrobem należy zgłosić spółce Neotech Products i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



KROBAN Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 182/451,

90-368 Łódź

NIP: 7252296972 REGON: 385452206

telefon:

+ 48 512 046 260

fax:

+ 48 42 288 48 30

e-mail:

info@kroban.pl

www.kroban.pl