



NEAUVIA™
DEVICES

EPILME



TWARZ



CIAŁO



LASER



INTENSYWNE
CHŁODZENIE

80

TECHNOLOGIA:

EpilMe to laser diodowy do usuwania włosów, hirsutyzmu, walki z zapaleniem mieszków włosowych, łagodnych zmian pigmentacyjnych i niektórych zmian naczyniowych. Pozwala on szybko i komfortowo leczyć wszystkie fototypy, osiągając trwałe rezultaty w redukcji włosów już po kilku zabiegach. EpilMe zawiera laser diodowy o długości fali 808 nm, która jest silnie absorbowana przez melaninę, i mocy optycznej 4000 W, aby dostosować szerokość i płynność impulsu do potrzeb pacjenta.

EpilMe zawiera dwa interfejsy:

Tryb Basic: ustawione programy odpowiadające optymalnym parametrom dla wybranego trybu pracy. Zawiera tryb Paint oraz Stamped.

Tryb Advanced: dla doświadczonych operatorów, którzy chcą kontrolować wszystkie parametry. Zawiera tryb Burst


Contact Cooling System tworzy różnicę termiczną między naskórkiem, który należy chronić, a cebulką włosa na skórze właściwej, gdzie musimy podwyższyć temperaturę, zwiększając bezpieczeństwo i komfort zabiegu.

- WYSOKA ABSORBCJA MELANINY PRZY 808 NM
- BEZPIECZNY I SKUTECZNY PRZY WSZYSTKICH FOTOTYPACH SKÓRY I WŁOSÓW
- PRECYZYJNE REGULOWANIE IMPULSU OD 1MS³ DO 600MS³
 - KONTAKTOWY SYSTEM CHŁODZENIA -1°C
 - 3 TRYBY PRACY: PAINT, STAMPED ORAZ BURST
- KRÓTKI IMPULS I WYSOKA FLUENCJA - PODGRZANIE MELANINY BEZ ODDZIAŁYWANIA NA OTACZAJĄCĄ TKANKĘ
- INTUICYJNY SOFTWARE DLA NIEZAAWANSOWANYCH OPERATORÓW

WSKAZANIA


- Usuwanie owłosienia
 - Hirsutyzm
- Usuwanie łagodnych zmian barwnikowych
- Niektóre zmiany naczyniowe

TRYBY PRACY EPILME

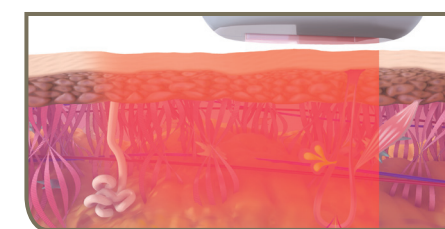


TRYB PAINT

Specjalnie zaprojektowany w celu zmniejszenia gęstości włosów na dużych obszarach i dla pacjentów wrażliwych na ból.

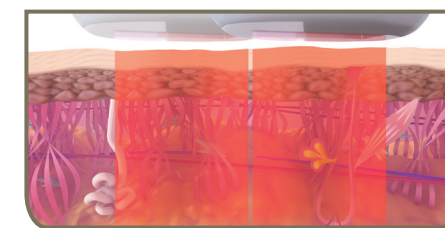

TRYB STAMPED

Tryb stemplowany jest zalecany dla pacjentów z cięszymi włosami o niskiej gęstości.

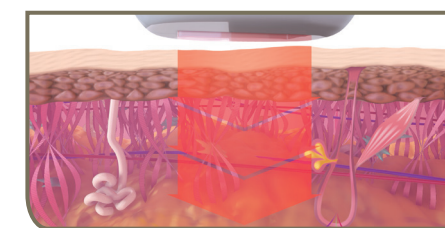

TRYB BURST

Umożliwia operatorom pracę z ciemniejszymi fototypami, takimi jak V - VI. Dostępne tylko podczas pracy z trybem Advanced.

81

EFEKTY




PRZED



PO 5 ZABIEGACH



PRZED

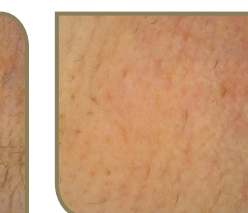

PO 5 ZABIEGACH