

MEDISPONGE®

Jałowa wchłanialna hemostatyczna gąbka
z żelatyny wieprzowej



WPROWADZENIE:

Żelatyna jest w znacznym stopniu czystym białkowym składnikiem odżywczym, uzyskiwanym dzięki termicznej denaturacji kolagenu, który jest podstawowym składnikiem budowy oraz najczęściej występującym białkiem wśród zwierząt.

Gąbki żelatynowe wykorzystywane są w praktyce klinicznej jako hemostatyki od ponad 50 lat. Okazały się skuteczne i bezpieczne jak inne rodzaje hemostatyków.

Z uwagi na zagrożenie chorobami BSE/TSE ze strony materiału pochodzącego od krów, opracowano materiały z żelatyny wieprzowej, które są obecnie szeroko wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym.

OPIS:

MEDISPONGE® jest chirurgiczną gąbką hemostatyczną, wytwarzaną z wysokooczyszczzonej obojętnej żelatyny wieprzowej do zastosowania w różnych procedurach chirurgicznych, w których uzyskanie hemostazy w sposób konwencjonalny jest trudne lub niewykonalne i nie zaleca się zastosowania innych niewchłaniających materiałów. Produkt dostępny jest w różnych wygodnych rozmiarach w postaci sterylizowanej promieniami gamma w odpowiednim podwójnym jałowym opakowaniu typu blister lub w torebkach przeznaczonych do specjalnych wymiarów.

MEDISPONGE® wchłania w przybliżeniu płyny ustrojowe w ilości nie mniejszej niż 35-krotność własnej wagi i łatwo przylega do miejsca krwawienia. Jednorodna porowatość

MEDISPONGE® zapewnia łatwą hemostazę. Przy implantacji in vivo ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu 3-4 tygodni.

MEDISPONGE® jest nietoksyczny, niealergizujący, nieimmunogeny, apirogeny i spełnia wymagania biokompatybilności zgodnie z zapisami normy EN ISO 10993.

WSKAZANIA:

- ! Chirurgia plastyczna
- ! Chirurgia ogólna
- ! Otolaryngologia i stomatologia
- ! Ortopedia i traumatologia
- ! Chirurgia jamy brzusznej
- ! Neurochirurgia
- ! Dermatologia
- ! Ginekologia
- ! Chirurgia odbytu i odbytnicy

STOSOWANIE I WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA:

Gąbka **MEDISPONGE®** ma biały kolor, jest sprężysta, lekka i nie rozpuszcza się w wodzie. Usuwa się ją z opakowania ściśle przestrzegając warunków aseptycznych; produkt można przycinać do pożądanych rozmiarów, aplikować na sucho lub po nasączeniu roztworem soli fizjologicznej lub trombiny bądź też roztworem antybiotyków o wymaganym stężeniu. Należy ścisnąć materiał pomiędzy dwoma palcami w celu usunięcia pęcherzy-

ków powietrza tak, aby gąbka, po jej zanurzeniu w roztworze, prawie od razu powróciła do pierwotnego kształtu i rozmiaru. W momencie zastosowania nadmiar roztworu może spływać na kompres z gazy. Nasączona gąbka jest następnie aplikowana na miejsce krwawienia i należy ją przytrzymać naciskając w sposób umiarkowany przez około 10-15 sekund. Zazwyczaj pierwsza aplikacja **MEDISPONGE®** tamuje krwawienie, ale jeżeli tak się nie stanie, należy dokonać dodatkowej aplikacji preparatu przy zastosowaniu nowych porcji gąbki. Po zatamowaniu krwawienia, kawałki **MEDISPONGE®** należy pozostawić na miejscu, w przeciwnym razie może wystąpić ponowne krwawienie. Ponieważ **MEDISPONGE®** powoduje nieznacznie zwiększoną infiltrację komórkową w porównaniu ze skrzepem krwi, ranę można zamknąć ponad nim.

PRZECIWWSKAZANIA:

MEDISPONGE® nie powinien być stosowany w zamykaniu nacięć skórnych, ponieważ może zakłócać proces gojenia się krawędzi skóry.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA:

- ! **MEDISPONGE®** jest produktem jałowym i nie powinien być sterylizowany ponownie, ponieważ zmieniłoby to właściwości produktu
- ! Niewykorzystane porcje produktu należy wyrzucić
- ! Nie zaleca się stosowania **MEDISPONGE®** w miejscach zakażonych
- ! Poprzez absorbowanie płynu gąbka może zwiększyć swoją objętość i w ten sposób naciskać na sąsiadujące narządy. Dlatego też zalecana jest minimalna prekompresja przy stosowaniu preparatu w jamach ciała.
- ! W neurochirurgii nie powinno się pozostawiać preparatu w zamkniętych jamach, ponieważ może powodować nacisk na tkanki nerwowe po zwiększeniu swojej objętości.
- ! Przy stosowaniu preparatu **MEDISPONGE®** nie powinno się zaniedbywać innych zazwyczaj stosowanych procedur hemostatycznych, takich jak szycie, nacisk i podwiązanie.

PRZECHOWYWANIE:

MEDISPONGE® przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

CODE	DESCRIPTION	UNITS
MSES 1001	MEDISPONGE® 80x50x10mm	Box of 10
MSES 1002	MEDISPONGE® 70x50x10mm	Box of 10
MSES 1003	MEDISPONGE® 80x50x1mm	Box of 10
MSES 1004	MEDISPONGE® 70x50x1mm	Box of 10
MSES 1005	MEDISPONGE® 80xdia30mm	Box of 5
MSES 1006	MEDISPONGE® 10x10x10mm	Box of 100
MSES 1009	MEDISPONGE® 200x70x0.5mm	Box of 10
MSES 1010	MEDISPONGE® 30x30x10mm	Box of 10
MSES 1012	MEDISPONGE® 14x14x7mm	Box of 10
MSES 1014	MEDISPONGE® 125x80x10mm	Box of 5

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:

Promedica Toruń Sp. z o.o.,
87-100 Toruń, POLAND
tel./fax: +48 56 62 30 112,
www.promedica.torun.pl
MEDISPONGE® - registered trade mark by
Promedica Toruń, Poland

WYTWÓRCA:

Eucare Pharmaceuticals (P) Limited.
Plot No. AC 25B, SIDCO Industrial Estate,
Thirumudivakkam, Chennai - 600 132.
Tel.No. +91-44-66263900
E-mail: Info@eucareindia.com
www.eucareindia.com, www.eucare.in