



i6

Defibrillator/Monitor



Amoul[®]
We Innovate to Save Lives

4 w 1

Defibrylator i6 posiada cztery tryby pracy: defibrylacja, monitorowanie, stymulacja oraz AED. Dzięki temu urządzenie spełnia różnorodne wymagania w różnych sytuacjach, zarówno w szpitalu, jak i poza nim.

To wszechstronne urządzenie nadaje się do stosowania w transporcie medycznym, karetkach pogotowia, SORach, kardiologii, na oddziałach intensywnej terapii oraz w anestezjologii i blokach operacyjnych.



Defibrylacja w 3 krokach



1. Wybierz żądany poziom energii

2. Naciśnij przycisk **ładowania**

3. Naciśnij przycisk **"Shock"** aby podać impuls



Amбуl Tryb RKO

Wizualne i dźwiękowe wskazówki dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej są zgodne z najnowszymi wytycznymi AHA i ERC



Monitorowanie EtCO₂

Moduł Kapnografii w strumieniu głównym lub w strumieniu bocznym (do wyboru)



Kompaktywość

Kompaktowy, lekki (5,8 kg), łatwy do przenoszenia jedną ręką




Kategorie Pacjentów

Dorośli, dzieci, niemowlęta

Monitorowane parametry	EKG	NIBP	SpO ₂	TEMP	EtCO ₂
i6	3/5 odpr.	✓	✓	✓	
i6 Pro	3/5 odpr.	✓	✓	✓	✓
i6 Plus	3/5/12 odpr.	✓	✓	✓	○



Elektrody AED

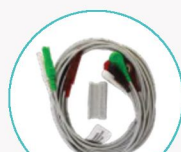

EKG



Kapnografia



Zewnętrzne łżyki defibrylujące



SpO₂



NIBP



TEMP



Łżyki do defibrylacji wewnętrznej



7" kolorowy ekran

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiający odczytywanie informacji o pacjencie w każdych warunkach

Tryb AED




Tryb ten zapewnia podanie impulsu ratującego życie w ciągu kilku sekund, zgodnie z jasnymi wskazówkami głosowymi i wyświetlanymi na ekranie.

Monitorowania wielu parametrów



3 lub 6 krzywych, 3/5/12-odprowadzeniowe EKG, SpO2, nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi, oddech, EtCO2, temperatura oraz zapis zdarzeń

Defibrylacja ręczna

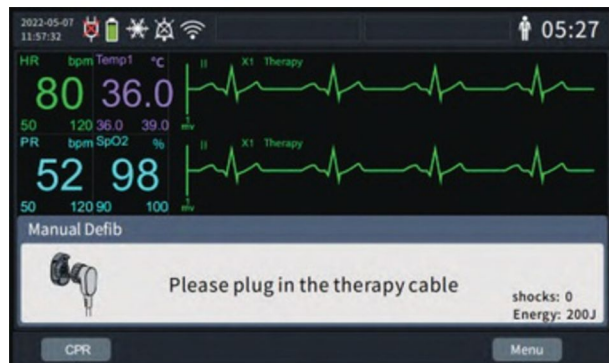

Obejmuje tryb pracy asynchronicznej i synchronicznej.

Stymulacja



i6 oferuje tryb stały oraz tryb na żądanie z regulowaną częstotliwością stymulacji i mocą.



Łatwy transport

Uchwyt na poręcz łóżka



Uchwyt do przenoszenia



Ochronna torba transportowa



RTCA/DO → 160G EN1789

Szeroki wybór opcji i akcesoriów

Akcesoria dopasowane do różnych potrzeb i zastosowań klinicznych.
Wybór oprzyrządowania do różnej kategorii wiekowej pacjentów.



Amortyzujący uchwyt i dwuwarstwowy ekran wytrzymują silne uderzenia i upadki.
Stopień ochrony IP54 sprawia, że defibrylator nadaje się do użytku w nagłych wypadkach, SORach, karetkach i poza szpitalem.



Zasilanie sieciowe i bateryjne zapewnia nieprzerwane, długotrwałe wsparcie.
Akumulator zapewnia do 6 godzin monitorowania.
Czas ładowania akumulatora wynosi mniej niż 3 godziny.

Ogólne	Opis
Rozmiar	290x205x297mm (L/W/H)
Waga	5.8kg (z baterią)
Zasilanie	AC:100-240V,50/60 Hz; Akumulator: akumulator litowo-jonowy
Defibrylacja	Opis
Przebieg	Dwufazowy, fala wykładnicza o ściętych końcach (BTE) z kompensacją impedancji
Zakres impedancji	25 Ω ~ 200 Ω (defibrylacja zewnętrzna)
Wybór energii	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300 i 360 J
Czas ładowania impulsu	Osiągnięcie 200 J w mniej niż 5 sekund przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora; Osiągnięcie 360 J w mniej niż 8 sekund przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora;
	Tryb ręczny: defibrylacja asynchroniczna i synchroniczna; tryb AED
Stymulacja nieinwazyjna	Opis
Tryby	Tryb stały i na żądanie
Kształt fali	Jednofazowy impuls prostokątny
Częstotliwość	Częstotliwość: 40ppm ~ 170ppm $\pm$ 1.5%; Prąd: 0mA~200mA $\pm$ 5% or $\pm$ 5mA
Monitorowanie	Opis
Monitorowane parametry	3 lub 6 krzywych, 3/5/12-odprowadzeniowe EKG, SpO2, nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi, oddech, EtCO2, temperatura oraz zapis zdarzeń
Komunikacja	Opis
Standard	WIFI, USB i 4G(LTE)

Global Markets



Amoul® Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.



AMKO-MED SP. Z O.O.

ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław

Tel: +48 605 308 926

E-Mail: kontakt@amko-med.pl

WEB: www.amko-med.pl