

GETINGE

MYJNIE-DEZYNFEKTORY GETINGE SERIA 46



**Ile wyposażenia wielokrotnego użytku
musisz umyć ? Jakiego rodzaju ?** Seria 46
Getinge to myjnie dopasowane precyzyjnie do
Twoich potrzeb.

Dodatkowe opcje

- Kontrola przepływu – do pomiaru przepływu z pompy detergentu i zatrzymania procesu jeżeli ustalona ilość nie została odmierzona.
- Drukarka – wolnostojąca lub zamontowana w myjni.
- Dodatkowe pompy dozujące – dwie pompy jako standard, ale Getinge 46-5 i 46-4 mogą być wyposażone w dwie dodatkowe pompy.
- Panele maskujące do zabudowy
- Kontrola ciśnienia – sprawdza ciśnienie wody.
- Chłodzenie – chłodzi wodę odprowadzaną z myjni
- Zawór wody uzdatnionej – do wody do płukania końcowego
- Pompa wody uzdatnionej – do wody do płukania końcowego
- Kontrola filtra – kontroluje filtr sterylny
- Kontrola przewodności – do sprawdzenia, że w wodzie do ostatniego płukania nie pozostały resztki detergentu, a tym samym na dezynfekowanym wyposażeniu.
- Sygnał akustyczny – w przypadku alarmu.



ANI MNIEJ ANI WIĘCEJ

Nowe myjnie dezynfektory Getinge serii 46 są precyzyjnie dostosowane do wszystkich potrzeb w służbie zdrowia. Można wybierać pomiędzy dwoma, czterema i pięcioma poziomami, w zależności od rodzaju i ilości wyposażenia do mycia i dezynfekcji.

Seria Getinge 46 zawiera urządzenia dla oddziałów, przychodni, bloków operacyjnych i działów centralnej sterylizacji. Te myjnie-dezynfektory mają zastosowanie do każdego rodzaju wyposażenia - od skomplikowanych instrumentów do podstawowego wyposażenia szpitalnego oddziału. Można w nich myć, dezynfekować i suszyć wszystkie rodzaje instrumentów o przekroju kołowym.

Wybór pozwalający na obniżenie kosztów

Myjnia-dezynfektor z odpowiednim zestawem akcesoriów, spełniającym wymagania użytkownika, zapewnia oszczędność kosztów od momentu jej uruchomienia. Myjnie Getinge serii 46 oferują właściwy model dla każdego rodzaju użytkownika.

Wysoka wydajność mycia

Myjnie-dezynfektory Getinge serii 46 są połączeniem dużych komór mycia i małych wymiarów zewnętrznych. Model Getinge 46-5 wyposażony jest w wózek do narzędzi o pięciu poziomach mycia, model 46-4 posiada wózek z czterema poziomami mycia.

Każda półka i ramię myjące wózka są demontowalne i wtedy stałe ramię myjące może być zastosowane do innych akcesoriów, np. do mycia skomplikowanych elementów takich jak narzędzia o przekroju kołowym.



Getinge 46-2 - dla oddziałów szpitalnych i przychodni, dwa poziomy mycia



Getinge 46-4 - dla bloków operacyjnych i małych sterylizatori, cztery poziomy mycia



Getinge 46-5 - dla dużych bloków operacyjnych i centralnych sterylizatori, pięć poziomów mycia

Myjnie-dezynfektory Getinge seria 46	MODEL MYJNI-DEZYNFEKTORA		
	46-2	46-4	46-5
Poziomy mycia	2	4	5
Wysokość komory	590 mm	590 mm	660 mm
Szerokość komory	550 mm	550 mm	550 mm
Głębokość komory	620 mm	620 mm	620 mm
Tace DIN 1/1 na załadunek *	4	8	10
Tace SPRI II na 1 załadunek**	4	6	8

* Wymiary tacy: 485x250x50 mm

** Wymiary tacy: 340x250x70 mm

GETINGE

46-4



P01 GP-SHORT-D
TEMP INDEP. 861.90

1

4

2

5



POZNAJ NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĘ

Wyjątkowość myjni-dezynfektorów Getinge seria 46 to efekt połączenia informacji od użytkowników i starannego przemyślenia koncepcji naszych projektantów. Rozwiązania w zakresie higieny i ergonomii zostały połączone z najnowszą technologią aby dać użytkownikowi maksimum bezpieczeństwa - łącznie z wbudowanymi alarmami.



Spełnia wszystkie standardy

Myjnie-dezynfektory Getinge serii 46 zapewniają doskonałe rezultaty mycia i dezynfekcji. Myjnie te spełniają wszystkie obowiązujące standardy, w tym EN/ISO 15883.

Skuteczne i ekonomiczne suszenie

Myjnie-dezynfektory Getinge seria 46 skutecznie suszą zewnętrzne jak i wewnętrzne powierzchnie narzędzi. Czas suszenia i temperatura mogą być dla każdego procesu zaprogramowane z panelu sterującego.

Konstrukcja i działanie

Dobre działanie myjni-dezynfektorów Getinge seria 46 to konstrukcja, która bazuje na doświadczeniu użytkowników i inżynierów serwisowych:

- PRZESZKLONE DRZWI - zapewniają pełną kontrolę wzrokową procesu, standard we wszystkich myjniach Getinge seria 46.
- ERGONOMICZNY UCHWYT - zapewnia bardzo łatwe otwieranie i zamykanie drzwi.
- GŁADKIE POWIERZCHNIE- łatwe czyszczenie, brak miejsc niehigienicznych, gromadzących brud.
- MAŁA LICZBA PANELI - łatwe do zdjęcia, wygodny serwis od frontu i łatwe czyszczenie.

Nowy system kontroli

Procesy w myjni-dezynfektorze Getinge seria 46 są zabezpieczane przez nowy system kontroli PACS 300. System ten ma wiele wbudowanych funkcji zabezpieczających oraz opcje monitorowania, co zapewnia każdorazowo doskonałe rezultaty.

Łatwość używania

Wybierz program i wciśnij „start” - myjnia-dezynfektor Geinge 46 zajmie się resztą ! Możesz śledzić na wyświetlaczu wszystko, co dzieje się podczas wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji.


Możliwość podłączenia T-DOC

Seria Getinge 46 jest przystosowana do podłączenia do Getinge T-DOC - komputerowego systemu zapewnienia jakości, śledzącego i dokumentującego cały proces. System ten jest znacznie wygodniejszy i pewniejszy w użytkowaniu niż system oparty na dokumentach papierowych a ponadto jest tak skuteczny, że pozwala na szybki zwrot inwestycji. T-DOC daje możliwość przechowywania wszystkich danych procesów jednocześnie ze wszystkich urządzeń. W rezultacie daje to możliwość przeanalizowania i sprawdzenia danego procesu w każdej chwili na podstawie wykresu graficznego lub danych liczbowych. Szybko, bezpiecznie i w prosty sposób !

GETINGE 46-2

DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I PRZYCHODNI

Myjnia-dezynfektor Getinge 46-2 została specjalnie zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania oddziałów szpitalnych. Można w niej myć i dezynfekować, na dwóch poziomach, będące w obiegu wyposażenie wielorazowego użytku i narzędzia, łącznie z cylindrycznymi. W celu zoptymalizowania pojemności urządzenia można zastosować specjalne, poniższe wyposażenie dodatkowe.

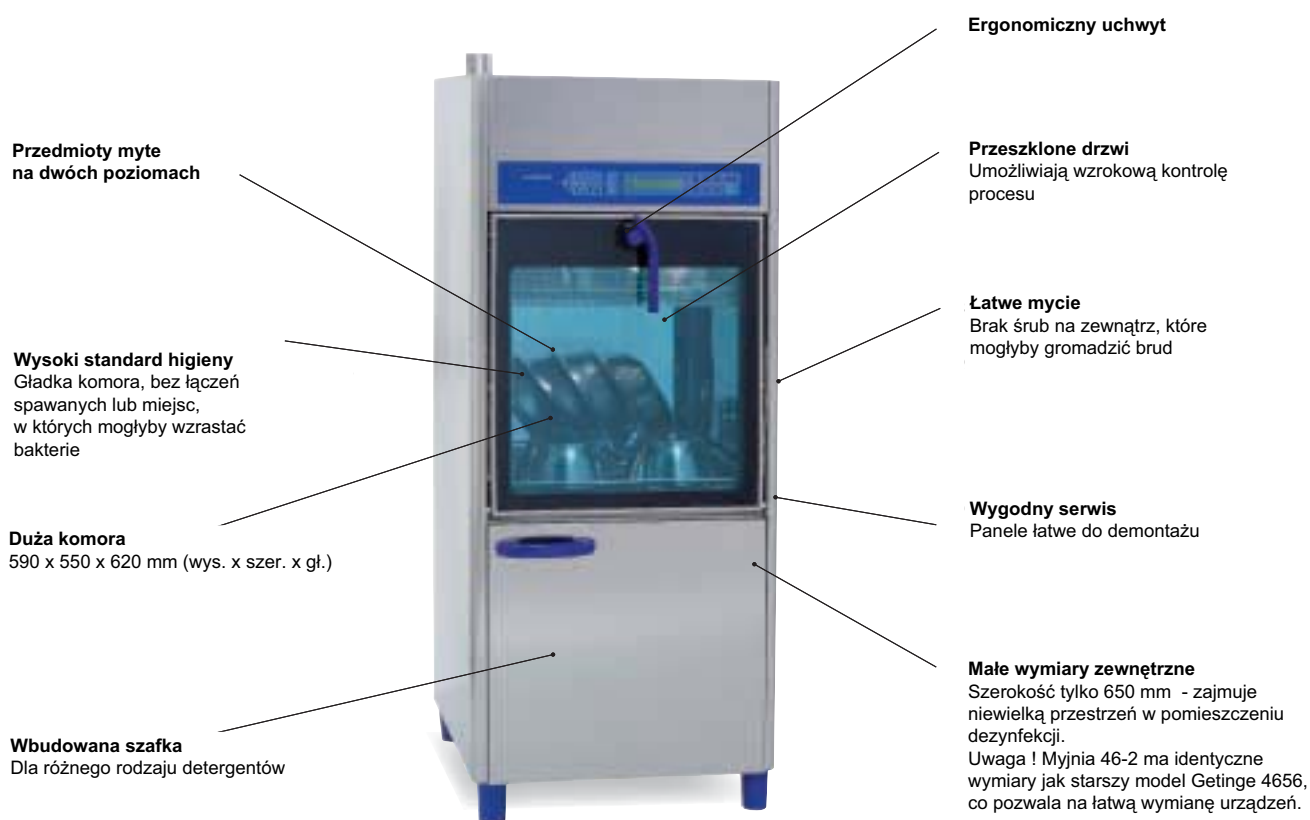

Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego Oferujemy wiele wydajnych i oszczędzających czas akcesoriów do serii Getinge 46. Wybrane prezentujemy w niniejszej broszurze, pełna oferta znajduje się w „Katalogu wyposażenia dodatkowego serii Getinge 46. Zwracamy uwagę na fakt, że wyposażenie starszego modelu 4656 pasuje do nowej myjni serii 46.



Miski, 2 poziomy



Butelki do karmienia niemowląt



Dolny wózek wsadowy w kształcie litery L, z injektorem

GETINGE 46-4

DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

Myjnia-dezynfektor Getinge 46-4 została specjalnie zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania bloków operacyjnych i mniejszych działów centralnej sterylizacji. Przedmioty każdego rodzaju można myć i dezynfekować na czterech poziomach mycia. Każdy poziom, składający się z demontowalnej półki i ramienia spryskującego, może być przystosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Instrumenty o kształcie cylindrycznym mogą być umieszczone w wózku wsadowym MIS wyposażonym w podłączenia nawet do 80 instrumentów. Wózek wsadowy AN ma pojemność 4-6 zestawów AN z maksymalnie 12 węzami.

Ergonomiczny uchwyt

Wysoki standard higieny

Gładka komora, bez łączeń spawanych lub miejsc, w których mogłyby wzrastać bakterie

Przedmioty myte na czterech poziomach

Duża komora
590 x 550 x 620 mm
(wys. x szer. x gł.)

Małe wymiary zewnętrzne

Szerokość tylko 650 mm - zajmuje niewielką przestrzeń w pomieszczeniu dezynfekcji.
Uwaga ! Myjnia 46-4 ma identyczne wymiary jak starszy model Getinge 4656, co pozwala na łatwą wymianę urządzeń.

Unikalny system suszenia

- Efektywny, szybki i energooszczędny
- Wyjątkowo szybkie rozgrzewanie grzałek
- Energooszczędny wymiennik ciepła

Przeszkłone drzwi

Umożliwiają wzrokową kontrolę procesu

Łatwe mycie

Brak śrub na zewnątrz, które mogłyby gromadzić brud

Wygodny serwis

Panele łatwe do demontażu

Wbudowana szafka

Dla różnego rodzaju detergentów



Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego Oferujemy wiele wydajnych i oszczędzających czas akcesoriów do serii Getinge 46. Wybrane prezentujemy w niniejszej broszurze, pełna oferta znajduje się w „Katalogu wyposażenia dodatkowego serii Getinge 46”. Zwracamy uwagę na fakt, że wyposażenie starszego modelu 4656 pasuje do nowej myjni serii 46.



Wózek wsadowy, 4 poziomy mycia



**Uniwersalny wózek wsadowy
i podstawowy wózek górny**



Wózek do sprzętu AN

GETINGE 46-5

DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENTRALNYCH STERYLIZATORNI

Myjnia-dezynfektor Getinge 46-5 została specjalnie zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania większych bloków operacyjnych i centralnych sterylizatori. Przedmioty każdego rodzaju można myć i dezynfekować na pięciu poziomach mycia.

Każdy poziom, składający się z demontowalnej półki i ramienia spryskującego, może być przystosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Instrumenty o kształcie cylindrycznym mogą być umieszczone w wózku wsadowym MIS wyposażonym w podłączenia nawet do 80 instrumentów. Wózek wsadowy AN ma pojemność 4-6 zestawów AN z maksymalnie 12 węzami.

Unikalny system suszenia

- Efektywny, szybki i energooszczędny
- Wyjątkowo szybkie rozgrzewanie grzałek
- Energooszczędny wymiennik ciepła

Przedmioty myte na pięciu poziomach

Wysoki standard higieny

Gładka komora, bez łączeń spawanych lub miejsc, w których mogłyby wzrastać bakterie

Duża komora

660 x 550 x 620 mm
(wys. x szer. x gł.)

Małe wymiary zewnętrzne

Szerokość tylko 650 mm - zajmuje niewielką przestrzeń w pomieszczeniu dezynfekcji.

Uwaga ! Myjnia 46-2 ma identyczne wymiary jak starszy model Getinge 4656, co pozwala na łatwą wymianę urządzeń.

Ergonomiczny uchwyt

Przeszkłone drzwi

Umożliwiają wzrokową kontrolę procesu

Łatwe mycie

Brak śrub na zewnątrz, które mogłyby gromadzić brud

Wygodny serwis

Panele łatwe do demontażu

Wbudowana szafka

Dla różnego rodzaju detergentów



Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego Oferujemy wiele wydajnych i oszczędzających czas akcesoriów do serii Getinge 46. Wybrane prezentujemy w niniejszej broszurze, pełna oferta znajduje się w „Katalogu wyposażenia dodatkowego serii Getinge 46. Zwracamy uwagę na fakt, że wyposażenie starszego modelu 4656 pasuje do nowej myjni serii 46.



Wózek wsadowy, 5 poziomów mycia



Wózek do kontenerów



Wózek do narzędzi mikrochirurgicznych



Getinge dostarcza kompletne rozwiązania do efektywnego i wydajnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji w opiece zdrowotnej i sektorach przemysłu medycznego. Nasza wiedza jest kompromisem wszystkiego od planowania architektury, produkcji i urządzeń do systemów z pełną kontrolą obiegu materiałów sterylnych. Nasze zobowiązanie obejmuje ekspercką poradę, szkolenie i długoterminową pomoc techniczną.

GRUPA FIRM GETINGE jest wiodącym światowym dostawcą wyposażenia i systemów przyczyniających się do podnoszenia jakości i wydajności w opiece zdrowotnej i przemyśle medycznym. Wyposażenie, serwis i technologie są dostarczane pod markami: **ArjoHuntleigh** sprzęt wykorzystywany w opiece długoterminowej, higienie i dezynfekcji, diagnostyce, łóżka szpitalne, materace przeciwoślizgowe, zapobieganie zapaleniom żył głębokich; **GETINGE** zapobieganie i kontrola zakażeń w opiece zdrowotnej i przemyśle medycznym oraz **MAQUET** stoly operacyjne, respiratory i intensywna opieka medyczna.

Getinge Poland Sp. z o.o.
ul. Lirowa 27, 02-387 Warszawa
Telefon: +48 22 882-06-26 ÷ 28
Fax: +48 22 882-24-52
E-mail: info@getinge.pl
www.getinge.pl

Autoryzowany dealer:
KTG SEMIGAT S.A.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Tel. / fax: +48 22 619-86-13
+48 22 818-57-08
E-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.com.pl