

# GETINGE

GETINGE SERIA 600  
MYJNIE-DEZYNFEKTORY ŁADOWANE OD GÓRY



# URZĄDZENIE ŁATWE DO OBSŁUGI ? NAJLEPSZA TECHNOLOGIA ? MOŻESZ MIEĆ WSZYSTKO !

Zaprojektowanie urządzeń do dezynfekcji tak, aby były łatwe w obsłudze i technicznie doskonałe, nie jest łatwym zadaniem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy zdobywanej bezpośrednio na szpitalnych oddziałach łóżkowych i chirurgicznych na całym świecie, Getinge jest dzisiaj światowym liderem w tej dziedzinie. Przykładem może być takie rozwiązanie techniczne jak Getinge 600 - seria wyjątkowo łatwych w obsłudze myjni-dezynfektorów, w których zastosowano najnowocześniejsze technologie mycia i dezynfekcji. Na tych stronach przedstawiamy więcej szczegółów tego rozwiązania.

## Wszystkie myjnie-dezynfektory serii

Getinge 600 są ładowane od góry i mogą być używane do:

- opróżniania (tradycyjny zlew do nieczystości ze splukiwaniem)
- mycia i dezynfekcji

Eliminuje to konieczność posiadania w brudowniku oddzielnego urządzenia do opróżniania naczyń oraz oddzielnego urządzenia do dezynfekcji naczyń, co oszczędza czas, miejsce i koszty. Pełny proces - od opróżnienia do mycia i dezynfekcji - trwa tylko 4-7 minut.

## Łatwość obsługi

Ładowane od góry myjnie-dezynfektory serii Getinge 600 zostały zaprojektowane tak, że przednia część urządzenia jest niższa niż jego tył. W związku z tym komora jest pochylona, otwiera się do góry co ułatwia jej załadunek, opróżnianie i kontrolę.

## Wygodny pedał nożny to standard

Aby obsługa i manipulowanie obrabianymi artykułami były wygodniejsze i aby uniknąć zabrudzenia czystych rąk, każdy model myjni serii Getinge 600 wyposażony jest w pedał nożny do otwierania i zamykania pokrywy. Pedał może być również używany do rozpoczęcia najczęściej używanego programu.


## Najlepsze mycie i dezynfekcja

Z serią Getinge 600 uczyniliśmy mycie i dezynfekcję bardziej efektywnymi i skutecznymi niż kiedykolwiek inny. Mocno zabrudzone naczynia myte są przy pomocy dysz obrotowych i silnego strumienia wody. Następnie naczynia dezynfekowane są parą doprowadzaną wszystkimi dyszami.


Zapewniona jest również dezynfekcja wnętrza butelek i innych podobnych naczyń. Ale nie tylko mycie i dezynfekcja naczyń jest korzyścią którą daje myjnia serii Getinge 600. Po każdym procesie - dzięki Systemowi Dezynfekcji Orurowania (PSD - Pipe System Disinfection) - dezynfekowane są również komora, orurowanie, dysze i inne elementy myjni. Oznacza to, że między procesami nie pozostają żadne pozostałości mikrobiologiczne, przez co zachowana zostaje najwyższej jakości higiena.

## Automatyczne suszenie

Po zakończeniu procesu mycia/dezynfekcji pokrywa uchyla się automatycznie na wysokość ok. 10 cm. Przyspiesza to suszenie dzięki czemu wsad staje się suchy i wystudzony w bardzo krótkim czasie. Zapalenie się zielonej lampki i uchylona pokrywa to sygnał, że w komorze znajdują się czyste, gotowe do użycia naczynia.

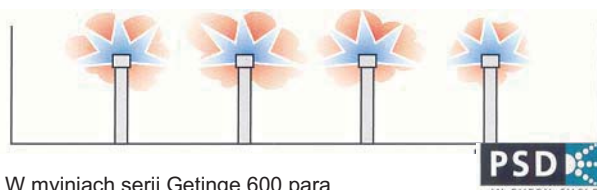


W myjniach serii Getinge 600 para doprowadzana jest przez poszczególne dysze bezpośrednio do każdego mytego naczynia.

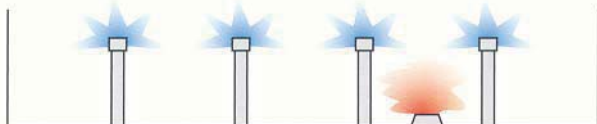

Klasyczne myjnie-dezynfektory wyposażone są w jedną centralną dyszę do pary, która następnie musi znaleźć drogę do wnętrza butelek i innych naczyń.



Pedał nożny stanowi standardowe wyposażenie.

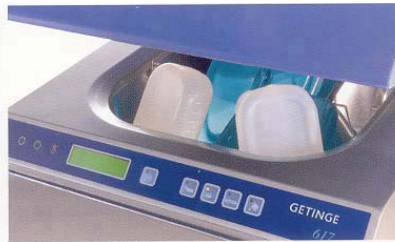

Automatyczne suszenie.



Po naciśnięciu pedału pokrywa otwiera się całkowicie.

**Pochylona komora**  
- ułatwia załadunek, rozładunek i kontrolę mytych przedmiotów

**Tradycyjny zlew**  
do usuwania nieczystości, z funkcją ręcznego spłukiwania

**Głęboko tłoczona z jednego kawałka materiału komora myjni**  
- minimalizuje ryzyko pozostawania zanieczyszczeń w miejscach łączenia lub innych zakamarkach

**Dezynfekcja najwyższej jakości**  
- nawet wewnętrznych powierzchni naczyń, ponieważ para jest doprowadzana wszystkimi dyszami



Płuczka-dezynfektor seria 600	
Objętość komory L	70
Wysokość komory	400
Szerokość komory	465
Głębokość komory	380

**W wersji stojącej lub wiszącej**  
- w obu wersjach możliwość łatwego czyszczenia podłogi pod myjnią

**Pedał nożny (standard)**  
- do obsługi pokrywy, zapobiega zanieczyszczeniu czystych rąk





## FUNKCJA OBROTU DO AUTOMATYCZNEGO OPRÓŻNIANIA

Automatycznie opróżnia butle do ssaków, baseny, itp. Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów oraz rozpryskiwaniu się na zewnątrz zawartości komory, naczynia są opróżniane dopiero po zamknięciu pokrywy (odbywa się to automatycznie).



**Uchwyt do butli do ssaków**  
2-5 litrów. Nr kat. 500 44 00-00



**Dodatkowy uchwyt do butli ssaków**  
0,7 l. Nr kat. 500 77 200  
Pasiuie do uchwytu nr kat. 500 44 00-00



**Uchwyt do basenu**  
Nr kat. 499 95 72-00


DODATKOWE OPCJE Opróżnianie automatyczne	
Dolny wkład	nr kat. 500 11 39-00
Regał wsadowy na utensylia	nr kat. 499 96 10-00
Sprężyna	nr kat. 499 11 16-00
Dodatkowy wtryskiwacz	nr kat. 500 06 33-00
Uchwyt do butli do ssaków 2-5 l	nr kat. 500 44 00-00
Nasadka do małych butli do ssaków 0,7/1,2/2,0 l, Egne1 Madiada i Meddela Dostosowana do uchwytu	nr kat. 500 07 72-00 nr kat. 500 44 00-00
Uchwyt do jednego okrągłego basenu	nr kat. 499 95 72-00
Uchwyt do jednego okrągłego basenu i jednej kaczki	nr kat. 501 14 05-00

DODATKOWE OPCJE Opróżnianie manualne	
Nasadka do małych kaczek Dostosowana do uchwytu	nr kat. 500 26 57-00 nr kat. 501 14 05-00
Nasadka do butli do ssaków 2 l / zlewki Dostosowana do uchwytu	nr kat. 501 13 70-00 nr kat. 501 14 05-00
Uchwyt do trzech kaczek	nr kat. 499 96 10-00
Regał wsadowy do utensyliów	nr kat. 499 96 10-00
Sprężyna	nr kat. 499 11 16-00
Dodatkowy wtryskiwacz	nr kat. 500 06 33-00
Nasadka do butli do ssaków	nr kat. 499 99 99-00

## SERIA GETINGE 600 NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

### Przykładowy załadunek

Uchwyt uniwersalny  
Dla ręcznego opróżniania

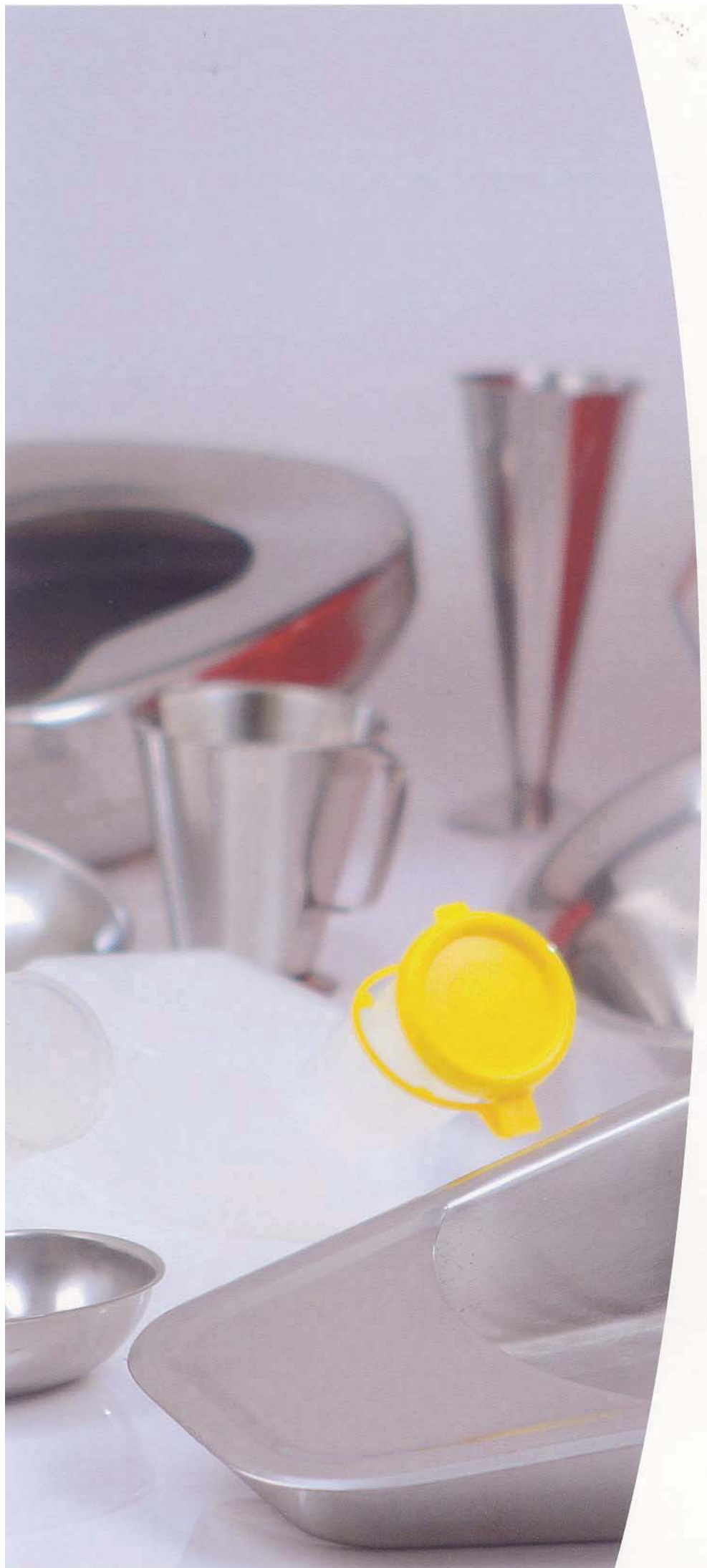



## SERIA GETINGE 600 NA BLOKU OPERACYJNYM



### Przykładowe załadunki



Uchwyty uniwersalny  
Wyposażenie standardowe



Uchwyt do butli do ssaków  
Do systemu automatycznego obrotu  
Nr kat. 500 44 00-00



Getinge dostarcza kompletne rozwiązania do efektywnego i wydajnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji w opiece zdrowotnej i sektorach przemysłu medycznego. Nasza wiedza jest kompromisem wszystkiego od planowania architektury, produkcji i urządzeń do systemów z pełną kontrolą obiegu materiałów sterylnych. Nasze zobowiązanie obejmuje ekspercką poradę, szkolenie i długoterminową pomoc techniczną.

GRUPA FIRM GETINGE jest wiodącym światowym dostawcą wyposażenia i systemów przyczyniających się do podnoszenia jakości i wydajności w opiece zdrowotnej i przemyśle medycznym. Wyposażenia, serwis i technologie są dostarczane pod markami: **ArjoHuntleigh** sprzęt wykorzystywany w opiece długoterminowej, higienie i dezynfekcji, diagnostyka, łóżka szpitalne, materace przeciwośluzowe, zapobieganie zapaleniom żył głębokich; **GETINGE** zapobieganie i kontrola zakażeń w opiece zdrowotnej i przemyśle medycznym oraz **MAQUET** stoly operacyjne, respiratory i intensywna opieka medyczna.

Getinge Poland Sp. z o.o.  
ul. Lirowa 27, 02-387 Warszawa  
Telefon: +48 22 882-06-26 + 28  
Fax: +48 22 882-24-52  
E-mail: [info@getinge.pl](mailto:info@getinge.pl)  
[www.getinge.pl](http://www.getinge.pl)

Autoryzowany dealer:  
KTG SEMIGAT S.A.  
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa  
Tel. / fax: +48 22 619-86-13  
+48 22 818-57-08  
E-mail: [semigat@semigat.pl](mailto:semigat@semigat.pl)  
[www.semigat.com.pl](http://www.semigat.com.pl)