

PulmoGain

Przeznaczony jest do ćwiczenia głębokich wdechów dla osób mających kłopoty z oddychaniem.

Trenażer oddechu Pulmo-Gain składa się z:

- trzech przezroczystych komór wykonanych z kopolimerów i nietoksycznych polistyrenów (oznaczone kolejno 600, 900 i 1200 cm³ wydechanej powietrza/sekundę)
- podstawa wykonana z nietoksycznego polipropylenu
- 3 kulki wykonane z nietoksycznego polipropylenu
- 1 przewód z ustnikiem wykonany z polietylenu
- 1 filtr powietrza



Instrukcja użycia

1. Podłącz przewód z ustnikiem do trenażera.
2. Trzymaj PulmoGain na wysokości ust w pozycji pionowej.
3. Zrób wdech przez ustnik tak, aby unieść 2-3 kulki.
4. Spróbuj utrzymać wdech tak długo, jak to możliwe.
5. Po zakończeniu wdechu, wyjmij ustnik i oddychaj normalnie.
6. Powtórz ćwiczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czyszczenie

1. Po użyciu dokładnie umyj wszystkie elementy trenażera za pomocą wody z mydłem.
2. Filtr powietrza należy wymieniać po 10-15 dniach używania.

Uwaga

1. Używaj trenażera PulmoGain zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Oznaczenie CE, wyrób klasy I, niesterylny, bez funkcji pomiarowej