

# POCZUJ REALIZM MACIERZY STWA



Poznaj wyjątkowe produkty, zaprojektowane specjalnie z myślą o przyszłych rodzicach, by już dziś, dzięki zaawansowanej technologii symulacji mogli zobaczyć, poczuć i poznać to, co niesie ze sobą macierzyństwo.



**Realityworks**  
Live it. Learn it.

## Real Care Baby II - symulator niemowlęcia

Niezwykle realistyczny manekin ze wszystkimi możliwymi zachowaniami typowymi dla niemowlęcia i programem, który nie wymaga nadzoru instruktora. Wiczy autentycznie karmi, kołyszy, trzymaj dziecko „do odbicia” i zmieniaj mu pieluszkę. Płacze, oddycha, kaszle i gaworzy jak prawdziwe.

Proste programowanie funkcji i zachowań.

Manekin RealCare Baby II jest programowany w czterech prostych krokach.

W trzech krokach ustawia się moduł sterujący, jeden krok to programowanie „Dziecka”. Jeśli nie trzeba zmieniać ustawień, programowanie „Dziecka” ogranicza się do jednego kroku!

- Ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia symulacji na 7 dni do przodu
- Wybór poziomu opieki: trudna, średnia, łatwa lub ustawiona przez programującego
- 15 programów opieki z możliwością indywidualnego programowania poziomu trudności (łatwy, średni, trudny) przez instruktora
- Tryby pokazu i wicze oraz proste uruchomienie funkcji: karmienie, „odbijanie”, zmiana pieluszek, kołysanie, nieprawidłowość w opiece, podparcie główki, zadowolenie i odgłosy snu
- Możliwość ustawienia do trzech okresów ciszy lub wprowadzenie, na przykład trybu opieki dziennej (np. gdy dziecko jest w łóżku)
- Prosty sposób sprawdzania nowych ustawień - szybkie przejście do ekranu odczytu na wyświetlaczu modułu sterującego oraz skierowanie go w stronę „Dziecka” pozwala odczytać wszystkie zaplanowane szczegóły.

Odczyt wyników. Prosta i przejrzysta klasyfikacja i ocena.

- Przekaz danych z komputera bezpośrednio do rodzinnego modułu sterującego
- Raport ukazujący procentowo poprawność opieki, która może być skorelowana z późniejszymi ocenami
- Rejestracji podlegają wszystkie popełnione błędy w opiece wraz z czasem i długością ich wypełnienia, co umożliwia szczegóły ocen.

Program zgodny ze standardami.

Manekin dostarczany jest wraz z programem zgodnym ze standardami nauczania opieki nad niemowlętami. Każde dziecko na początku zawiera listę potrzebnych materiałów, przybliżony czas, informacje dla instruktora oraz przejrzyste instrukcje dla wszystkich czynności. Programy opieki bazują na schematach zachowań prawdziwych niemowląt.

Model jest prawidłowy anatomicznie, ma 53 centymetry długości i waży ok. 3,2 kg. Dostępny jest w 5 grupach etnicznych i 6 odcieniach skóry. Waga dziecka jest równomiernie rozłożona, co daje realistyczne poczucie trzymania niemowlęcia na rękach.

Typowy dla niemowlęcia strój jest estetyczny i bardzo funkcjonalny. Ubranie z kapturem i rękawiczkami zabezpiecza skórę manekina przed zabrudzeniami, zmniejszając do minimum czynności konserwacyjne.

Ruchoma głowa porusza się na boki, do przodu i do tyłu odzwierciedlając fizjologiczne zachowanie niemowlęcia.

Odgłosy oddechowe w czasie snu pozwalają stwierdzić, że „Dziecko” ma dobrą kondycję biopsychiczną.

Bezprzewodowy system identyfikacji opiekuna oznacza łatwiejszą i bardziej realistyczną opiekę. Niemowlę potrzebuje tylko obecności właściciela, która ma się nim opiekować.



Przy zamówieniu RealCare Baby II można wybrać płeć oraz grupę etniczną, manekin ubrany jest w dwuczęściowy strój i ma założone materiały pieluszkowe z zielonymi wstawkami identyfikacyjnymi.

Zestaw RealCare Baby II zawiera:

- Ubranko
- Pieluszki
- Butelki
- Identyfikatory opiekunów
- Opaski na przegub
- świadectwo urodzenia
- Kartę opieki studenta
- Zestaw zasilający

Każdy pakiet zawiera:

- Moduł sterujący
- Baterie
- Program prawidłowej opieki
- Instrukcję obsługi
- Film instruktażowy
- Kluczyk serwisowy
- Czujnik karmienia piersi



## Pregnancy Profile® - Kamizelka Ciężarna

Kamizelka ciężarna służy do noszenia jako część garderoby wizualizująca i odzwierciedlająca rzeczywiste odczucia kobiety w trzecim trymestrze ciąży. Symuluje zwiększone parcie na pęcherz moczowy, ograniczenia w oddychaniu, ruchy płodu, ucisk kości czepnej płodu, efekt przyrostu wagi, nieznaczne ruchy i ucisk w dole pleców.

Właściwości:

- Jeden rozmiar kamizelki z mieszanki poliestru i bawełny
- Mocowanie do barków za pomocą szerokich, regulowanych pasów
- Regulowane szybkomocujące klamry do mocowania wokół tułowia
- Obciążniki boczne z dwoma 100 gramowymi plastikowymi wkładkami i zamkami ciętymi na rzepy symulują nacisk kości czepnej płodu i trudność w oddychaniu
- Winyłowy pęcherz wodny całkowicie wypełniony dodaje ponad 11 kg wagi, symuluje łagodne kopanie płodu i ucisk na pęcherz
- Wygodny dostęp do pęcherza wodnego z przodu
- Granatowy kolor ukrywa zabrudzenia i plamy
- Powiększone piersi i brzuch

W zestawie: kamizelka z obciążnikami i pęcherzem wodnym, koszulka z haftem do założenia na kamizelkę, trwałe i lekkie nylonowe torby z paskami na ramiona, program z instrukcją obsługi kamizelki i laminowany diagram rozwoju płodu w czasie ciąży, 2 lata gwarancji





## Manekin z Alkoholowym Syndromem Płodowym

Manekin niemowlcia pokazujący wpływ spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży na powstanie Alkoholowego Syndromu Płodowego (FAS).

### Właściwości:

- Prawidłowa anatomicznie dziewczynka
- Obecność szczeliny pomiędzy środkowymi i serdecznymi palcami
- Głowa przedstawiająca typowe defekty kojarzone z FAS, włącznie z małogłowieciem, małymi szparami powiekowymi, małym nosem i charakterystycznymi małymi uszami

W zestawie: manekin z FAS o jasnej lub ciemnej karnacji, kocyk do owijania niemowlcia, pieluszkę, pełny zestaw materiałów instruktażowych w języku angielskim i polskim, film szkoleniowy ukazujący powody i skutki FAS, 12 miesięczną gwarancję



## Manekin pokazujący efekt głodu narkotycznego

Precyzyjny w najdrobniejszych szczegółach model elektroniczny niemowlcia z efektami głodu narkotycznego powstałego na skutek zażywania narkotyków w okresie ciąży.

### Właściwości:

- Prawidłowa anatomicznie dziewczynka
- Dystroficzne kości oraz cierpiący wyraz twarzy
- Realistyczne powstawanie drgawek w określonych odstępach czasowych
- Przerwy w płaczu (autentyczne nagranie)
- Wskaźnik słabych baterii i automatyczne wyciszenie po 20 minutach ciągłej aktywności

W zestawie: manekin o jasnej lub ciemnej karnacji, kocyk do owijania niemowlcia, pieluszkę, zestaw materiałów instruktażowych, 4 baterie AA, 12 miesięczną gwarancję



## Shaken Baby - manekin z Zespołem Dziecka Potrząsanego

Naturalnej wielkości symulator niemowlcia z ruchomą głową wyposażony w zaawansowany system elektroniczny umożliwiający obserwację procesu uszkodzenia poszczególnych części mózgu wywołanego potrząśnięciem.

### Właściwości:

- Diody LED sygnalizujące uszkodzenia kolejnych części mózgu
- Przerwy w płaczu, który w miarę potrząśnięcia nagle ustaje

W zestawie: symulator z bateriami, koszulka, pieluszkę, kocyk, 12 miesięczną gwarancję, materiały szkoleniowe: podręcznik instruktora z kompletnym programem szkoleniowym Ulotki: "Przyrzekam nie trząść dzieckiem" - 35 szt., „Mój plan jak poradzi sobie z frustracją” - 35 szt., zestawy testów przed i po przeprowadzeniu programu szkoleniowego - 35 szt.



**Realityworks**  
Live it. Learn it.

Producent: Realityworks, Inc.  
2709 Mondovi Road  
Eau Claire, WI 54701-6175  
USA

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

**LMP Sp. z o.o.**

BIURO GŁÓWNE:  
ul. Kolisty 25  
40-486 KATOWICE  
tel. 0-32 735 04 61  
fax 0-32 735 03 14

BIURA REGIONALNE:

BIĄŁYSTOK  
tel./fax 0-85 710 44 35

POZNAŃ  
tel./fax 0-61 899 82 01