

BOWIE & DICK

EuroTest®

wysoka jakość i opłacalność w jednym...

EuroTest® to gotowy do użycia pakiet testowy **Bowie & Dick** wyprodukowany przez Sterlab w oparciu o wiedzę wypracowaną na podstawie grupy **Bodipack®** i **Quickise®**.




Mając świadomość ograniczeń budżetowych w systemie opieki zdrowotnej, został stworzony i opracowany **EuroTest®** obniżający koszty z jednoczesnym zachowaniem wysokich standardów jakości.

Po zakończeniu cyklu sterylizacji należy otworzyć opakowanie i wyjąć z niego arkusz testowy.



EuroTest	
Temperatura	134 °C
Czas	3,5 min
	lub
Temperatura	121 °C
Czas	15 min
Norma	ISO 11140-4
Nr ref.:	303
Pudełko:	50 szt.
Karton:	4 pudełka

INTERPRETACJA WYNIKÓW

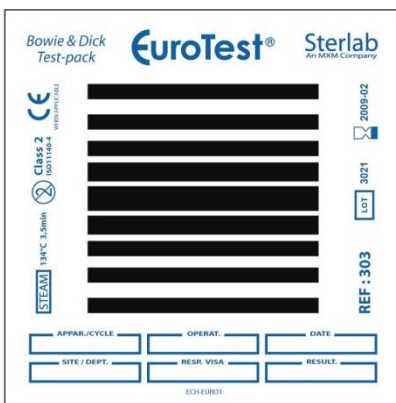

Odpowiednie pola umożliwiają wpisanie danych identyfikacyjnych.



Wynik pozytywny

Tusz reakcyjny (przed użyciem w kolorze żółtym) zmienił barwę na jednolity czarny kolor.



Wynik negatywny

Na arkuszu testowym pojawia się odbarwienie (w kolorze żółtym /brązowym) (zazwyczaj pośrodku). Odbarwienie to

sygnalizuje obecność powietrza w komorze bądź problem z jakością pary wodnej.

semigat sa

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl