



WSKAŹNIKI EMULACYJNE kl.6


STERIPOINT®




 **STERIPOINT®** jest wskaźnikiem emulacyjnym klasy 6 do cykli sterylizacji parowej o parametrach 121°C - 134°C.



 **STERIPOINT®** został opracowany i wyprodukowany przez Sterlab z zastosowaniem wysokiej jakości nietoksycznego tuszu.

 **STERIPOINT®** charakteryzuje:

- wysoka precyzja określania czasu zmiany barwy w trakcie sterylizacji
- czytelność wyniku
- powtarzalność

 **STERIPOINT®** wykonany jest z małych pasków z naniesionym fioletowym tuszem reaktywnym, który podczas sterylizacji zmienia barwę na zieloną integrując 3 parametry sterylizacji parowej.

- sucha nasycona para
- temperatura
- czas

 Zmianę barwy wskaźnika **STERIPOINT®** powstrzymuje połączenie pary z powietrzem lub gazem ewentualnie gdy jeden z trzech parametrów cyklu jest niewystarczający.

Reaktywny tusz jednoznacznie zmienia barwę z fioletowej na zieloną, gdy spełnione są odpowiednie parametry czasu, temperatury i jakości pary



STOP



OK

134°C 3,5 min
121°C 15min

Pudełko 250szt.
Ref: 28635

134°C 5,3 min
121°C 15min

Pudełko 250szt.
Ref: 28653

134°C 7 min
121°C 20min

Pudełko 250szt.
Ref: 28607

134°C 18 min

Pudełko 250szt.
Ref: 28618

Pudełko 2000szt.
Ref: 28035

Pudełko 2000szt.
Ref: 28053

Pudełko 2000szt.
Ref: 28007

Pudełko 2000szt.
Ref: 28018



semigat sa

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl