

# WSKAŹNIK ARKUSZOWY BOWIE & DICK


## Wimpy Bowie & Dick

Arkuszowy wskaźnik do stosowania w teście Bowie-Dick.  
Przeznaczony do codziennego użytku w sterylizatorach wykorzystujących metodę wstępnej próżni.  
Ma na celu zbadanie skuteczności penetracji pary i/lub wykrycie błędów pompy próżniowej.




**Przed sterylizacją**

Oryginalny żółty kolor

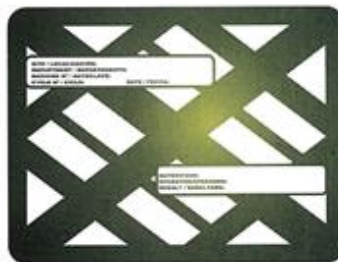

**Wyniki  
nieprawidłowe**

Brak jednolitego koloru czarnego świadczy o obecności powietrza bądź zbyt niskiej temperaturze w rejonie nieodbarwionym

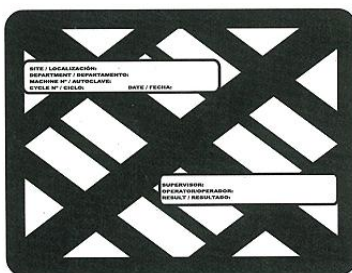

**Wynik prawidłowy**

Jednolity czarny kolor świadczy o prawidłowym przebiegu procesu sterylizacji

Stosowanie:

- należy umieścić wewnątrz standardowego opakowania ręcznikowego
- dla parametrów: 134°C 3,5 min oraz 121°C 15 min

Cechy produktu:

- zgodność z normą ISO 11140-3 klasa 2
- nieszkodliwy dla zdrowia
- bez zawartości ołowiu, innych metali ciężkich i substancji toksycznych
- format A4 (210x297 mm)

Przechowywać:

- w suchym, chłodnym miejscu

### WIMPY BOWIE & DICK

Arkuszowe wskaźniki Bowie & Dick	kl. 2
Przedział Temp.:	134°C – 3,5min oraz 121°C – 15min
Symbol katalogowy	01-1011
Opakowanie:	50 szt.

**semigat sa**

**KTG SEMIGAT SA**

ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa, Polska  
Tel./faks: 22/ 619-86-13  
e-mail: semigat@semigat.pl  
www.semigat.pl