


DROPLET®

Bezpieczeństwo i komfort przede wszystkim

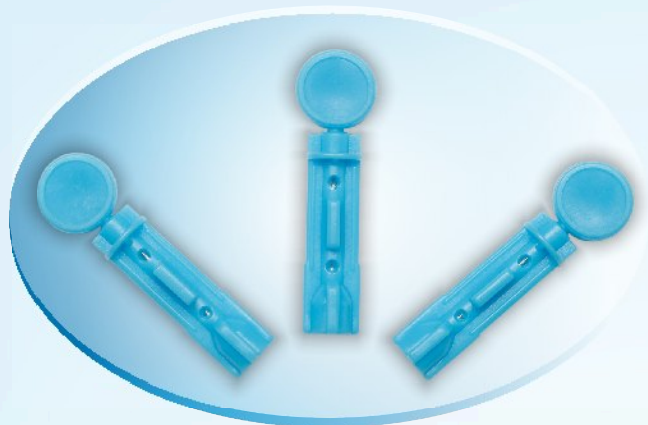

Uniwersalny lancet personalny Droplet®

- **Bardzo cienki** – lancet Droplet® posiada pokrytą silikonem, bardzo cienką igłę, która nie powoduje uszkodzeń tkanki skórnej.
- **Optymalny** – dzięki swojej konstrukcji lancet Droplet® pozwala na pobranie właściwej mikropróbki krwi przy minimalnym odczuciu bólu. Wystarczy tylko jedno nakłucie.
- **Bezpieczny** – lancety Droplet® są sterylizowane promieniami Gamma. Posiadają również specjalną osłonkę na igłę tzw. dysk zabezpieczający, chroniący przed przypadkowym nakłuciem.
- **Uniwersalny kształt** – lancety Droplet® mogą być używane z najbardziej popularnymi urządzeniami nakłuwającymi dostępnymi na rynku.


Odpowiednia próbka krwi przy minimalnym odczuciu bólu

- Średnica igły: 28G (0.36 mm)
- Igła lancetu Droplet® wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej przeznaczonej do produktów medycznych.
- Oszlifowane w trzech płaszczyznach ostrze igły lancetu Droplet® jest elektropolerowane i pokrywane silikonem. Dzięki temu pobieranie próbek krwi staje się delikatne i niemal bezbolesne dla pacjenta.
- Odpowiednia długość igły pozwala za każdym razem zachować pełną kontrolę nad głębokością nakłucia.



Bezbolesne nakłucie, maksymalny komfort

Lancety Droplet® stanowią niezbędne narzędzie przy pobieraniu mikropróbek krwi. Szczególnie polecane są do samodzielnego pomiaru glukozy przez pacjentów chorych na cukrzycę.

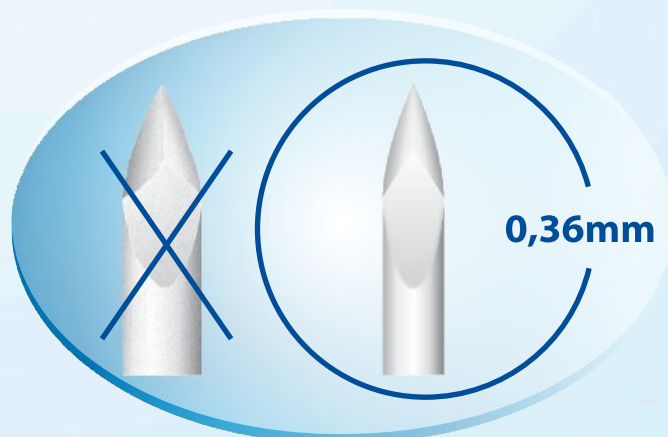


DROPLET®

Bezpieczeństwo i komfort przede wszystkim

Instrukcja obsługi

Lancety Droplet® mogą być używane z większością urządzeń nakłuwających dostępnych na rynku. Są bardzo proste i wygodne w obsłudze. Prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia nakłuwającego.

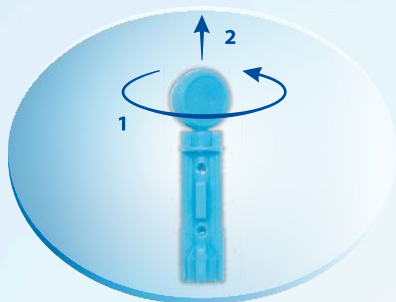

- ➔ Umieść lancet **Droplet®** w urządzeniu nakłuwającym, a następnie ruchem obrotowym usuń dysk zabezpieczający - (1) i (2).
- ➔ Wykonaj nakłucie.
- ➔ Po użyciu wbij prostopadle igłę lancetu **Droplet®** w dysk zabezpieczający, aby bezpiecznie go zutylizować - (3).



Dane techniczne i informacja dla zamawiających

Lancety Droplet® dostępne są w trzech różnych, wygodnych dla pacjentów opakowaniach.



NR KAT.	PRODUKT	OPAKOWANIE
7105	Droplet® 28G	200 sztuk
7106	Droplet® 28G	100 sztuk
7104	Droplet® 28G	3500 sztuk

Materiał igły: Stal chirurgiczna

Średnica igły: 28G (0.36 mm)

Materiał korpusu: Polietylen niskiej gęstości

Kolor korpusu: Niebieski. Nie zawiera kadmu

Długość korpusu: 26.00 mm (+/-0.35 mm)

Sterylność: Promienie Gamma, min. dawka 25kGy

Okres przechowywania: 5 lat od daty sterylizacji

Nie zawiera lateksu.

W przypadku dodatkowych pytań
lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt:

HTL STREFA
high tech lab



Nr rejestracji PL/DR 013411

HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7, 95-035 Ozorków

Obsługa klienta:

Tel.: 022 811 50 41 • Fax: 022 811 50 47 • E-mail: info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl