

LABOMAT KS (koncentrat)

Preparat płuczący, neutralizujący, nabtyszczający i pielęgnujący narzędzia

Produkt myjący

- Płyn przyjazny dla środowiska – bez zawartości fosforanów.
- Zapewnia nabtyszczający efekt.
- Toksykologicznie nieszkodliwy.

LABOMAT KS jest preparatem do neutralizującego płukania. Jest oparty na bazie naturalnych **kwasów organicznych** (kwas cytrynowy). **Nie zawiera fosforanów**, które nie są obojętne dla środowiska naturalnego oraz surfaktantów. Nietoksyczny. Zapewnia szybkie suszenie opracowywanych narzędzi. Zmiękcza i rozpuszcza również pozostałości kamienia wapiennego (nie stosować do anodyzowanego aluminium, powierzchni chromowanych i niklowanych).

Obszar zastosowania:

Do neutralizacji po użyciu alkalicznego środka czyszczącego (np. LABOMAT MA LIQUID) w automatycznych urządzeniach myjących. **LABOMAT KS** jest przyjazny do narzędzi anestetycznych, chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Właściwy do czyszczenia i płukania obuwia chirurgicznego, butelek dla dzieci, szkła laboratoryjnego w szpitalach i laboratoriach przemysłowych.

Dawka jest podawana automatycznie przez pompy dozujące urządzenia. Dozowanie: neutralizacja - 0,1 - 0,5%, czyszczenie, płukanie – 0,1 – 0,5%.

Uwagi użytkowe:

Przy stosowaniu **LABOMAT KS**, informacje producenta maszyny muszą być przestrzegane. Nie mieszać z innymi produktami, a przy zmianie produktu system dozowania łącznie z węzami ssącymi przemyć wodą. Opracowywanie narzędzi musi być zgodne z zasadami higieny, a postępowanie operatora z odpowiednimi procedurami. Do profesjonalnego zastosowania.

Warunki przechowywania:

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 30°C, nie trzymać na słońcu, przechowywać w suchym miejscu.



Przeznaczenie:

mechaniczna obróbka instrumentów i akcesoriów medycznych

Właściwości chemiczno-fizyczne:

Wygląd: płyn
Zapach: specyficzny
Kolor: jasny, żółtawy
Gęstość 20°C: 1,1129 – 1,1249g/cm³
Wartość pH (18 - 28°C): około 1,0 - 2,3
Załamanie światła 20 C: 1,3645 – 1,3745

Wielkości opakowań:

nr kat. 90160 kanister 5 l (3 szt. w kart.)

Okres przydatności:

3 lata

Producent

Laboratorium Dr. DEPPE
D-47906 Kempen / Niemcy
www.dr-deppe.de

DYSTRYBUTOR

DEZYMED® Kastrau Sp. j.
ul. Armii Krajowej 7/4,
11-300 Biskupiec
tel. 89 7154532 fax 89 7152362
e-mail: biuro@dezymed.pl
internet: www.dezymed.pl