

Instru Sol Forte - koncentrat

Ręczne mycie narzędzi

Rodzaj preparatu: wyrób medyczny klasa I CE 0481

- Nowoczesna i ulepszona formuła sprawdzonego produktu **Instru Sol**
- Antybakteryjny
- Zgodny z wymogami Instytutu Roberta Kocha dla ręcznego mycia wstępnego.
- Bezpieczny i ekonomiczny
- Niskopieniący

INSTRU SOL FORTE to nowy detergent do mycia instrumentów medycznych, narzędzi, akcesoriów laboratoryjnych oraz narzędzi wykonanych z materiałów termolabilnych i termostabilnych. Specjalny dobór związków powierzchniowo czynnych i składników rozpuszczających **usuwa z narzędzi zanieczyszczenia takie jak: krew, białka, wydzieliny, tłuszcz**, ale również inne niż organiczne zanieczyszczenia tj. **biofilmy**.

INSTRU SOL FORTE rozpuszcza i eliminuje trwałe organiczne i inne niż organiczne zanieczyszczenia, również te mocno przylegające jak biofilmy. Doskonale sprawdza się **nawet z zastosowaniem twardej wody**. Bez osadów, zapachów i barwników. Niskopieniący.

Sposób użycia:

0,5 – 1,0% w zależności od stopnia brudu i aplikacji. W razie potrzeby stężenie może zostać zwiększone do 2,0%. Roztwór roboczy może być wykorzystywany wielokrotnie ale musi być regularnie odnawiany.

W normalnych warunkach roztwór roboczy musi być zmieniany 1x2 razy w ciągu dnia. W warunkach zwiększonego obciążenia i użytych niskich stężeniach zaleca się odnawianie roztworu po każdym użyciu.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Instrukcje wskazane przez producentów dotyczące użycia i opracowywania używanych instrumentów, urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia powinny być ściśle przestrzegane.

Zanurzyć instrumenty bezpośrednio po użyciu. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i przestrzenie muszą być przykryte i wypełnione. Dokładnie oczyścić instrumenty z zaschniętych elementów i postępować zgodnie z instrukcją producentów instrumentów. W przypadku mocno zaschniętych zabrudzeń, pozwolić na działanie preparatu **INSTRU SOL FORTE** z użyciem wody w temperaturze pokojowej.

W przypadku stosowania w myjniach ultradźwiękowych przestrzegać częstotliwości i czasu mycia. Unikać temperatury powyżej 45°C.

INSTRU SOL FORTE jest zgodny z aldehydowymi i bezaldehydowymi środkami dezynfekcyjnymi do narzędzi Laboratorium Dr. DEPPE.

Nie zaleca się łączenia preparatu z innymi detergentami i środkami odkażającymi.

INSTRU SOL FORTE powinien być przechowywany najlepiej w temperaturze pokojowej. Do przygotowania roztworu użytkowego należy stosować wodę pitną dobrej jakości. Do płukania końcowego zalecamy wodę demineralizowaną lub sterylną.



Składniki

Niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki, zespół czynników synergistycznych, inhibitory korozji, związki redukujące pianę. Środki pielęgnacyjno-konserwujące

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd: klarowny, lekko żółty
Gęstość: 1,04 g/cm³
Wartość pH – ok. 8,5 – koncentrat, ok. 7,8 roztwór (stężenie od 1%)

Główne zastosowanie

Dla wszystkich obszarów, gdzie instrumenty medyczne i urządzenia laboratoryjne muszą być dokładnie oczyszczone, konserwowane i wolne od pozostałości.

Odpowiedni do zanurzenia oraz w myjkach ultrasonograficznych w takich obszarach jak: urologia, chirurgia, endoskopia, anestezjologia, laboratoria, gabinety stomatologiczne i techników dentystycznych

Wielkości opakowań

nr kat. 90010 butelka 2 l (6 szt. w kart.)
nr kat. 90011 kanister 5 l (2 szt. w kart.)

Okres trwałości

3 lata

Trwałość stosowania roztworu

Może być stosowany kilkakrotnie, ale powinien być odnawiany codziennie

Producent

Laboratorium Dr. DEPPE

D-47906 Kempen / Niemcy
www.dr-deppe.de

DYSTRYBUTOR

DEZYMED® Kastrau Sp. j.
ul. Armii Krajowej 7/4,
11-300 Biskupiec
tel. 89 7154532 fax 89 7152362
e-mail: biuro@dezymed.pl
internet: www.dezymed.pl