

INSTRU PLUS O2 - granulat

preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego tlenu do ręcznej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej organicznie

Rodzaj produktu: wyrób medyczny klasa IIb CE 0481

- Nowoczesny preparat w koncentracji na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji powierzchni i narzędzi
- Do dezynfekcji i czyszczenia każdego rodzaju narzędzi i instrumentów wykonanych z szkła, metalu, gumy, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych
- Niezwykle ekonomiczny w stosowaniu-niskie stężenie (1,5%)
- Czas ekspozycji już od 15 min. zapewnia pełną skuteczność wirusobójczą wg normy EN 14476 (Adeno, Polio)
- Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych

Skuteczność **INSTRU PLUS O2** oparta jest na aktywnym tlenie. **INSTRU PLUS O2** nie zawiera konwencjonalnych substancji chemicznych i posiada bardzo szerokie spektrum skuteczności biobójczej. Zawiera specjalne, aktywnie działające substancje, zapewniające bardzo **skuteczne czyszczenie** i jest bardzo praktyczny w użyciu ze względu na sposób aplikacji.

INSTRU PLUS O2 idealnie nadaje się do **czyszczenia i dezynfekcji silnie zabrudzonych instrumentów**, ale również **powierzchni**. Dzięki dużej sile czyszczącej aktywny tlen doskonale rozpuszcza zabrudzenia w bardzo krótkim czasie. Bardzo dobrze nadaje się do dezynfekcji instrumentów medycznych, urządzeń laboratoryjnych wykonanych ze szkła, porcelany, metalu, gumy, plastików itp., ale również w odniesieniu do anestetycznego sprzętu termolabilnego, sztywnych i elastycznych endoskopów. Pomyślnie przetestowany pod kątem materiałozgodności termolabilnych i termostabilnych wyrobów medycznych firmy Karl Storz.

Właściwy do użycia w myjniach ultradźwiękowych. Nie nadaje się do dezynfekcji nieszlachetnych metali (aluminium) i wrażliwych na kwasy powierzchni (marmur).

Sposób użycia:

Proszek w ilości właściwej do oczekiwanego stężenia dodać do zimnej wody. Zamieszać wodę kilka razy. Po 5 minutach roztwór jest gotowy do użycia. Zanurzyć instrumenty natychmiast po przygotowaniu roztworu roboczego. Przestrzegać czasu ekspozycji.

Po upływie 12 godzin roztwór powinien być zmieniony.

Do dezynfekcji powierzchni: zanurzyć mop w roztworze i po odsączeniu płynu przecierać powierzchnię.

Certyfikacja przez uniwersytety i instytuty naukowe oraz opinie ekspertów:

Mikrobiologiczne i wirusologiczne opinie ekspertów:

Sporobójcza skuteczność wg EN 13704:2002 **1,5% - 60 min.**

Dr. rer. nat. Brill + Partner GmbH, Hamburg 28.07.2009 r.

Standardowe metody DGHM/VAH do dezynfekcji powierzchni **1,5% - 15 min.**

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, HYGCEN, A-Bischofshofen 29.07.2009 r.

Standardowe metody DGHM/VAH do dezynfekcji narzędzi **1,5% - 15 min.**

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, HYGCEN, A-Bischofshofen 29.07.2009 r.

Wirusobójcza skuteczność wg normy EN 14476 (adeno, polio) **1,5% - 15 min.**

HygCen International GmbH, A-Bischofshofen 29.07.2009 r.

Bakterio i grzybobójcza skuteczność **1,5% - 15 min.**

HygCen International GmbH, A-Bischofshofen 29.07.2009 r.

Prątkobójcza skuteczność **1,5% - 60 min.**

Dr. Pitten, Giessen 19.08.2009 r.

Tabela przygotowywania roztworów roboczych

Ilość roztworu roboczego	Wymagane stężenie	Ilość produktu	B, F, V	Tbc, S
litry		ml		
1	1,50 %	15	15 min.	60 min.
2		30		
4		60		
8		120		
10		150		
20		300		



Składniki: 100 g zawiera

60,0 g Potassiummonopersulfate (mononadsiarzan potasu)

Dane fizykochemiczne

Wygląd: lekko żółty granulat

Zapach: lekko chlorowy

Substancje stałe: 97,8%

Wartość pH – ok. 3 – roztworu 1,5%

Główne zalety

maksymalnie skuteczny w 1,5% roztworze; + wolny od aldehydu; + niska toksyczność; + bez szkodliwych emisji i drażniącego zapachu; + silne właściwości czyszczące; + bardzo oszczędny, + doskonała zgodność materiałowa, również wobec tworzyw akrylowych, + ulega biologicznie rozkładowi,

Wielkości opakowań

nr kat. 90041 butelka 1 kg (10 szt. w kart.)

nr kat. 90042 kanister 5 l (2 szt. w kart.)

nr kat. 90043 sasz. 30 g (100 szt. w kart.)

Okres trwałości

3 lata

Trwałość stosowania roztworu

Po 12 godzinach od przyrządzenia roztworu powinien zostać wymieniony

Producent

Laboratorium Dr. DEPPE

D-47906 Kempen / Niemcy

www.dr-deppe.de

DYSTRYBUTOR

DEZYMED® Kastrau Sp. j.

ul. Armii Krajowej 7/4,

11-300 Biskupiec

tel. 89 7154532 fax 89 7152362

e-mail: biuro@dezymed.pl

internet: www.dezymed.pl