



Titan Spray Disinfectant

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych na bazie alkoholu.

Titan Spray Disinfectant jest gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu stosowanym w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Wykazuje szerokie spektrum biobójcze, zwalcza bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy.

Sposób użycia

Titan Spray Desinfectant jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie równomiernie pokryć preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ściereczki. Powierzchnie spryskiwać preparatem z odległości ok. 30 cm. Jednorazowo dezynfekować maksymalnie 2 m powierzchni.



Cechy

- wydajny;
- szybki czas działania;
- wykazuje wysoką skuteczność biobójczą;
- nie pozostawia plam, smug, osadu na dezynfekowanych powierzchniach;
- łatwo dociera w trudno dostępne miejsca;
- wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem);
- ma przyjemny, lekki zapach.





Titan Spray Disinfectant

Właściwości

Postać: bezbarwna ciecz
Gęstość (20°C): ok 0,9 g/cm³
pH (1% roztwór): ok. 7,0

Powyższe dane reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Właściwości biobójcze w oparciu o badania mikrobiologiczne i wirusologiczne.

Działanie biobójcze		Czas ekspozycji
Profilaktyka w służbie zdrowia		1 min
prątki gruźlicy		5 min
bakterie (EN 14561), grzyby (EN 14562), prątki (EN 14563)		15 min
Wirusy	HBV/HCV/HIV	30 sek
	Adenowirus	5 min
	Papowavirus	15 min
	Poliovirus	30 min

Skład preparatu

100 g preparatu zawiera:
propan-1-ol - 32,5 g
etanol skażony - 18,0 g
glutar aldehyd - 0,1g

Opakowanie handlowe

Butelka - 1000ml - numer katalogowy: G12041
Kanister - 5000 ml - numer katalogowy: G12039

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Produkt magazynować tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5 – 30°C.
Przechowywać w chłodnych, suchych warunkach. Trzymać z dala od produktów spożywczych, napojów i pasz.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności i utylizacji produktu znajdują się w karcie charakterystyki preparatu. Karta charakterystyki jest dostępna m.in. na stronie internetowej: www.diversey.com

Kompatybilność produktu

Titan Spray Disinfectant jest odpowiedni do użycia na różnego rodzaju powierzchniach, wyjątek stanowią powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu (np. niektóre tworzywa sztuczne, powłoki z farb, lakierów). W przypadku niepewności zaleca się indywidualne ocenienie materiałów przed jakimkolwiek długotrwałym użyciem.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Atesty, pozwolenia

* preparat Titan Spray Disinfectant jest Wyrobem Medycznym kl IIa, posiada znak CE nr 0482.



Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5; 00-446 Warszawa
tel.: 22 328 10 00; fax: 22 328 10 01
marketing.jd-pl@diversey.com

Diversey
for a cleaner, healthier future™

Copyright © 2010, Diversey